



## 6 einfache Schritte für eine erfolgreiche Füllung mit **Surefil one™**

- 1 Zügig verarbeiten**  
Den Mischer am Behandlungsplatz aufstellen und das Material unmittelbar nach Mischende applizieren.  

- 2 Umgebungslicht reduzieren**  
Das OP Licht wegdrehen oder in den Kompositmodus (gelb) wechseln.  

- 3 Im Bulk applizieren**  
Die Kavität dabei leicht überfüllen. Schichten ist nicht notwendig.  

- 4 Zum Rand hin arbeiten**  
Mit dem Instrument von der Mitte zum Rand hin ausstreichen. Nicht stopfen.  

- 5 Okklusion lichthärten**  
Direkt danach kann mit dem Schleifen, Finieren und Polieren begonnen werden.  

- 6 Feucht polieren**  
Die Restauration während der Politur feucht halten.  


# Surefil one™

Selbstadhäsives Komposithybrid

## Bestellinformationen

### Surefil one™ Nachfüllpackung

Je 16 Kapseln, Gebrauchsanweisung, Bildgebrauchsanleitung

**60300211** Nachfüllpackung A1

**60300212** Nachfüllpackung A2

**60300213** Nachfüllpackung A3

**60300215** Nachfüllpackung A3.5

**60300216** Nachfüllpackung Bleach White



### Surefil one™ Eco Nachfüllpackung

Je 50 Kapseln, Gebrauchsanweisung, Bildgebrauchsanleitung

**60300302** Eco Nachfüllpackung A2

**60300303** Eco Nachfüllpackung A3



### Surefil one™ Einführungspaket

**60300200** 20 x A2, 20 x A3, 5 x A1, 5 x Bleach White,  
1 x Kapselapplikator

### Surefil one™ Komplettpaket

**60300310** 1 x Eco Nachfüllpackung A2, 1 x Eco Nachfüll-  
packung A3, 1 x Einführungspaket, 1 x Promix one

### Surefil one™ Kapselapplikator

**60606596** Kapselapplikator 2

### Surefil one™ Kapselmischer

**2770000000** Promix one



Besuchen Sie uns auf [f facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona) oder

auf Instagram [@dentsplysirona](https://www.instagram.com/dentsplysirona) [dentsplysirona.de](https://www.dentsplysirona.com)

[dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com) · [pre@dentsplysirona.com](mailto:pre@dentsplysirona.com)

Service-Line für Deutschland: 08000-735000 (gebührenfrei)

Service-Line für Schweiz und Österreich: 0800-00735000

(gebührenfrei)

Dentsply Sirona Deutschland GmbH |

Fabrikstr. 31 | 64625 Bensheim, Deutschland

©2020 Dentsply Sirona Inc. All rights reserved