

CEREC SW 5.1.3

UPDATE BESCHREIBUNG MATERIALPACK

Das Update „CEREC SW 5.1.3 Material Pack 21-04 (V2)“ benötigt zwingend eine bereits installierte CEREC SW 5.1.3.230676.

Integration neuer Materialien (gegenüber CEREC SW 5.1.3)

Hersteller	Material
Dentsply Sirona	CEREC Zirconia+
	CEREC MTL Zirconia
	CEREC Tessera


Bitte beachten Sie regionale Einschränkungen bezüglich TiBase und Materialien. Nachzulesen im Dokument “Combinations of titanium bases and materials in the CEREC software 5.1.3”, welches sie auf my.cerec.com finden.

Wichtig: Um die mit diesem Materialpack freigeschalteten Materialien auf der CEREC Primemill fertigen zu können, ist ein Update der CEREC Primemill Firmware auf die Version 2.3.70-V112020_mp notwendig. Firmware (Dateiname: M17-2.3.70-V112020_mp_full.zhex) und Update Anleitung finden Sie auf my.cerec.com.

Installation & Lizenz

■ Automatisches Update:

Eine Updatemeldung erscheint als Pop-up auf dem Desktop. Wählen Sie „Download“, um das Update direkt durchzuführen. Falls Sie das Update zu einem späteren Zeitpunkt durchführen wollen, ist dies jederzeit möglich. Möchten Sie das Update zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, müssen Sie in der Windows-Taskleiste bei den Benachrichtigungssymbolen das Dentsply Sirona AutoUpdate Center öffnen.

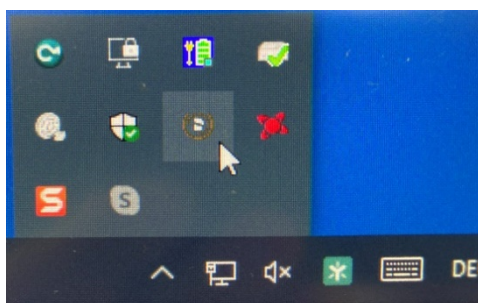

Im Dentsply Sirona AutoUpdate Center befindet sich das „CEREC SW 5.1.3 Material Pack 21-04 (V2)“ in der Updateliste. Der Download des Materialpacks kann gestartet und bei Bedarf angehalten und fortgesetzt werden. Nach Abschluss des Downloads kann die Installation des Materialpacks gestartet werden.

- Führen Sie vor Beginn der Installation eine Datensicherung durch.
- Prüfen Sie vor Beginn der Installation in den Datenbankeinstellungen (CEREC SW: Konfiguration\Einstellungen\Patientendatenbank), dass die Patientendatenbank in einem

eigenen Verzeichnis gespeichert ist – nicht in den obersten Ebenen eines Laufwerks (z.B. „D:\Data“ anstatt „D:\“).

- Installationsroutine nicht auf mehreren CEREC-Einheiten oder Arbeitsstationen gleichzeitig durchführen, wenn diese über ein Netzwerk verbunden sind.
- Um eine optimale Funktionalität Ihrer CEREC Software 5.1.3 sicherzustellen, ist die Nutzung des richtigen Grafikkartentreibers notwendig. Beim Starten der Software wird automatisch geprüft, ob Ihr Treiber korrekt ist. Sollten Sie eine Meldung erhalten, dass dies nicht der Fall ist, kontaktieren sie bitte den Kundenservice.
- Das Update von einer bestehenden CEREC SW 5.1.x auf CEREC SW 5.1.3 Materialpack benötigt keine weitere Lizenz.

Alle CEREC SW Downloads finden Sie auf:

<https://www.dentsplysirona.com/de-de/entdecken/cerec/downloads.html>
my.cerec.com