

CEREC SW 5.1.1

UPDATE BESCHREIBUNG (DE)

Das kostenlose Update „CEREC SW 5.1.1“ benötigt zwingend eine bereits installierte CEREC SW 5.1.0.

Neues und Änderungen in CEREC SW 5.1.1

- Umfasst ein Firmware-Serviceupdate für CEREC Primemill
- Umfasst ein Firmware-Serviceupdate für CEREC Speedfire
- Integration neuer Materialien (gegenüber CEREC 5.1.0):

Hersteller	Material
Dentsply Sirona	CEREC Tessera
	Celtra DUO weitere Blockfarben: Block C 14 in HT BL2 und HT BL3 verfügbar
Ivoclar Vivodent	IPS e.max ZirCAD MT Multi jetzt weltweit freigeschaltet
Vita	SUPRINITY FC entfernt (weltweit)

Bitte beachten Sie regionale Einschränkungen bezüglich TiBase und Materialien. Nachzulesen im Dokument „Combinations of titanium bases and materials in the CEREC software 5.1.0“, welches sie auf my.cerec.com finden.

Bug fixes

- Verschiedene Bug fixes zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Stabilität.

Installation & Lizenz

- Eine Updatemeldung erscheint als Pop-up auf dem Desktop.
- Sie haben die Möglichkeit das Update direkt durchzuführen, indem Sie „Installieren“ auswählen. Falls Sie die Installation zu einem späteren Zeitpunkt durchführen wollen („Nicht mehr anzeigen“), ist dies jederzeit möglich.
- Für einen späteren Download müssen Sie in der Windows-Taskleiste bei den Benachrichtigungssymbolen das „AutoUpdate@ Sirona Connect Center“ öffnen.



- Im „AutoUpdate @ Sirona Connect Center“ befindet sich das CEREC SW 5.1.1 Servicepack in der Updateliste.

Der Download kann über einen Klick auf das Icon gestartet werden. Auch wenn eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung stattfindet, kann der Download an der gleichen Stelle über die Betätigung des Icons fortgesetzt werden. Über das zweite Icon kann das Installationssetup gestartet werden.

- Vor Beginn der Installation eine Datensicherung durchführen.
- Vor Beginn der Installation unter *Konfiguration\Einstellungen\Patientendatenbank* sicherstellen, dass die Patientendatenbank in einem eigenen Verzeichnis gespeichert ist – nicht in den obersten Ebenen eines Laufwerks (z.B. „D:\Data“ anstatt „D:\“).
- Installationsroutine nicht auf mehreren CEREC-Einheiten oder Arbeitsstationen gleichzeitig durchführen, wenn diese über ein Netzwerk verbunden sind.
- Um eine optimale Funktionalität Ihrer CEREC Software 5.1.1 sicherzustellen, ist die Nutzung des richtigen Grafikkartentreibers notwendig. Beim Starten der Software wird automatisch geprüft, ob Ihr Treiber korrekt ist. Sollten Sie eine Meldung erhalten, dass dies nicht der Fall ist, kontaktieren sie bitte den Kundenservice.
- Das Update von einer bestehenden CEREC SW 5.1.0 auf CEREC SW 5.1.1 benötigt keine weitere Lizenz.