

Propex IQ® Apex-Lokalisator

Anleitung für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation



Dies ist eine ergänzende Anleitung zur Gebrauchsanweisung. Berücksichtigen Sie alle Warnhinweise und die

Berücksichtigen Sie alle Warnhinweise und die ausführlichen Anleitungen in der Gebrauchsanweisung.



Reinigung, Desinfektion und Sterilisation

Allgemein

Die folgenden Teile müssen nach jeder Behandlung sofort aufbereitet werden:



Propex IQ® Apex-Lokalisator Reinigung und Desinfektion (mit Halteklemme, falls angebracht)



MesskabelReinigung und Desinfektion





X-Smart IQ® Messkabel Reinigung und Desinfektion

LippenclipReinigung, Desinfektion und Sterilisation



Feilenclip

Reinigung, Desinfektion und Sterilisation

(1)

Propex IQ® Apex-Lokalisator (mit Halteklemme), Messkabel und X-Smart IQ® Messkabel können nicht sterilisiert werden.

Reinigung




Propex IQ® Apex-Lokalisator







Reinigen Sie das Gerät mit in Reinigungslösung getränkten Einmalwischtüchern (z. B. CaviWipes™)

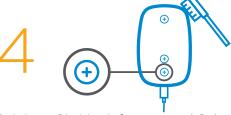

gefährliches Material


Reinigen Sie Vertiefungen und Schrauben mit einer sauberen, in Reinigungslösung getränkten Bürste (nicht das Innere des USB-Anschlusses reinigen)

5

Der Propex IQ® Apex-Lokalisator ist jetzt sauber. Bitte fahren Sie mit der Desinfektion fort (siehe Seite 7)



Reinigung

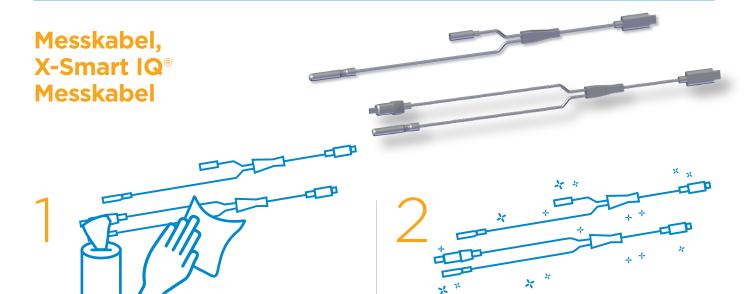


Reinigung mit in Reinigungslösung getränkten Einmalwischtüchern. (z. B. CaviWipes™)

Das Zubehör ist jetzt sauber. Bitte fahren Sie mit der Desinfektion fort (siehe Seite 6)


Feilenclip und Lippenclip

Vorbehandlung zum persönlichen Schutz



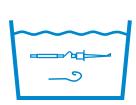

Tauchen Sie Feilenclip und Lippenclip vollständig für die vorgeschriebene Einwirkzeit in Reinigungslösung (CIDEZYME®, ENZOL® Enzymatische Reinigungslösungen) ein

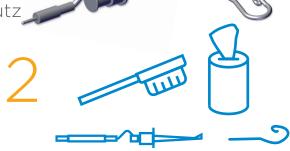

Reinigung mit einer Bürste oder einem Wischtuch





Drücken Sie den Feilenclip 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt



Spülen Sie 3 Mal jeweils 1 Minute lang mit Wasser. Feilenclip und Lippenclip sind jetzt vorbehandelt. Bitte fahren Sie mit der Reinigung fort (Schritt 5)

Reinigung von Feilenclip und Lippenclip




Tauchen Sie Feilenclip und Lippenclip vollständig für die vorgeschriebene Einwirkzeit in Reinigungslösung ein

Drücken Sie den eingetauchten Feilenclip 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt



Spülen Sie 3 Mal jeweils 1 Minute lang mit Wasser Drücken Sie den Feilenclip während des Spülens 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt

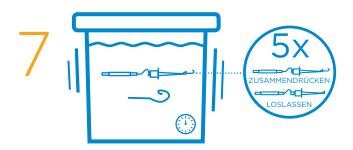

Tauchen Sie Feilenclip und Lippenclip vollständig für die vorgeschriebene Einwirkzeit in ein Ultraschallbad mit Reinigungslösung ein; Drücken Sie den eingetauchten Feilenclip 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt



Spülen Sie 3 Mal jeweils 1 Minute lang mit Wasser Drücken Sie den Feilenclip 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt




Feilenclip und Lippenclip sind jetzt sauber. Bitte fahren Sie mit der Desinfektion fort (Seite 7)


Desinfektion




Propex IQ® Apex-Lokalisator, Messkabel, X-Smart IQ® Messkabel

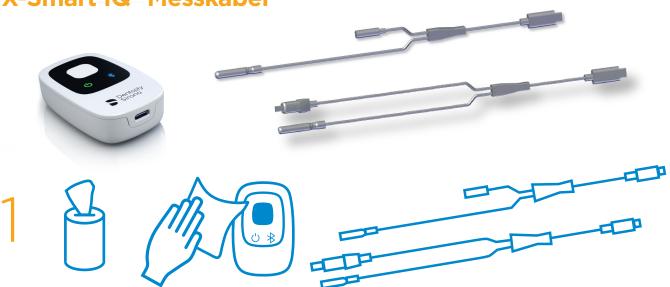

Desinfizieren Sie Gerät und Zubehör (inkl. Vertiefungen) mit in Desinfektionsmittel mit Alkohol und quartären Ammoniumverbindungen als Wirkstoffen getränkten Wischtüchern (z. B. CaviWipes™). Lagern Sie Gerät und Zubehör nach der Desinfektion entsprechend den in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Anweisungen zur Aufbewahrung

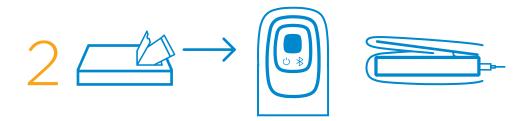


Stecken Sie das Gerät unmittelbar vor der Verwendung in eine ungebrauchte Schutzhülle. Ziehen Sie eine zweite Hülle über die Halteklemme, falls die Halteklemme angebracht ist

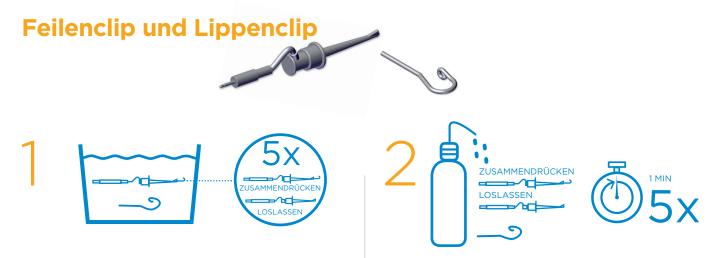

Tauchen Sie Feilenclip und Lippenclip vollständig für die vorgeschriebene Einwirkzeit in Desinfektionslösung (Ciedex OPA) ein; Drücken Sie den Feilenclip während der vorgeschriebenen Einwirkzeit 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt

Spülen Sie 5 Mal jeweils 1 Minute lang mit Wasser


Drücken Sie den Feilenclip 5 Mal zusammen und lassen Sie wieder los, so dass er sich öffnet und schließt

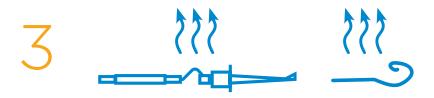

Lassen Sie Feilenclip und Lippenclip trocknen



2

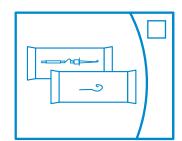

/// 134 °C



Geben Sie Feilenclip und Lippenclip in ungebrauchte Sterilisationsbeutel

Dampfsterilisieren Sie Feilenclip und Lippenclip mindestens 3 Minuten bei 134 °C. Inspizieren Sie Feilenclip und Lippenclip (ausführliche Informationen siehe Gebrauchsanweisung)



Entsorgen Sie alle Einmalhandschuhe und -wischtücher als biologisch gefährliches Material



Verwenden Sie nur für medizinische Geräte geeignete und in Ihrem Land/Ihrer Region zugelassene Reinigungs- und Desinfektionslösungen