

ビスタスキャン ナノ イージー

VistaScan Nano Easy

画像診断をより快適に

デンタルイメージングプレートスキャナー



Made in Germany

ビスタスキャン ナノ イージー コンパクトでも確かな診断



ビスタスキャン ナノ イージーで診断を快適に

ビスタスキャンナノイージーは歯科医院でのデンタル画像診断を今まで以上に快適にします。

設置サイズは167mm(横)×216mm(奥行)でモニターサイドやチェアサイドなどに省スペース設置を可能にします。

本体およびソフトウェアの操作は一連のワークフローに沿って行う事ができます。デンツプライシロナの画像ソフトウェア「Sidexis 4」への連携にお

いては、専用プラグインソフト「イメージブリッジ」が用意されており、読み取り画像のスムーズな転送が可能です。

ビスタスキャンナノイージーは診断に不可欠なデンタル画像を提供します。専用のイメージングプレートはサイズ0/1/2に対応しており、成人から小児まで広く対応します。さらに読取後のイメージングプレートは自動的に消去されるので、繰り返しの使用が容易です。

デュールデンタルは20年以上にわたって、多様なイメージングプレートスキャナーを世界各国で発売しています。

クイック&イージーコンセプトの「ビスタスキャンナノイージー」がデンタルレントゲン画像の新たな診断スタイルを提案いたします。

製品特徴

- デンタル撮影フォーマット 0/1/2対応
- 理論解像度16.7LP/mm
- コンパクトサイズで省スペース設置可能
- 読取画像は「Sidexis 4」へ直接転送可能



イメージングプレートですばやく確かな診断

レントゲン撮影の手順は、従来のアナログフィルムと変わりません。独自の読み取りシステムにより、画像の細部まで確認することができます。ソフトウェアの画像診断用補助フィルタを使用することで、診断の信頼性をさらに高めます。

イメージングプレートは薄くて柔らかいため、口腔内ポジショニングの際に患者が感じる違和感を低減します。またイメージングプレートは特殊コーティングされており、耐久性にも優れています。



ビスタスキャンは、南西ドイツのシュヴァルツヴァルト（黒い森）にある「デュールオプトロニクス」の工場ですばやく最先端の技術を使用して製造されています。



VistaScan Nano Easy





イメージングプレート

小児から成人まで、用途に合わせた3種類の専用イメージングプレートサイズに対応しており、サイズ0/1/2のイメージングプレートを読み取ることができます。



薄くて柔軟で快適

専用のイメージングプレートは薄くて柔軟で口腔内の撮影箇所にフィットします。さらに固くなく患者口腔内での違和感を軽減します。またエリアすべてが照射面で画像を撮影する事が可能です。



クイック&イージー

撮影したイメージングプレートを挿入口に投入するだけで簡単に画像を読み取ります。そして読み取った画像は自動的にモニターに表示されます。





カートリッジ

イメージングプレートサイズに合わせたカートリッジを使用します。ただし撮影毎の交換は不要です。イメージングプレートサイズを変更するときのみカートリッジを交換します。

VistaScan Nano Easy Images

※ 65,535 グレー階調

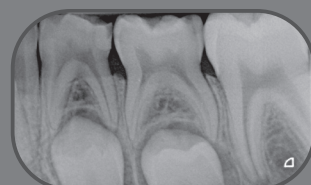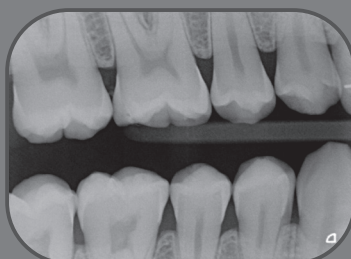

仕様	ピスタスキャン ナノ イージー
外形寸法	高さ231mm×横167mm×奥行216mm
重量	約4kg
電源/周波数	100VAC 50/60Hz
定格電源入力	12W未満
接続	有線LAN
対応IPサイズ	サイズ0「IQ 0」 小児用 22×35mm サイズ1「IQ 1」 中間サイズ 24×40mm サイズ2「IQ 2」 標準 31×41mm
実質解像度	12.5 LP/mm、635 dpi
論理解像度	16.7 LP/mm、849 dpi
ダイナミックレンジ	16ビット、65,538グレー階調
付属品	
イメージングプレート	サイズ2「IQ 2」標準 31×41mm (5枚)
保護カバー	サイズ2用 (100枚)
その他	電源アダプター、カートリッジ (サイズ2×2個)、IPケース 本体カバー、IPクリーナー、FD350除菌ワイブ、取扱説明書、クイックマニュアル
ソフトウェア	イメージングソフトウェア「VistaSoft」 デンツプライシロナの画像ソフトウェア「Sidexis 4」への連携は専用プラグイン「Image Bridge」をご使用いただけます。
販売名	ピスタスキャン ナノ イージー
一般的名称	コンピューテッドラジオグラフ (管理 特管 設置)
医療機器認証番号	304AHBZX00005000
製造販売元	デュールデンタルジャパン株式会社
製造元	DÜRR DENTAL SE (ドイツ)

販売元



デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5F

www.dentsplysirona.com

カタログ番号: BG4801DU

