

長期休暇時の電源のOFF/ON

★長期休暇および計画的な停電(ビルのメンテナンス等)等に備えてOFFにする場合

1) RCU Serverを終了させる



「バックアップ実行」をクリックします


2) EXT-HDDを終了させる



背面の電源スイッチを【O】にします。



3) Storageを終了させる

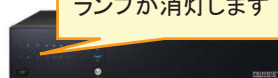

電源ボタンを、軽く押してください。数分後ランプが消灯します

4) UPSを終了させる



電源ボタンを押します


★長期休暇および計画的な停電(ビルのメンテナンス等)後にONにする場合

1) UPSをONにする



電源ボタンを押します

2) Storageを起動させる

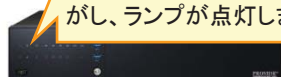

電源ボタンを、軽く押してください。数分後「ピーピー」と起動音がし、ランプが点灯します

3) EXT-HDDを起動させる



背面の電源スイッチを【I】にします。



4) RCU Serverを起動する



電源ボタンを押します