

## 長期休暇および計画的な停電（ビルのメンテナンス等）時の電源管理

※「Storage」「EXT-HDD」をOFF/ONするには（通常「Storage」「EXT-HDD」は常時ONで運用します）

### ★長期休暇および計画的な停電（ビルのメンテナンス等）等に備えて**OFF**にする場合


1) RCU Serverを終了させる



2) EXT-HDDを終了させる



背面の電源スイッチを【O】にします。

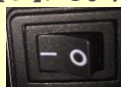


3) Storageを終了させる



電源ボタンを、軽く押してください。数分後ランプが消灯します

### ★長期休暇および計画的な停電（ビルのメンテナンス等）後に**ON**にする場合

1) Storageを起動させる

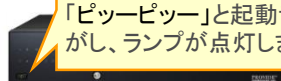

電源ボタンを、軽く押してください。数分後「ピーピー」と起動音がし、ランプが点灯します

2) EXT-HDDを起動させる



背面の電源スイッチを【I】にします。



3) RCU Serverを起動する

