

Simplant®

Simplant Pro 18

ポータルサイト マニュアル

- ・ シムプラントPro データ作成処理～データのダウンロード
- ・ シムプラントPro ガイドオーダー～ガイドオーダー履歴の閲覧
- ・ セレック コネクト ケース センターから口腔内スキャンデータの送信

テックサービス専用窓口

デンツプライシロナ株式会社

〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館

受付時間：9：00～17：00（土・日・祝祭日を除く）

TEL：0120-016-152

FAX：0120-280-630

E-mail: Japan-simplant-cmp@dentsplysirona.com

目次

1.	アカウント登録	…P5
2.	CT撮影データのアップロード準備	…P7
3.	口腔内スキャナーデータ(STLデータ)の準備	…P8
4.	石膏模型模型の準備	…P9
5.	データ作成処理、模型マッチングをオーダーする場合	…P10
6.	データ作成処理済みデータのダウンロード方法	…P18
7.	シムプラントProからガイドをオーダーする場合	…P20
8.	ガイドオーダーの確認方法	…P25
9.	セレックのスキャンデータを送る方法	…P28

ポータルサイトとは？

旧データ作成処理システム・DentalPlanitの後継システムで、ガイドのオンラインショップと統合されたシステムです。ご利用の際は、ログイン操作が必要で、ユーザーID（メールアドレス）とパスワードは、ガイドオーダー時と同一となっています。

DentalPlanitとの主な相違点

- ◎ 両顎処理はありませんので、上顎・下顎と別々に症例をご登録ください。
- ◎ 抜歯は、ご指定いただいた歯冠部のみ削除されます。
- ◎ 石膏模型または口腔内スキャンデータと、ダブルスキャンデータとの両方のマッチングは行えません。
- ◎ お客様から弊社あてにCTデータを送る手段として、メールや「大容量ファイル送信サービス」等
またはCD-R・USBメモリなどの送付をご利用の場合は、作業料（2,100円・税別）が加算されます。
また、その際は、「Pro用データ作成処理指示書」の同封が必要となります。
- ◎ オーダー番号欄（症例に名前をつける）でデータ作成処理のご注文内容を判別いたします。
 マッチングのみ（骨の3D作成無）の場合：
 始めに必ず「MO：」と付与してください（1,000円・税別）
 通常処理（骨の3D作成+マッチング）の場合：
 症例名だけで結構です（19,000円・税別）

1. アカウント登録

既にシムプラント、アトランティスのアカウント（メールアドレス・パスワード）をお持ちの方は、そのままご使用いただけますので、本ページの操作は不要です。

シムプラントのアカウントは、従来のガイドオーダー時やガイドオーダー履歴閲覧時のログインにご使用のメールアドレスと同一です。
アカウントが既にあり、メールアドレス変更をご希望の場合には、担当営業またはテクニカルサービスまで、ご連絡ください。

“シムプラント”で検索し、デンツプライシロナ ホームページ以下リンクよりポータルサイトへアクセスします。



トップページ右上“登録を”クリックし必要事項を記入、アカウント登録を行います。



登録画面にて必要事項を登録します。ログイン情報、アカウント情報を入力します。

「下のテキストをコピーしてください。」には、表示されている4文字を読み取り入力してください。 全ての必須項目の入力が終了したら、登録をクリックしてください。

個人情報

氏名	
姓	
名前(姓順)	
電話番号	
携帯電話番号(任意)	
性別	

※必ずお読みください。個人情報を保護するために必要十分な項目を必ず入力してください。



請求先住所

郵便区	
市区町村	
町丁目	
建物番地	
支店	
郵便番号	

※上記欄は必須です。請求書作成のために必要十分な項目を必ず入力してください。

登録したアドレスに、アカウント有効化を求めるメールが届くので、24時間以内にクリックし有効化します。
有効化が完了しましたら、当社テクニカルサービスへまたは担当営業へご連絡ください。

[illegible]

期限内に確認クリックを行えなかった場合は、ホーム画面右上ログインから、ログイン操作を行ってください。有効化が行えない場合は、再度、確認メールが送信されます。



2. CT撮影データのアップロード準備

治療部位に関わらず、支持のため必要な両側範囲（できるだけ全顎）のスキャンが必要です。

CT撮影データはDICOMファイル形式でアップロードします。

歯科用CTの場合は付属のソフトウェアにて、DICOM出力やDICOMエクスポートなどの機能をご利用いただき、ファイルを作成してください。

DICOMファイルは、非圧縮のアキシャル画像（水平断）が必要で、フィルム出力イメージの目盛りなどが入った画像やJpeg形式などの画像ファイルは非対応となります。

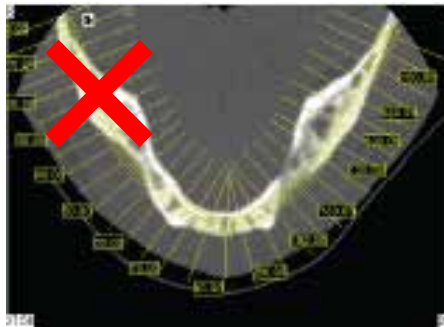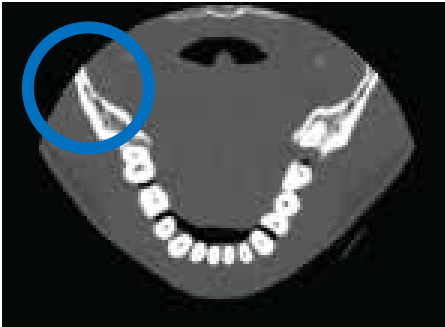

DICOMファイルは必ずフォルダの圧縮(zip形式)を行ってください。

DICOMファイルは、フォルダ内に出力スライス数の複数ファイルが保存されていることがあります。アップロードの操作を1回で行い時間短縮するために、フォルダの圧縮を行ってください。

【ファイル・フォルダの圧縮方法】

- ・フォルダの上で、マウスを右クリックしメニューを表示。
- ・「送る>圧縮（zip形式）フォルダ」を選択。フォルダ名と同名のZIPファイルが作成される。

注意：圧縮の際は、できるだけファイルサイズを小さくできるよう、DICOMファイルが保存されたフォルダを選択し、ビューワーソフトなど余分なファイルが含まれていないか確認してください。


DICOMファイル出力時のフォルダ構成の例

The screenshot illustrates the process of compressing a DICOM folder. It shows a File Explorer window with a list of folders including COMPO, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, and CT7. The 'CT3' folder is selected, and the context menu is open. The '送る' (Send to) option is highlighted, and the '圧縮 (zip 形式) フォルダ' (Compress (zip format) folder) option is selected. A progress bar shows the compression process. The final result is a 'CT3.zip' file in the folder list.

名前	更新日時	種類	サイズ
COMPO	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT2	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT3	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT4	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT5	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT6	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT7	2021/12/11 18:03	ファイル フォルダ	
CT3.zip	2022/07/18 23:19	圧縮 (zip 形式) ファイル	153,080 KB

3.口腔内スキャナーデータ(STLデータ)の準備

- 口腔内スキャナーデータは**STL形式**でエクスポートしてください。
- 対合のSTLデータは必須ではありません。対合がある場合は、咬合状態の上下顎を再現可能です。
- バイトのSTLデータは不要です。
- 治療部位に関わらず、支持のため必要な両側範囲（できるだけ全顎）のスキャンが必要です。
- 抜歯予定部位がある場合、ガイドオーダー時に指定いただくことで、CADデータ上での歯冠部削除しての、ガイドデザイン・作製が可能です。抜歯部位は複数歯にも対応可能です。
- ガイドを支持する歯、欠損部位の粘膜が、スキャン不足（頬舌・近遠心方向）やスキャン不良（穴開き、頬粘膜など不要な画像）の場合は、ガイドデザイン不可能となり、ガイド作製が行えませんので、再スキャンを行ってください。
- スキャンデータの不備によるガイドの不適合は責任を負いかねます。

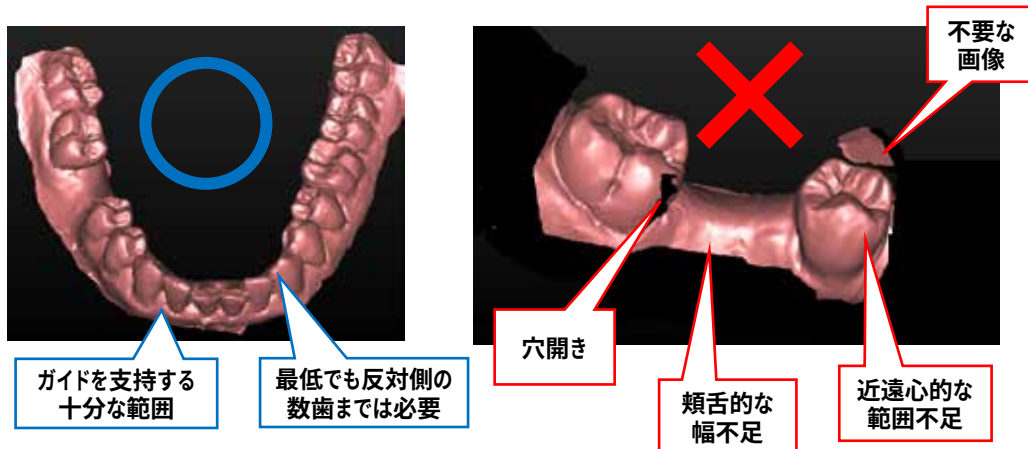


- ガイド納品時には、口腔内スキャンSTLデータからの光造形モデルと一緒に納品します。
(今までの石膏模型の代わりとなります。これらの料金は無料です)



- 3ヶ月以内にシムプラントガイドをご注文いただいた場合は、模型マッチング費用は発生いたしません。ただし、3ヶ月以内にシムプラントガイドをご注文いただけない場合は、別途マッチング費用が請求されます。

4.石膏模型の準備

- a) **WaxUpなしの模型** 1個、もしくは b) **WaxUp仮着式**(あり/なしが再現可能)の**模型**を1個
 - WaxUp模型は仮着式（簡単にはずれる程度の部分的焼き付け）にしてください。

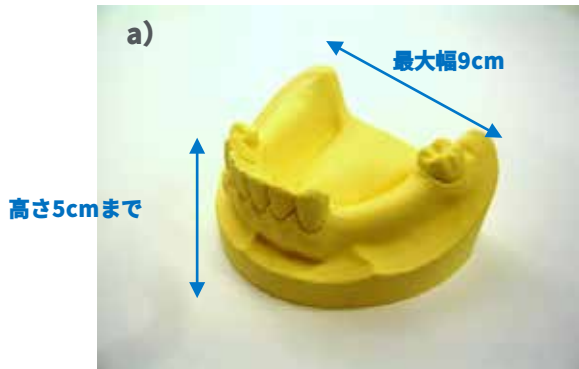

- ガイドの口腔内への適合は石膏模型の精度に左右されます。
 - **シリコン印象材を使用し、超硬または硬石膏**での作製を推奨します。
 - 気泡が入らないようにしてください。
 - 歯牙の破折した模型や必要部分の欠けている模型は使用できません。
- **作業用模型、分割模型は使用できません。**
- **対合、ステント、バイト、咬合器、マウンティングプレート、トレイは不要です。**
- 破損したり、ワックスアップが外れたりしないよう厳重に梱包してください。
- 石膏模型を送付する場合は、**ポータルサイトオーダー後に印刷した「出荷書類」を、必ず同封してください。**（同梱・添付がない場合には納期が遅れる場合があります）
- **必ず元払いにて当社東京工場（デジタルデンタルソリューションセンター東京）へお送りください。**
- 3ヶ月以内にシムプラントガイドをご注文をいただいた場合は、**模型マッチング費用は発生いたしません。**ただし、3ヶ月以内にシムプラントガイドをご注文いただけない場合は、**模型を返却し、別途マッチング費用が請求されます。**

5. データ作成処理、模型マッチングをオーダーする場合

“シムプラント“で検索し、デンツプライシロナ ホームページ以下リンクよりポータルサイトへアクセスします。



ポータルサイトにログインし、“コンピューターガイドッドインプラントロジー“下方の“オーダーする“をクリックします。



ここでの「オーダーする」は、データ作成処理用で、ガイドオーダー用ではありません。

ユーザーID（ご登録のメールアドレス）、パスワードを入力しログインします。

ユーザーIDはガイドオーダー時のメールアドレスと同一で、旧DentalPlanitのユーザーIDとは違います。



オーダー手順 (1. 処方)

症例名 (カルテ番号、患者名など) を、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・数字などで入力します。入力内容はオーダー履歴、納品書に表示、印字されます。

通常の処理 : 始めのMOは不要 例) デンツタロウ
模型マッチングのみ : 始めにMOが必須 例) MO:デンツジロウ
 ※MOはマッチングオンリーを示し、これにより処理費を調整します。

DICOMデータの変換のみ (骨のみの3Dデータ作成、模型マッチング無し) をご希望の場合は、部分欠損でも“無歯顎”を選択してください。

治療部位 (上顎骨/下顎骨) を正確に選択してください

インプラントメーカー、インプラントシステム、クラウン固定は、あくまでも予定として選択してください。

インプラントの埋入予定位置を選択してください。

補綴物の予定位置“を選択してください。

術時に抜歯予定の場合で、抜歯処理 (3D画像上での歯冠部削除) を希望される場合に、抜歯部位を選択してください。

予定の“支持タイプ”を選択してください。ガイドオーダー時の変更は可能です。ガイドの予定がない場合は、任意にどちらかを選択してください。

DICOMデータの変換のみ (骨のみの3Dデータ作成、模型マッチング無し) をご希望の場合は“骨支持”を選択してください。

予定の“ガイドタイプ”を選択してください。ガイドオーダー時の変更は可能です。ガイドの予定がない場合は、任意にどちらかを選択してください。
 ユニバーサルガイドをオーダー予定の場合、パイロットガイドを選択してください。

必ず“Pro”を選択してください。(SimplantPro用データが作成されます)

必須

このコンピュータからアップロードする
 ZIP形式に圧縮したDICOMデータをアップロード。7ページ参照。
このアイテムを宅急便で送付します
 CD-Rなどで送付。作業料2,100円・税別が加算されます。
このコンピュータからシムプラントデータをアップロードする
 SimplantProで取込み済みのProデータをアップロード。

このコンピュータからアップロードする
 口腔内スキャン、ラボスキャンによるSTLデータをアップロード。
 必要データについては、8ページ参照。
このアイテムを宅急便で送付します
 石膏模型 (欠損状態、ワックスアップ付等) を送付。9ページ参照
コネクトケースセンターからスキャンを選択
 セレック・コネクトSWでスキャン、アップロードされた場合。
 コネクトSWについては、28ページ参照。
 ※石膏模型送付での「診断用クラウン」の選択方法
 ワックスアップ無しの場合は、「このアイテムを使用しない」
 ワックスアップありの場合は、「宅急便で送付」など

必要項目を入力したら“次へ”をクリックします。

オーダー手順（1. 処方を入力例）

症例の状況別の入力例を示します。赤枠□は必須項目になります。

①通常処理+模型マッチングの入力例

オーダー番号

診療

材料

使用システム

必須

必須

②模型マッチング無しの入力例

オーダー番号

診療

材料

使用システム

必須



必須

ガイドの支持タイプに関わらず「骨支持」を選択。

ガイドの支持タイプに関わらず「歯牙支持」を選択。

「このアイテムは使用しない」を選択。

ワックスアップ無しの場合は、「このアイテムは使用しない」を選択。

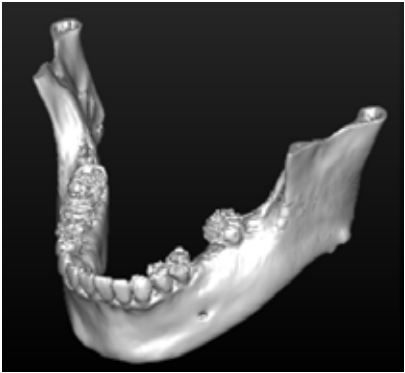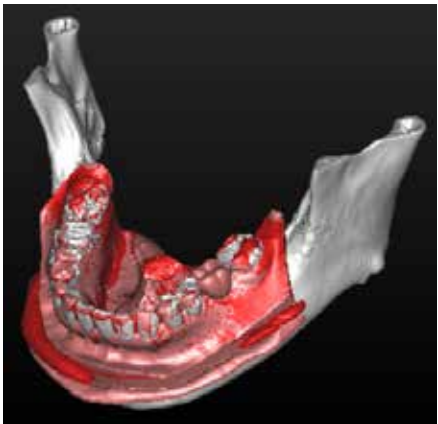

オーダー手順（1. 処方の入力例）

症例の状況別に入力例を示します。赤枠  は必須項目になります。

【③粘膜支持・ダブルスキャンの入力例】



残存歯の有無に関わらず
「無歯顎」を選択。


ガイドの支持タイプに関わらず
「歯牙支持」を選択。

ガイドの支持タイプに関わらず
「粘膜支持」を選択。

必須

事前にSimplantProでDicomデータの取込、保存を行った、
シムプラントProデータを選択。

上の参照で診断用ステントを装着した患者さん、下の参照で診断用ステントのみのDicomデータを選択。

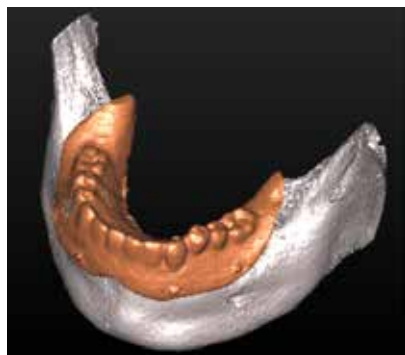

【④模型マッチングのみの入力例】




残存歯の有無に関わらず
「部分欠損」を選択。

必須

ワックスアップなしの場合は、
診断用クラウンで「このアイテムは使用しない」を選択。

ワックスアップなしの場合は、
診断用クラウンで「このアイテムは使用しない」を選択。

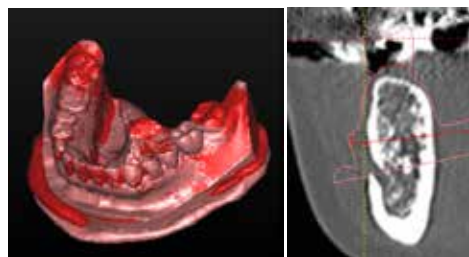

オーダー手順（2. 買い物かご）



※ “データ作成処理”はポータルサイト画面上では“Simplant planning service”と表示されます。また納品書、請求書の品名も同様に“Simplant planning service 1（～16）”と表記されますので、あらかじめご了承ください。

※ 【買い物かごにある製品】の欄にSimplant planning service（データ処理）として料金が表示されておりますが、データ処理なしで模型マッチングのみをご依頼いただいた（患者名の前にMOを付けている）場合は、表示金額を訂正しての請求となります。

※ ポータルサイトへデータをアップロードせず、DVDやUSBメモリ等メディアでデータをデンツプライシロナへ送付する場合、別途作業料金が発生いたします。

※ 模型マッチングのみの処理の場合は、3か月以内にシムプラントガイドをご注文いただいた場合、費用は発生いたしません。ただし、3か月以内にシムプラントガイドをご注文いただけない場合、別途作業料金が発生いたします。

オーダー手順（3. 請求、発送）

日本語

ようこそ, デンツプライ

ログアウト

Dentsply Sirona

ホーム オーダー マイアカウント ヘルプ

1 処方

2 買い物かご

3 請求 発送

4 確認およびオーダー確定

Please note that our services can be temporarily down between August 14-16 while we upgrade our servers. If you experience any problems please try again a bit later or contact customer support.

Dear Customer, At Dentsply Sirona we are here to support you whenever you need us. Contact customer service or your sales representative if you have questions or concerns. IMPORTANT notices:

- Due to COVID-19 (coronavirus), we are until further notice optimizing our turnaround time for FastTrack guide design and for Simplant planning proposals from 48 hours to 72 hours (3 working days). Please consider this when planning your surgery date.
- IMPORTANT notice for Straumann BLX users Please read before ordering.
- ファシリテート カイデッド サージェリー キットとドリル以外（FA フォルダードライバー、ドリルキー、インプラントホルダー、カウンターホルダー）は、2018年1月のラインアップに含まれません。現在でもファシリテートのドリルキーを治療に使用しているお客様と、シムプラント Pro 17 をシムプラント ライブラリー 5.1 と併用しているお客様の場合に限り：ファシリテートのドリルキーを治療に使用している場合に限り、上記のソフトウェア バージョンを使用する TX インプラント向けシムプラント セーフ ガイドを引き続きご注文いただけます。マイシムプラント、シムプラント Pro 18、およびシムプラント Library 5.2 は、TX インプラント向けシムプラント セーフ ガイドをサポートしていません。

請求および配送先住所

住所および連絡先情報を編集

請求先*

デンツプライシロナ 株式会社 デモ用
東京都品川区豊島1-5-21 東神ビル別館11号館
東京都品川区
1400012
JAPAN

配送先*

タロウ デンツ
ddsc202009@gmail.com
0120016152

東京都品川区豊島1-5-21 東神ビル別館11号館
東京都品川区
1400012
JAPAN

お支払い

購入済みアイテム

なし

発注番号

戻る

次へ

© Dentsply Sirona

会社 お問い合わせ 利用規約

f t in

配送先、配送先の住所を選択します。
作成されたデータのダウンロード方法は
P18を参照ください。

必要項目を入力したら
“次へ”をクリックします。

オーダー手順（4. 確認およびオーダー確定）

[ホーム](#)
[オーダー履歴](#)
[マイアカウント](#)
[ヘルプ](#)

1. 商品

2. 問い合わせ

3. 請求書

4. 確認およびオーダー確定

請求 発送

請求先

デンツプライ・シリコナ 日本有
東京品川区奥品川5-29 東研ビル8階H号室
東京品川区
1400032
JAPAN

配送先

デンツプライ・シリコナ
東京品川区奥品川5-29 東研ビル8階H号室
東京品川区
1400032
JAPAN
dent3100009@gmail.com
0120461652

オーダーのオーバービュー

オーダー アイテム	明細情報	数量	価格
Simplant Planning Service		1	¥19000
	小計(税別)		¥19000
	税		¥1900
	合計 (税込)		¥20900

オーダーのキャンセルを希望する場合、デンツプライ・シリコナは、発生した費用を顧客に請求することができます。消滅的な理由により要求された製品を提供できない場合、その旨を通知して確定したオーダーはキャンセルとなります。

責任の制限

● 本サービスは、シムプラント・カイトのデンツプライ・シリコナによるシムプラント・カイトのデザインまたは製造を管理します。

お客様がシムプラント・カイトのエンドユーザーである場合、計画された製造を行う上で法的に必要な免許を取得していることを宣言し、シムプラント・カイトのデザインおよび権利に関して、長期的な主権を負うことになります。シムプラント・カイトは、その顧客であるお客様への製造物の製造とサポートの一端に過ぎないものと見なされ、いかなる形態であれデンツプライ・シリコナによる医学的製造とは見なされません。お客様は同意されるものとします。本計画と本カイトを利用することにより、その計画に起因する法的責任はお客様の責任は全面的にお客様が負うものとし、お客様は消滅したまたは他のあらゆるファイルまたは権利と関係に限定して管理するものとします。そのファイルを利用することで、自動的にお客様はファイルの利用に関連するどのような責任もデンツプライ・シリコナに関与しないものとします。その他お客様は、[EULA](#)と[プライバシーポリシー](#)の各条項、および上記の規定に同意することになります。

お客様がエンドユーザーに代る第三者である場合、本利用規約によりお客様はデンツプライ・インプラント・カイトに対し、本オーダーを行う上でエンドユーザーから法的な代理権を許可されていること、エンドユーザーが法的に必要な免許を取得していること、ならびにお客様とエンドユーザーの間で、[EULA](#)と[プライバシーポリシー](#)の各条項、および上記の規定に同意することについて確認し、これを保証するものとします。

[戻る](#)

[オーダー確定](#)

©デンツプライ・シリコナ

[ホーム](#)
[お問い合わせ](#)
[お問い合わせ](#)

[f](#)
[t](#)
[in](#)

責任の制限にチェックを入れます。

オーダーを確定します。

次ページの注文完了、オーダー番号が表示されるまでは、オーダー確定となっておりませんので、ご注意ください。

データをアップロード中の場合、アップロードが
終わるまで、クリックできません。

- ※ “データ作成処理“はポータルサイト上では“Implant planning service”と表示されます。また納品書、請求書の品名も同様に“Implant planning service 1 (16)”と表示されますのであらかじめご了承ください。
- ※ 模型マッチングのみをご依頼いただいた場合（患者名の始めにMO:を付けている）でも、標準の処理費の金額が表示されますが、患者名により判断し、金額が訂正されて手続きとなります。
- ※ ポータルサイトヘデータをアップロードせず、DVDやUSBメモリ等メディアでデータをデンツプライシロナへ送付する場合、別途作業料金が発生いたします。
- ※ 模型マッチングは、3か月以内にシムプラントガイドをご注文をいただいた場合、費用は発生いたしません。ただし、3か月以内にシムプラントガイドをご注文いただけない場合、別途作業料金が発生いたします。
- ※ オーダー確定後に、キャンセルや変更が必要な場合は、翌営業日までにテクサービス（0120-016-152またはSimplant-JP-Guide@dentsplysirona.com）へご連絡ください。キャンセル手続き後に、キャンセル完了のメールが届きます。


 サポートが必要な際はこちら
 デンツプライシロナ DDSC-Tokyo
 → 0120-016-152で電話してライブサポートを開始する
 → メール Simplant-JP-Guide@dentsplysirona.com

注文プロセスが終了した画面



クリックして出荷書類PDFデータを表示・印刷。
プリンタが接続されていない場合は、PDFデータを保存し、プリンタ接続のPCで印刷してください。

石膏模型を送付する場合は、必ず「出荷書類」を印刷し、石膏模型と一緒にお送りください。

同封されていない場合は納期が遅れることがあります。あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。

Dentsply Sirona

出荷書類

シムプラント® プランニングサービス

オーダー番号: 33019803

日付: 05-02-2022

受領者

名前: Dentsply Implants
アドレス: デンツプライシロナ株式会社
デンツプライシロナ東京 DOHC-Tokyo
東京都品川区東品川1-5-21 東神ビル別館11号館
140-0012 JAPAN
電子メール アドレス: Simplant-JP-Guide@dentsplysirona.com
電話番号: 0120-016-152

発送者

名前: JPM0292
アドレス: Address 1
Tokyo
2000
JAPAN
電子メール アドレス:
電話番号:

(C)CTスキャンのDVD
補綴物(C)CTスキャン

商品種数 2

宣言文

これは、歯科インプラント埋入の承認されたカスタム外科ガイドの製造および/またはメーカーで使用する歯科素材です。使用した歯科材料は製造国に再度送る必要があります。さらに、これらの歯科材料は臨床での使用を目的としておらず、商品流通を目的としていません。

署名



データ作成処理が完了すると“オーダー0000000 (Simplant Planning)を出荷しました”というメールが、SIMPLANT-JP-Guide (SIMPLANT-JP-Guide@dentsplysirona.com) より届きますので、メール本文のリンクまたはガイドオーダー履歴から、症例ページを開いてください。

処理済みデータのダウンロード方法は18ページを参照ください。

6.データ作成処理済みデータのダウンロード方法

ポータルサイトにログインし“オーダー履歴”をクリックします。



ステータスによってオーダーの進行状況が確認できます。
ガイド、プランニングサービス（データ変換）、アトランティスの症例が混在で表示されます。

オーダーID	オーダー概要	製品タイプ	ステータス	操作
01100001	デンツプライラボ	フルアークインプラント	下書き	削除
01100002	デンツプライラボ	フルアークインプラント	下書き	削除
01100003	デンツプライラボ	フルアークインプラント	2022/04/15 オーダーの処理中	
01100004	デンツプライラボ	フルアークインプラント	2022/04/15 処理中	
01100005	デンツプライラボ	フルアークインプラント	2022/04/16 作業中	
01100006	デンツプライラボ	フルアークインプラント	2022/04/04 配達済み	
01100007	デンツプライラボ	フルアークインプラント	2022/06/01 キャンセル済み	
01100008	デンツプライラボ	フルアークインプラント	2022/05/31 請求済み	

下書き：オーダーが確定されていません
オーダーIDをクリックすると引き続きオーダーができます。

削除：クリックすると、下書き
オーダーを削除できます。

オーダーの処理中：オーダー
済みですが、デンツプライシロナ
では未受注の状態です。

処理中：オーダーが確定し、
処理進行中の状態です。

請求済み：処理が完了し、処理済みデータ
のダウンロードが可能となった状態です。

オーダーIDをクリックすると症例
の詳細が確認可能です。
(次頁)

注意の必要なステータス

【下書き】

オーダーは未確定で、完了していません。オーダーIDをクリックすると中断された画面から引き続きオーダーができます。不要の場合には”削除”をクリックしてオーダー履歴から削除してください。

【オーダーの処理中】

オーダー確定をクリックされておりますが、デンツプライシロナでは未受注の状態です。通常は数分後に “処理中” に変わります。“処理中” になったオーダーは、デンツプライシロナにて受注が確認された状態です。ネット環境、アクセス集中状況、サーバーメンテナンスなどによりアップロード、処理にかかる時間は変動します。2時間以上経過してもステータスが“処理中” に変わらない場合は、オーダーIDをお控えいただき、デンツプライシロナまでお問い合わせください。

オーダー一覧のオーダーIDをクリックすると以下内容が確認できます。

データ作成処理、模型マッチングをオーダーした場合

Test074 - 請求済み

オーダー番号: 32670900

備考: はありません。

デジタルデータ

デジタルデータは、オーダーが確定してから6ヶ月間保存されます。

エディターで開く シムプラント計画 ドリルレポート

使用いたしません

使用いたしません

オーダーのオーバービュー

オーダー アイテム 明細価格 数量 価格

Simplant Planning Service

デジタルデータ

デジタルデータは、オーダーが確定してから6ヶ月間保存されます。

エディターで開く シムプラント計画 ドリルレポート

シムプラント計画 Planning 32670900 Plant ↓

請求先

デンツプライシロナ DO&C社
東京都品川区東品川5-21 東神ビルディングB
401号
東京都品川区東品川5-21 東神ビルディングB
401号
東京都品川区
1400012
JAPAN

請求

オーダー番号: Test074
インプラントメーカー: DENTSPLY Implants
インプラントシステム: EV
クラウン固定: スクリュー固定式
ガイドタイプ: PilotLongStop

種: 顎
サポートタイプ: 両側ガイド 30mm
適用範囲:

インプラントの位置

補綴物の位置

ガイド

インプラント

履歴

処理済みのシムプラントデータをダウンロードできます。
クリックすると、下にダウンロードのボタンが表示されます


使用いたしません

使用いたしません

クリックすると、ダウンロードが開始されます。
Edge・Chromeの標準設定では、ダウンロード
フォルダへ保存されます。
ダウンロード先は、シムプラントの標準フォルダであ
る「Cドライブ>DentalData」を指定することを推
奨します。

7. シムプラントProからガイドをオーダーする場合

シムプラントでガイドの注文手順を完了し、「終了」をクリックします。プランはオンラインの注文ページに転送されます。アップロードが完了する前にシムプラントソフトウェアを閉じないでください

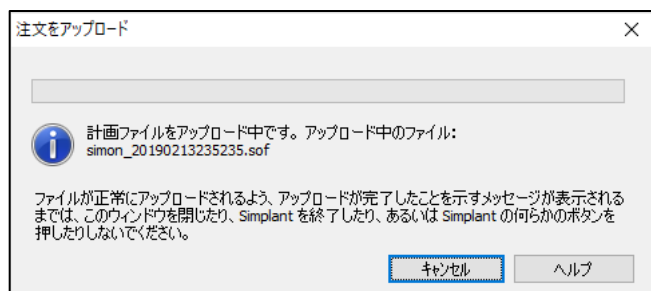

標準のブラウザが開き、オンラインショップでのシムプラントガイドの注文手続きが開始されます。



このガイドオーダーを追加するアカウント（請求先）でログインします。

オーダーを閉じる前に、シムプラントPro上でのデータのアップロードが完全に完了していることを確認してください。オーダーページの入力作業が終わっていない場合、後で“オーダー履歴＞下書き”から”作業を再開することができます。

まだアカウントでログインしていない場合、またはアップロードが完了するまで待たなかった場合は、オーダーはオンラインサーバー上に受取れていません。シムプラントで注文をやり直す必要があります。

オーダー画面上の  クリックすると以下の画面が現れます。



オーダー手順（1. 処方）

The screenshot shows the Dentsply Sirona ordering system interface. The top navigation bar includes links for Home, Order History, My Account, and Help. The main content area is divided into sections: Order Number, Treatment, Surgery, and Scan.

Order Number Section: A text input field for the order number is shown. A callout box explains: "オーダー名を記載します。（カルテ番号、患者名など）" (Enter the order name. (Medical record number, patient name, etc.)) and "入力内容は、オーダー履歴・納品書に表示・印字されます" (The input content will be displayed and printed on the order history and invoice).

Treatment Section: A dropdown menu for "インプラントの固定式" (Implant fixation type) is shown. A callout box explains: "「スクリュー固定式“または”セメント固定式”を、あくまでも予定として選択してください。術時に変更になっても問題ありません。" (Select "Screw fixation type" or "Cement fixation type" as the planned type. It is fine if it changes at the time of surgery).

Implant Position Section: A diagram of a dental arch shows the positions for the implant. A callout box explains: "「インプラントの埋入位置”を選択してください。" (Select the implant placement position).

Bridge Position Section: A diagram of a dental arch shows the positions for the bridge. A callout box explains: "「補綴物の位置”を選択してください。術時に変更になっても問題ありません。" (Select the bridge position. It is fine if it changes at the time of surgery).

Surgery Section: Two diagrams show the surgical procedures: "インプラント埋入" (Implant placement) and "インプラント埋入後" (After implant placement). A callout box explains: "各種ファイルがシムプラントですでに追加されている場合、「プランニングファイルに含まれています」と表示されます" (If various files are already added to the simulant, it will be displayed as "Included in the planning file").

Scan Section: Two options are shown: "CTまたはコーンビームスキャンデータ" (CT or Cone Beam Scan Data) and "石膏模型または口腔内スキャンデータ" (Gypsum model or Intraoral Scan Data). A callout box explains: "必要なファイルがまだ追加されていない場合は、ここでアップロードできます" (If the required files are not yet added, you can upload them here).

Delivery Method Section: A callout box explains: "セレクトによる口腔内スキャンデータの送付方法に関してはP28を参照ください" (For the delivery method of intraoral scan data selected by Select, please refer to P28).

Shipping Method Section: A callout box explains: "石膏模型を送付する場合“このアイテムを宅急便で送付します”または“送付済みです”にチェックします。" (When shipping a gypsum model, check "We will ship this item via EMS" or "Already shipped").

Tracking Information Section: A callout box explains: "「デンツプライシロナの参照番号または配達業者の追跡番号”に送付した際の宅急便の伝票番号を記入してください。" (Enter the EMS tracking number at the time of shipment in the "Dentsply Sirona reference number or carrier tracking number" field).

Next Step: A callout box explains: "必要項目を入力したら“次へ”をクリックします" (After entering the required items, click "Next").

オーダー手順 (2. 買い物かご)

製品をカートに追加する

日本未対応

Simplant Core File : 骨、粘膜、インプラント埋入位置データをSTLで提供。CADに取り込むことで術前にテンポラリーブリッジの作製が可能。

シムプラントガイドの複製 (Duplicate of Simplant guide) : 同一ガイドを複数作製

骨モデル (Jaw model) : CT画像からの光造形による骨模型。インフォームドコンセントや術前の確認、練習等に使用。

“カートに追加”をクリックすることで、オプション項目を追加できます。

必要項目を入力したら“次へ”をクリックします。

オーダー手順 (3. 請求、発送)

日本語 ようこそ、デンツ シロナ にログイン

Dentsply Sirona ホーム オーダー マイアカウント ヘルプ

1 見積 2 買い増し 3 請求 発送 4 確認およびオーダー確定

Please note that our services can be temporarily down between August 14-16 while we upgrade our servers. If you experience any problems please try again a bit later or contact customer support.

Dear Customer, At Dentsply Sirona we are here to support you whenever you need us. Contact customer service or your sales representative if you have questions or concerns. IMPORTANT notices:

- Due to COVID-19 (coronavirus), we are until further notice optimizing our turnaround time for FastTrack guide design and for Implant planning proposals from 48 hours to 72 hours (3 working days). Please consider this when planning your surgery date.
- IMPORTANT notice for Straumann BLX users Please read before ordering.
- ファシリテート ガイデッド サージェリー キットとドリル以外 (FA フォルダードライバー、ドリルキー、インプラントホルダー、カウンターホルダー) は、2018年1月のラインアップに含まれません。現在でもファシリテートのドリルキーを治療に使用しているお客様と、シムプラント Pro 17 をシムプラント ライブラリー 5.1 と併用しているお客様の場合に限り、ファシリテートのドリルキーを治療に使用している場合に限り、上記のソフトウェアバージョンを使用する TX インプラント向けシムプラント セーフ ガイドを引き続きご注文いただけます。マイシムプラント、シムプラント Pro 18、およびシムプラント Library 5.2 は、TX インプラント向けシムプラント セーフ ガイドをサポートしていません。

請求および配送先住所

住所および連絡先情報を編集

請求先*	配送先*
デンツプライシロナ 株式会社 東京都品川区豊島1-5-21 東神ビル別館11号館 東京都品川区 1400012 JAPAN	タロウ デンツ ddsc202008@gmail.com 0120016152
	東京都品川区豊島1-5-21 東神ビル別館11号館 東京都品川区 1400012 JAPAN

お支払い

購入済みアイテム

なし

発注番号

← 戻る 次へ →

© Dentsply Sirona 会社 お問い合わせ 利権情報 f t in

担当者、納品先を選択します。

ガイドクーポンを使用する場合はこちらから
選択してください。

必要項目を入力したら“次
へ”をクリックします。

オーダー手順（4. 確認およびオーダー確定）

日本語 | English | 日本語 | English | Deutsch

[ホーム](#) [オーダー履歴](#) [マイアカウント](#) [ヘルプ](#)

[1 概説](#) [2 製品情報](#) [3 顧客対応](#) [4 確認およびオーダー確定](#)

請求 発送

当院
デンツプライシンロナ株式会社
東京都港区南青山1-6-10
厚生ビル5F
〒106-0041
JAPAN

配達先
Intasany Suzuki
Rayer Atsushi
Minato-ku
106-0041
JAPAN
info@suzuki-dentalsupply.com
03200XXXX

発送予定日
お急ぎの理由、シムプラントタイプは国産品で製造され、発送されます。

オーダーのオーバービュー

オーダー アイテム

商品名	数量	価格
Simplant Planning Service	1	\$79000
Simplant SAFE Guide - ASTRA TECH Implant System EV	1	\$49000
合計(税別)		\$68000
税		\$0

オーダーにキャンセルを希望する場合、デンツプライシンロナは、発生した費用を顧客に請求することができます。詳細は理由により要求される数額を提供できない場合があります。その数を最初に確立したオーダーはキャンセルとなります。

責任の制限

本保証は、シムプラントシステム、デンツプライシンロナによるシムプラント タイプの予約インまたは製造を意味します。

お客様がシムプラントガイドのインストールを行う場合、計画された処置を行う上で法的に必要な免許を取得していることを宣言し、シムプラント ガイドの使用は、お客様の同意と承認の下で行われるものと見なされます。いかなる形態でも、シムプラント システムによる患者の傷害や損害は、お客様の責任です。お客様の同意と承認は、お客様の同意と承認の下で行われるものと見なされます。本保証と本ガイドを利用することにより、その両方に従うことは法的に必要であり、お客様の責任は全面的に、お客様が負つたことになります。お客様の同意と承認は、お客様の同意と承認の下で行われるものと見なされます。その他のファイルを利用して、自動的にお客様のファイルの利用に同意する必要があるため、そのような責任はデンツプライシンロナに属するものではありません。さらにお客様は、[使用上の注意](#)と[安全に関する説明書](#)を読み、および上記の規定を確認することになります。

お客様がエンド ユーザーに与える責任を負合すると、本保証は、お客様がデンツプライシンロナ NPI に対し、本オーダーを行う上でエンド ユーザーから法的な代理権を得許可されていること、エンド ユーザーが法的に必要な免許を取得していること、ならびに、お客様がエンド ユーザーの間で、[使用上の注意](#)と[安全に関する説明書](#)を読み、および上記の規定を確認したことについて確認し、これを保証するものとします。

[戻る](#)

[オーダーの確認](#)

[◆デンツプライシンロナ](#)

[会社](#) [お問い合わせ](#) [利用規約](#)

[f](#) [t](#) [in](#) [jp](#)

責任の制限にチェックを入れます。

データのアップロードが終了したら、クリックしてオーダーを確定します。

注文プロセスが終了した画面

ご注文ありがとうございます。

オーダー番号: 13019648

お問い合わせ

クリックして送付状PDFデータを表示・印刷します。

事前に模型マッチングをせず、ガイドオーダー後に、石膏模型を送付する場合は上記リンクをクリックし、印刷した出荷書類を模型に同封してお送りください。

同封されていない場合には納期が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。

8.ガイドオーダーの確認方法

シムプラントガイドのオーダーに関する各種情報を確認できます。

ポータルサイトにログインし“オーダー履歴”をクリックします。



ステータスによってオーダーの進行状況が確認できます。

下書き：オーダーが確定されていません。オーダーIDをクリックすると引き続きオーダーができます。

削除：クリックするとこのオーダーを削除できます。

オーダーの処理中：オーダー済みですが、デンツプライシロナでは未受注の状態です。

処理中：オーダーが確定し、設計中の状態です。

作製中：オーダーが確定し、製造中の状態です。デザイン後のガイドデータ、ガイドレポートがダウンロード可能です。

配送済み：ガイド：出荷済みです。

オーダーIDをクリックすると症例の詳細が確認可能です。
(次頁)

注意の必要なステータス


【下書き】

オーダーは未確定で、完了していません。オーダーIDをクリックすると中断された画面から引き続きオーダーができます。不要の場合には”削除”をクリックしてオーダー履歴から削除してください。

【オーダーの処理中】

オーダー確定をクリックされておりますが、デンツプライシロナでは未受注の状態です。通常は数分後に “処理中” に変わります。“処理中” になったオーダーは、デンツプライシロナにて受注が確認された状態です。ネット環境、アクセス集中状況、サーバーメンテナンスなどによりアップロード、処理にかかる時間は変動します。2時間以上経過してもステータスが“処理中” に変わらない場合は、オーダーIDをお控えいただき、デンツプライシロナまでお問い合わせください。

ガイドをオーダーした場合

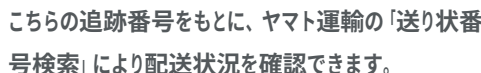

外科術式（ガイドレポート）がダウンロードできます。

外科術式（ガイドレポート）がダウンロードできます。

ガイドデザイン後のデータをダウンロードし、実際のガイドデザインを確認できます。

オーダー時のオリジナルファイルがダウンロードできます。

オーダー時の入力を確認できます。

Simplant Core Fileをオーダーした場合




Simplant Core Fileをオーダーした場合、ここからダウンロードできます。

9. セレックのスクランデータを送る方法

①CCC (コネクト ケース センター) ※旧シロナコネクトと **Simplant** とのリンク接続

ccc (<https://www.dentsplysirona.com/jajp/explore/digitalimpression/connect.html>) ヘアクセスし、
“CCCへのログイン”をクリックしてログインします。 ※ここでは「CCCアカウント」を使用します

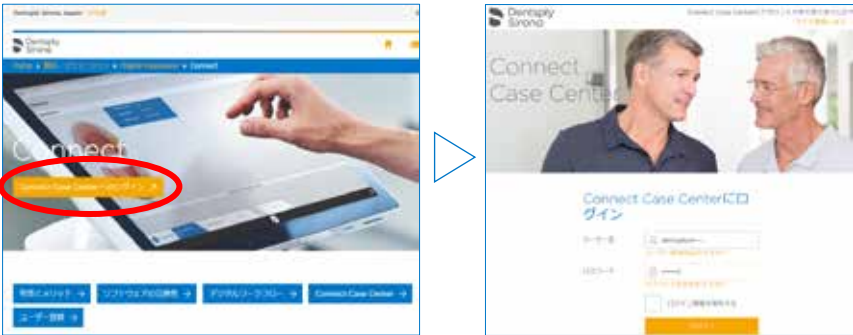

“パートナー_優先受信者”をクリックして“受取人の検索_受取人の名前”欄に“Dentsply Sirona Implants”と入力検索して登録します。



“パートナー_リンクされたポータル”をクリック、
“リンクされたポータル”の画面の“Dentsply Sirona Implants”の“リンクを接続”をクリックしてログインします。
※ここでは「Simplantアカウント（ユーザーID、パスワード）」を使用します。




“リンクされたポータル”画面の“Dentsply Sirona Implants”に“リンク解除”と表示されるとリンク接続完了です。




②症例登録

シロナコネクトSWを開き、必要な患者情報を入力します。修復物タイプは“クラウン”を選択します。

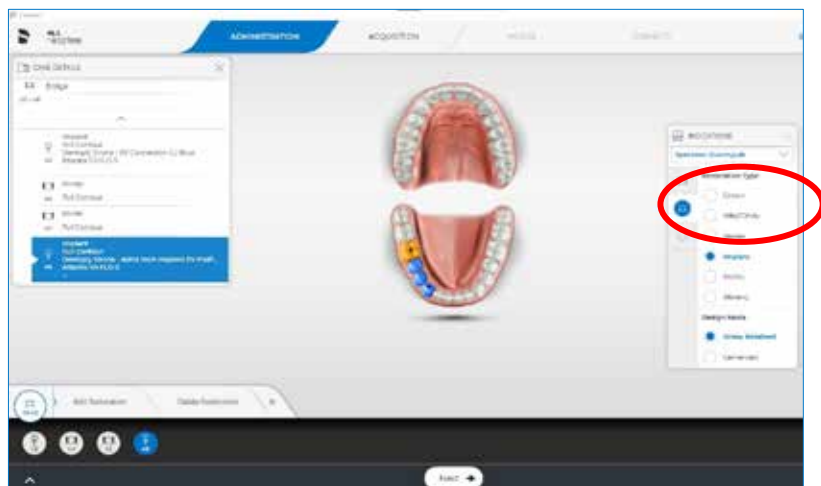


③スキャン

該当顎のみをスキャンします。（対合、バイトは必須ではありません）

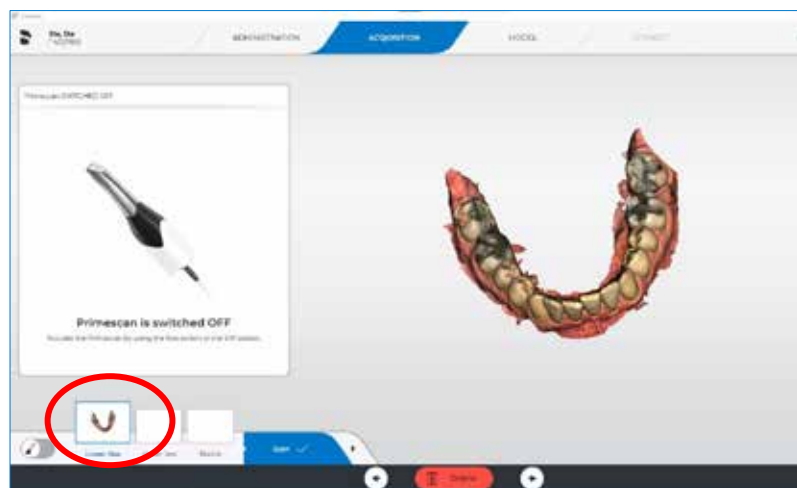

④CCCからのデータ転送


右上“コネクト”タブからCCCへログインします。 ※ここでは「CCCアカウント」を使用します

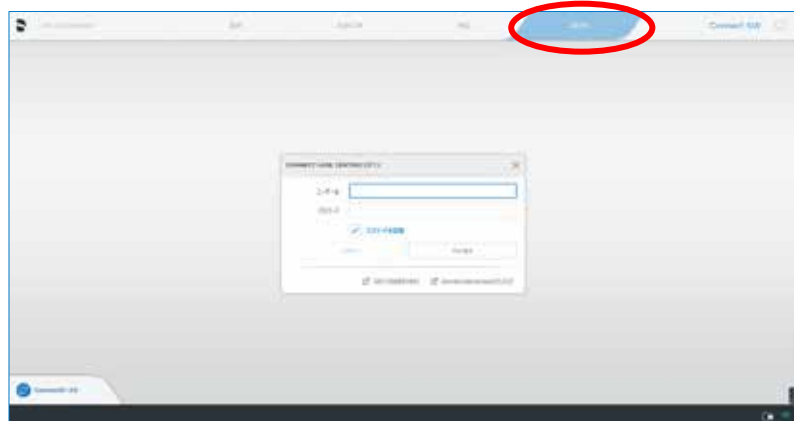

⑤CCCから口腔内スキャンデータの送信

コネクトSWからCCCへスキャンデータをアップロードします。

- “オーダーデータ入力”タブをクリック ▷ 必須項目を入力
- ▷ ”受領者_ Dentsply Sirona Implants”を選択
- ▷ “Order details _ Simplant solution”を選択
- ▷ “カレンダー_(希望日時)”を任意で選択
- ▷ “カートに追加”タブをクリック ▷ “カートを送信”をクリック ▷ “送信”

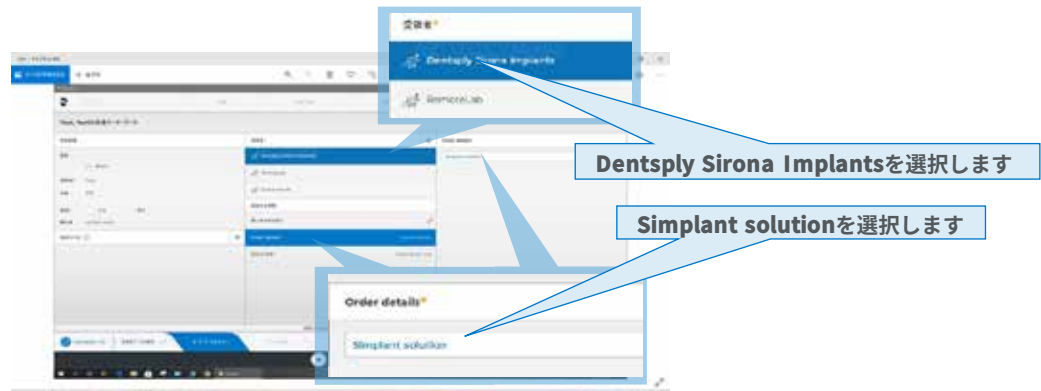

アップロードが完了すると通知メールが届きます。



⑥ポータルサイトからオーダー

“コネクトケースセンターからスキャンを選択”を選択します。



該当するデータを選択してアップロードします。



