



Prime&Bond® universal Universal Adhesive


プライム&ボンド ユニバーサル

湿潤環境下にも強いボンディング材

- ・ 歯面の水分をコントロールし、接着阻害要因を除去
- ・ 薄く均一なボンド層を実現し、テクニカルエラーを軽減

Active-Guard Technology™

NEW アクティブガードテクノロジー

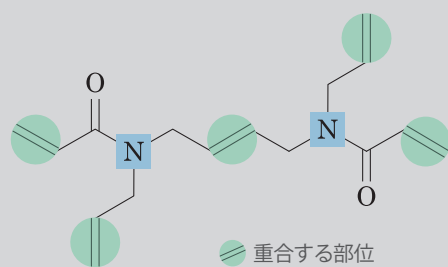

アクティブガードモノマーの構造式

従来からある疎水性モノマーと親水性モノマーを混合した一液性の接着材から、1つの分子内に親水性と疎水性をバランスよくもつベースモノマーを新たに開発しました。接着阻害因子となりうる水分との接触や溶媒の揮発といった外的要因にも強く、安定した高い接着性を実現します。また親水性の高い HEMA を含まないため、長期的に接着耐久性が期待できます。




HEMA-free
BPA-free

湿潤環境の歯面でも安定した接着性


アクティブガードモノマーは歯面上に残存した水分をコントロールし、均質層となって作用します。被着面上で分離せずに塗布できるため、ドライスポット*の形成もなく安定した接着を保ち、深い窩洞や乾燥の難しい症例においてもご使用いただけます。 *ドライスポット：歯面に残った水分に影響を受けてボンディング材が分離し、接着層をうまく形成できない部位

異なる湿潤環境下でのせん断接着試験

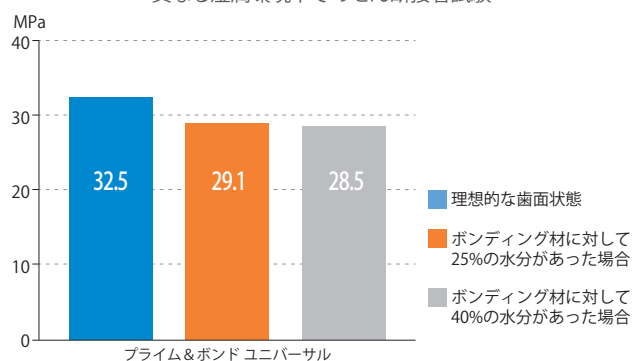


プライム&ボンド ユニバーサルは過度に湿潤した象牙質でも安定した接着性能を示した。(データ測定：デンツプライディトレイ社)

水と接触した際のイメージ (従来品との比較)

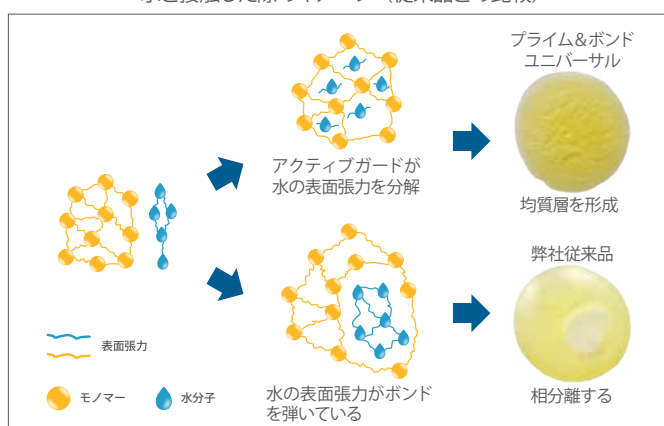

窩洞に自然に広がり薄い皮膜を形成


プライム&ボンド ユニバーサルは塗布すると同時に窩洞に自然に広がってゆき、薄く均一な皮膜を形成します。塗りムラや液だまりなどの接着操作時のテクニカルエラーが起きにくく、辺縁封鎖に優れており、ギャップの形成や術後痛などのリスクも軽減します。

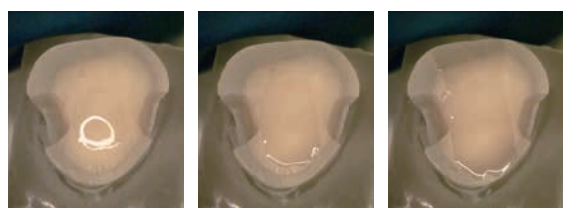

ボンディング材を塗布後、数秒で薄く自然に広がる様子



弊社従来品

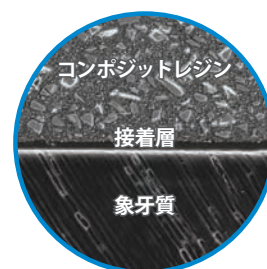

5~10μm以下の薄い皮膜を形成


効率的な架橋結合がもたらす高い接着性

歯質やジルコニアなどの金属にも高い接着性能を発揮する MDP** と PENTA の配合により、高く効率的な接着性能を発揮。また、HEMA を含まないため、長期的な接着耐久性が期待できます。


** 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

知覚過敏抑制

プライム&ボンド ユニバーサルを用いた処置により、ボンディング材が象牙細管に浸透しタグを形成。象牙細管を封鎖し知覚過敏を抑制します。

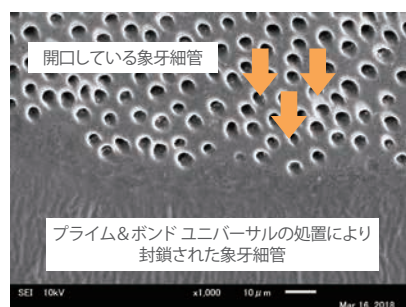

象牙細管の封鎖状況（表面図）

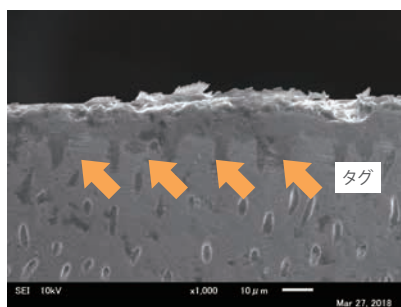

象牙細管の封鎖状況（断面図）

データ測定：弊社

滴下後最長30分使用可能

専用のクリックスディッシュの遮光下では最長 30 分間使用が可能です。複数歯にわたる処置の際にも 1 滴を無駄なく使用可能です。



操作ステップ



1. 歯頸部のくさび状欠損症例



2. 旧修復物の除去



3. 本品塗布



4. エアブロー



5. スマートライト Focus を用いて照射



6. セラメックスの充填



7. PoGo を用いて研磨



8. 修復処置終了

片手でキャップを開閉できるフリップトップキャップを採用

プライム&ボンド ユニバーサル

商品番号	商品名	標準価格
60667350	プライム&ボンド ユニバーサル 4.0ml	12,370 円
60667350ST	プライム&ボンド ユニバーサル スターターキット	14,510 円
60667350WP	プライム & ボンド ユニバーサル ダブルパック	22,270 円
60667346	クリックスディッシュ 3 個入り	2,710 円



セラメックス スフィアテックワン 各 3.0g 入

商品番号	商品名	標準価格
60701621	セラメックス スフィアテック ワン A1 (VITA A1; B1; C1)	4,290 円
60701622	セラメックス スフィアテック ワン A2 (VITA A2; B2; D2)	4,290 円
60701623	セラメックス スフィアテック ワン A3 (VITA A3; C2; D3; D4)	4,290 円
60701625	セラメックス スフィアテック ワン A3.5 (VITA A3.5; B3; B43; C3)	4,290 円
60701624	セラメックス スフィアテック ワン A4 (VITA A4; C4)	4,290 円
60701564	セラメックス スフィアテック ワンシェードガイド	4,290 円

関連製品

商品番号	商品名	標準価格
662010Y	POGO (ポリッシュ & ゴー) ディスク 30 本	21,740 円
662022Y	POGO (ポリッシュ & ゴー) ポイント 30 本	21,740 円
662023Y	POGO (ポリッシュ & ゴー) カップ 30 本	21,740 円
662025Y	POGO (ポリッシュ & ゴー) アソート 30 本	21,740 円
60603002	SDR	5,220 円
60603003	SDR エコパック	13,800 円
644400	スマートライト Pro イントロキット	244,940 円



販売名	一般的名称	届出・認証番号	クラス分類
セラメックス ST One	歯科充填用コンポジットレジン	229AGBZX00070000	II (管理)
プライム&ボンド ユニバーサル	歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、 歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材)	230AGBZX00043000	II (管理)
POGO (ポリッシュ & ゴー)	歯科用ゴム製研磨材	13B1X10236Y00420	I (一般)
エスディーアール	歯科充填用コンポジットレジン	223AFBZX00008000	II (管理)
スマートライト Pro	歯科用根管洗浄器	305AKBZX00031000	II (管理)
スマートライト FOCUS	歯科重合用光照射器	13B1X10236Y03870	I (一般・特管)

*表示価格は、2023 年 7 月現在の標準価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX:0120-120-689

www.dentsplysirona.com