



Better  
outcomes  
start here

## Palodent® Plus

Sectional Matrix System


---

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 Dentsply  
Sirona

# II級窩洞をI級単純窩洞へ導く パロデント プラスシステム


- 1 優れたばね強度と記憶力を持つ  
Ni-Tiリング
- 2 ガラス繊維強化プラスチック製のタインは、  
クサビに対応したV字型形状
- 3 装着・取り外しを簡便にする  
ピンホール
- 4 挿入しやすいトップタブとマトリックスの  
取り外しに便利なサイドタブを装備
- 5 歯頸部のギャップを防ぐ  
マトリックス形状
- 6 歯牙をしっかりと包み込む  
マトリックス形状
- 7 辺縁部隆線の形態を有する  
マトリックス形状

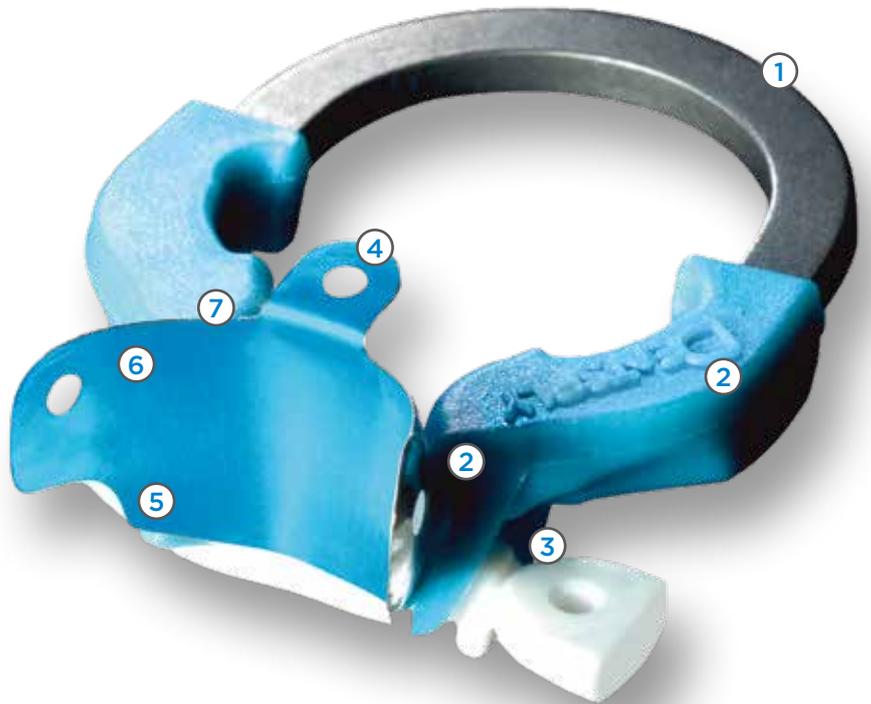

## 簡便な装着方法 (4 step)



1  
ピンツィーザーを使い、ウェッジまたはウェッジガードを舌側または頬側からしっかりと装着し、プレパレーションを行います。

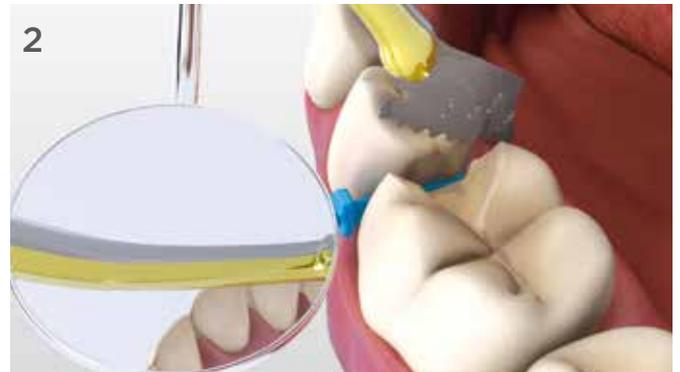

2  
プレパレーション後、ウェッジガードを使用する場合は、ミラーや歯科用器具でウェッジを支え、ピンツィーザーを使用してシールドを剥がします。



3  
ピンツィーザーを用いてマトリックスをセットします。この際、ウェッジによりマトリックスが装着しづらい場合は、一度ウェッジを取り外し、マトリックス、ウェッジの順で装着します。




4  
フォーセプスにてリングを把持し、ウェッジにまたがるようにリングをセットします。

パロデントプラスは、ニッケルチタン製のリング、解剖学的に設計されたマトリックス、適応性のあるウェッジを備えたセクショナルマトリックスシステムで、タイトなコンタクトと天然歯の解剖学を再現した修復物を提供することができます。パロデントプラスは、広い窩洞や欠損した歯牙に直面した場合でも、より良い結果をもたらします。マトリックスとウェッジのデザインにより、修復物の仕上げを最小限に抑えることができます。

タイトなコンタクトを実現


解剖学的形態にフィットするカーブ付与型マトリックス

より適合性を得るためのウェッジ形態

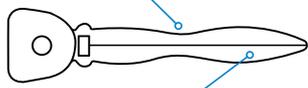

底面が空洞のため、2つ目のウェッジ挿入により最適な密閉が可能

ニッケルチタンによる適切な歯間分離

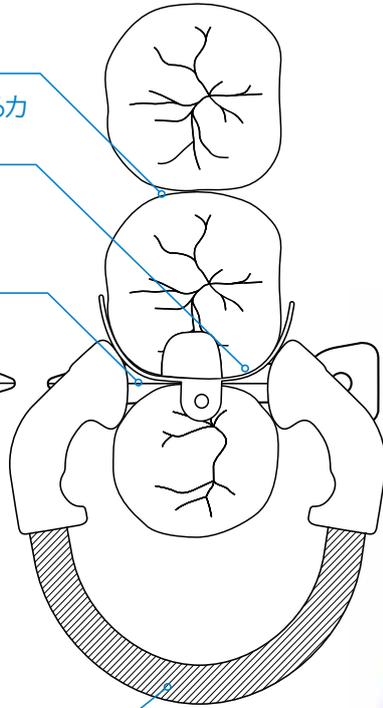

## Class II Restorations



### EZコートマトリックス

樹脂コーティング処理により、充填後の除去が容易



### ウェッジガード

隣接歯を保護し、窩洞形成を容易にします

※ガードはプレパレーション後に取り外し可能で、ワンステップでウェッジに変身します



659670 パロデントプラス イントロキット 71,440円

ユニバーサルリング (1個) / ナローリング (1個) / EZコートマトリックス3.5mm (25個) / EZコートマトリックス4.5mm (25個) / EZコートマトリックス5.5mm (25個) / EZコートマトリックス6.5mm (25個) / ウェッジS (25個) / ウェッジM (25個) / ウェッジL (25個) / ウェッジガードS (10個) / ウェッジガードM (10個) / ウェッジガードL (10個) / フォーセプス (1本) / ピンツイーザー (1本)



659760 ユニバーサルリング (2個) 25,430円  
659770 ナローリング (2個) 25,430円



659710 マトリックス3.5 (50個) 6,490円  
659720 マトリックス4.5 (50個) 6,490円  
659730 マトリックス5.5 (50個) 6,490円  
659750 マトリックス6.5 (50個) 6,490円  
659860 マトリックス7.5 (50個) 6,490円



659610 EZコートマトリックス3.5 (50個) 9,280円  
659620 EZコートマトリックス4.5 (50個) 9,280円  
659630 EZコートマトリックス5.5 (50個) 9,280円  
659650 EZコートマトリックス6.5 (50個) 9,280円  
659660 EZコートマトリックス7.5 (50個) 9,280円



659780 ウェッジS (100個) 7,140円  
659790 ウェッジM (100個) 7,140円  
659800 ウェッジL (100個) 7,140円



659830 ウェッジガードS (50個) 7,450円  
659840 ウェッジガードM (50個) 7,450円  
659850 ウェッジガードL (50個) 7,450円



659810 フォーセプス (1本) 9,080円  
659820 ピンツイーザー (1本) 9,080円

\*表示価格は、2023年7月現在のメーカー標準価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部は予告なしに変更することがあります。  
\*お客様の読みやすさ向上のため、本文中に®またはTMを使用していません。ただし、デンツプライシロナが商標権を放棄することは一切ありません。すべての商標と会社名は、それぞれ各社の所有物です。  
本カタログ・マニュアル中に記載されている®およびTMは、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。

販売名: パロデント プラス 一般的名称: 歯科用充填・修復材補助器具 届出番号: 13B1X10236Y04480 クラス分類: クラスI (一般)

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX: 0120-120-689

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)