

품목허가번호	수허01-807호
품목명	치과용알지네이트인상재
모델명	Alginate Impression Materials Jeltrate
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co. Ltd (중국)
사용목적	치아 또는 치은의 인상
중량 또는 포장단위	Package
사용방법 가.사용 전 준비사항 환자의 구강소제 나. 사용방법 (1) 분말시여: 뭉침 방지를 위해 봉지를 흔들어 준 다음 적량을 채취한다. (2) 혼합: 분말과 물을 3:1 비율로 혼합한다. (3) 장착: 혼합물을 트레이에 투여 후 인상채득 부위에 트레이를 장착한다. 2~2분 30초후 경화되면 구강 내에서 트레이를 제거한다. (4) 소제: 구강에서 제거된 트레이를 흐르는 물에 깨끗이 소제한다. (5) 주의: 추가 인상재 투입이 필요하면, 축축한 타월로 감싸둔다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 (1) 상온 25°C이하에서보관한다.	
사용시주의사항 (1) 치과용으로 사용할 것 (2) 분말을 흡입하지 말 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	상온 25°C이하에서보관한다.
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
본제품은의료기기임	