

품목허가번호	수허 03-556 호
품목명	심미수복용복합레진
모델명	Core Max II
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치아수복
중량 또는 포장단위	EA
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 1. 차고 어두운 곳에 보관 중이던 제품을 실온으로 꺼내온다. 2. 사용하기 전에 제품의 유효기간, 제품의 이상상태를 확인한다. 3. 치아표면을 간단히 세척하고 물기를 없앤다. 나. 사용방법 1. 치근 방향대로 Screw Post 등을 삽입하여 근관치료를 한다. 2. 파우더와 리퀴드로 와동을 채울 때 액 3 방울에 대하여 파우더 1 스푼을 반죽하여 혼합한다. Direct Cementation 시에는 액 2 방울에 대하여 파우더 1 스푼을 반죽하여 혼합한다. 3. 와동을 혼합된 반죽으로 채운다. 4. 혼합 반죽을 Polycarbonate crown 에 채우고 Post 위로 압력을 가한다. 5. 치아 주변에 잔여물 등이 남은 경우 정리해 준다. 다. 사용 후 보관방법 사용 후 파우더와 액의 뚜껑을 재빨리 닫고 서늘하고 그늘진 곳에 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 1. 파우더를 세 부분으로 나눈 후 용액으로 파우더를 적셔 혼합한다. 2. 냉장고에서 보관한다. 3. Bonding agent 는 타기 쉬우므로 불에 유의한다. 4. 세팅이 지연되거나 잘못될 수 있으므로 유지놀 성분을 포함하고 있는 재료와의 접촉을 피하도록 한다. 5. 충분한 세척없이 원료를 포함하고 있는 유지놀에 기구를 접촉시키지 말 것 6. 어린이와 동물들이 닿지 않도록 보관한다. 7. 눈에 들어가면 다량의 물로 눈을 행구고 의사에게 상담한다. 8. 알레르기를 유발할 수 있으므로 주의하고 알레르기 발생 시 의사와 상담한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	차고 어두운 곳에 보관한다.
유효기간	제조일로부터 2 년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조자 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임