

품목허가번호	수허 06-72호
품목명	의치상수리용레진
모델명	Rapid Repair Denture Materials
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co. Ltd (중국)
사용목적	의치상을 만드는 재료
중량 또는 포장단위	파우더(Powder): 500g, 액(Liquid): 250ml
사용방법 1) 사용 전 준비사항 ① 의치수리 (1) 조각난 의치의 파트를 조립하고 그에 맞는 모형을 만든다. (2) 파절된 표면을 1.5mm "V"자 모양으로 얇게 경사지게 공간을 만들어준다. (3) 의치의 접합면에는 바셀린을 얇게 도포하여 수리지역의 오염을 막아준다. (4) 파절된 의치를 모델 위에 놓고 주변을 Sticky Wax로 고정시킨다. 2) 사용방법 ① 테크닉 1 (1) 의치의 파절된 가장자리에 액으로 축축히 적신다. (2) 파우더를 젖은 부위에 적용한다. (3) 수리할 부분이 필요로 하는 두께를 초과할 때까지 액을 뿌리고 파우더를 적용하는 방법을 반복한다. ② 테크닉 2 (1) 파우더와 액을 흘러내리는 정도의 반죽이 될 때까지 혼합한다. (2) 혼합물을 흘러내리는 정도의 점도일 때 적용한다. (3) 흘러내리는 것을 피하기 위해 파우더를 뿌린다. (4) 대기에서 또는 압력용기에 넣어서 경화시킨다.(중합시간 15분) 주의) Rapid Repair는 섭씨 21~23도에서 사용되어야 하고, 가능하면 이 온도 범위의 용기의 사용을 권장한다. 모든 아크릴 재료는 저온에서는 작업시간과 경화시간이 길어지고 고온에서는 단축된다. ③ 중합 (1) 대기에서의 중합 기포가 없는 수리를 위해서 방해 받지 않는 대기에서 한다. 경화 시간은 섭씨 23도에서 15분 정도 소요된다. (2) 압력용기에서 중합 섭씨 40도의 물에 수리된 의치와 모델을 담근다. 50lb/in ² (3.5kg/cm ²)의 압력으로 10분동안 유지하거나 압력용기 제조사의 지시에 따른다. ④ 마무리	

완전히 경화된 후 모델로부터 수리된 의치를 제거한다. 일방적인 방법으로 다듬는다.	
사용 시 주의사항	
1) 피부 접촉에 주의하고, 지각과민 발생 시 사용을 중단할 것. 2) 증기 흡입이나 섭취를 금할 것 3) 작업장의 통풍상태를 양호하게 할 것 4) 사용 후 손을 비누 등으로 깨끗이 씻을 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온(섭씨 16~26°C)에서 직사광선을 피하고 용기를 잘 봉합하여 보관한다.
유효기간	Powder 5년, Liquid 3년
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	