

품목허가번호	수허 07-1043호
품목명	의료용치석제거기(전동식)
모델명	Cavitron Plus Ultrasonic Scaling Unit
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Professional (미국)
사용목적	치아의 치석 등을 제거할 목적으로 사용하는 기구
중량 또는 포장단위	1대

#### 사용방법

##### 1) 사용 전 준비사항

- ① 포장을 개봉하여 누락되거나 손상된 구성품이 있는지 확인한다.
- ② 제품의 전원 스위치를 OFF(0) 상태로 하고, 전원코드를 연결한다.
- ③ 급수장치에 연결된 물 공급선을 제품의 water inlet 커넥터에 연결한다.
- ④ 핸드피스를 Cable Assembly에 연결한다. 연결이 잘 되지 않을 경우에는 핸드피스를 부드럽게 돌려 접촉부를 맞춘 후, 완전히 삽입한다.
- ⑤ 급수장치의 차단밸브를 개방한다.
- ⑥ 전원스위치를 ON(I) 하고 ON/OFF 표시등에 불이 들어오는지 확인한다.
- ⑦ 조작레버를 최소 설정치로 맞춘다. (not rinse)
- ⑧ 핸드피스 케이블의 lavage control을 최대로 설정한다.
- ⑨ 핸드피스(인서트를 부착하지 않은)를 우상향으로 잡고 PURGE 버튼을 눌러 세척기능을 활성화시킨다.
- ⑩ 세척 사이클이 완료되면 멸균 인서트를 핸드피스에 부착한다.
- ⑪ 무선 풋 스위치를 10 feet 내에 위치시키고 전원을 켜 후, 진단 디스플레이의 PURGE 버튼을 누르면 동기화 모드로 전환되며, 이 때 풋 스위치의 배터리 장착부의 적색 버튼을 눌러 풋 스위치를 동기화한다.

##### 2) 사용방법

- ① 조작레버를 시계방향으로 돌려 적절한 초음파 레벨을 설정한다.
- ② 핸드피스를 잡고 풋 스위치를 눌러 시스템을 활성화 시킨다.
- ③ 인서트 팁 끝 단에 액체가 분사되는지 확인한다.
- ④ 핸드피스 연결 케이블의 Lavage control을 조절하여 설정된 초음파 레벨에 적합한 유량을 설정한다.
- ⑤ 풋 스위치를 완전히 누른 상태("Boost mode")에서는 액체가 적절히 적용되도록 시스템의 lavage를 조절할 필요가 있다.
- ⑥ 인서트 효율 표시등으로 인서트의 마모여부를 주기적으로 체크한다.
- ⑦ 시술 중에는 타액 배출기(saliva ejector) 또는 대용량 배출기(High Volume Evacuator - HVE)의 사용이 권장된다.

##### 3) 조작방법

① 풋 스위치

-풋 스위치 밟는 정도에 따라 두 가지 기능을 수행한다.

-1st Position(반쯤 누른 상태) - 초음파 에너지 및 인서트 팁의 lavage를 활성화


-2nd Position(완전히 누른 상태) - Boost 모드(초음파 레벨의 급증) 활성화



② 핸드피스

-lavage control을 시계방향으로 돌리면 인서트 팁의 유량 증가, 높은 유량은 세척 온도를 차갑게 한다.

-lavage control을 시계 반대방향으로 돌리면 인서트 팁의 유량 감소, 낮은 유량은 세척 온도를 따뜻하게 한다.

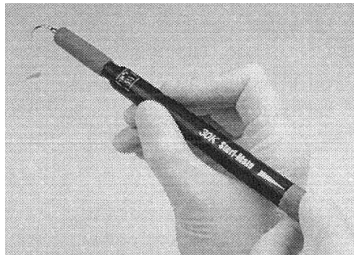

4) 사용 후 보관방법

(1) 사용한 인서트를 분리하고 물기를 제거한 후 가압증기 멸균기(Steam Autoclave)에서 134°C/216kPa에서 10분간 소독한 뒤 20~30분간 건조시킨다.

(2) 핸드피스를 우상향으로 잡고 Purge 기능을 동작시켜 세척한다.

(3) Purge 사이클이 완료되면 시스템의 전원을OFF(0)한다.

(4) 핸드피스를 분리하고 지침절차에 따라 세척, 멸균한다.

(5) 핸드피스 케이블의 파손이나 마모여부를 확인한다.

(6) 핸드피스 멸균방법

① 가압증기 멸균기(steam autoclave)에 핸드피스를 넣는다.

② warm-up이 완료되면 273°F/134°C ~ 279°F/137°C의 멸균 온도, 31psi/216kPa의 압력으로 3~4분간 작동시킨다. 인서트는 즉시 사용하도록 한다.

③ 가압멸균기의 건조 사이클을 20-30분으로 설정하여 건조한다.

사용 시 주의사항

(1) 경고

① 심박조율기(cardiac pacemaker), 제세동기(defibrillator) 및 기타 이식형 의료장비를 이식받은 환자에 대해서는 장비의 동작에 방해가 될 수 있으므로 시술 중 핸드피스 및 케이블을 장비나

리드로부터 6~9인치(15~23cm)정도 거리를 유지하는 것이 권장된다.

② 심박조율기 및 기타 이식형 의료장비의 종류는 매우 다양하기 때문에, 시술자는 장비의 제조원 또는 환자의 담당의와 상의하여 장비의 구체적인 권고를 참고한다.

③ 시술 중 분무제(aerosol)의 방출량을 줄이기 위해 대용량 타액 배출기(High Volume Saliva Evacuator)의 사용이 적극 권장된다.

④ 무균상태가 요구되는 곳에는 사용해서는 안 된다.

⑤ 시술하기 전에, 환자는 Chlorhexidine Gluconate 0.12% 같은 항균제로 헹구어야 한다. 그럴 경우 감염의 확률 및 치료 중 분무 형식으로 배출되는 미생물의 수를 감소시켜준다.

⑥ 전파법에 따라, 정보통신부령이 정하는 사항에 대하여 기기를 변경하고자 하는 경우에는 정보통신부장관에게 신고하여야 한다.

(2) 주의

① 과도한 열은 시스템을 손상시킬 수 있으므로 시스템을 방열기 또는 기타 열 발생장치 위나 근처에 두지 않는다.

② 시스템의 측면부, 하부로 공기가 잘 통하는 곳에 보관한다.

③ 시스템은 이동이 가능하나 운반 시에는 주의하여 다루어야 한다.

④ 장비 세척 및 급수 시스템 유지가 권장된다.

⑤ 진료실을 나가기 전에는 항상 급수장치의 차단 밸브를 잠근다.

⑥ in-line water 필터 사용이 권장된다.

⑦ 핸드피스를 통해 액체의 흐름이 없을 경우에는 시스템을 동작시키지 않는다.

⑧ 시스템과 함께 사용되는 인서트의 효율이나 성능을 입증하는 책임은 전적으로 제조사에 있으며, 사용자는 임상치료 전에 인서트 사용의 제한사항을 주지하여야 한다.

⑨ 칫솔과 같이 인서트 팁은 사용할수록 마모(wear)된다. 인서트가 2mm 정도 마모되면 치석제거 효율은 약 50% 감소한다. 일반적으로 인서트는 최적의 효율, 파손의 방지를 위해 1년 사용 후 폐기, 교체하는 것이 권장된다.

⑩ 인서트의 과도한 마모, 구부러짐, 변형, 파손이 발견된 경우에는 즉시 폐기한다.

⑪ 인서트 팁이 구부러지거나 손상, 변형된 경우 사용 중 파손될 가능성이 있으므로 즉시 폐기, 교체한다.

⑫ 환자의 구내에 인서트를 위치할 때에는 접촉하지 않도록 입술, 볼, 혀를 당겨준다.

(3) 금기

① 시스템을 아말감 압축(condensation of amalgam)과 관련한 회복절차로 사용해서는 안 된다.

(4) 세척 및 소독방법

① 캐비넷 표면, 전원 코드, 핸드피스 케이블, 물 공급선, 풋 스위치, 풋 스위치 연결케이블(사용시)은 승인된 비침수성의 소독 용액을 사용하여 소독제 제조사의 지침에 따라 소독한다.

② 시스템 청소는 일반적으로 소독 용액을 깨끗한 수건에 뿌려 표면을 닦아낸 후, 다시 마른 천으로 닦아낸다.

③ 시스템 소독은 소독제를 깨끗한 수건에 뿌려 표면을 닦아낸 후, 공기 중에서 건조시킨다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
-----------------	---------



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com

보관 또는 저장방법	보관온도(-40~70°C), 상대습도(10~100%: non-condensing), 대기압(500~1060hPa)
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기적 정격: 100~240V, 50/60Hz, 1.0 A</li> <li>- 소비전력: 80 VA</li> <li>- 전격에 대한 보호형식 및 보호정도: 1급 기기, B형 장착부</li> <li>- 안전장치: 휴즈 F1.25A, 250V</li> </ul>
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	