

품목허가번호	수허 11-1012 호
품목명	교정용브라켓
모델명	ReOrder NO. 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 브라켓
중량 또는 포장단위	EA
사용방법 가. 사용 전 준비사항 1. 적용 전 치아 표면의 습기 및 이물질을 제거한다. 2. 에칭 에이전트 사용 시 에칭 에이전트의 사용방법에 따라 에칭한다. 나. 사용방법 1. 치아의 위치에 알맞은 제품을 선택한 후 본딩제를 바른 후 치아에 안전하게 접착시킨다. 2. 와이어를 연결시킨다. 다. 사용 후 보관방법 1. 사용 후 남은 제품은 비닐지퍼를 완전히 밀봉한 후 실온보관한다. 2. 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 말아야 한다.	
사용 시 주의사항 1) Bonding baserk 만일 오일로 오염되어 있다면, 접착전에 알콜로 오염부위를 깨끗이 닦아준다. 2) Bonding agent 에 따라서 agent 를 사용안 할 수도 있고 특별한 primer 가 요구 될 수도 있다. bonding agent 의 사용설명서를 참고한다. 3) 높은 점성 bonding agent 사용 시 관례적으로 완전히 증발되는지 확인한다. 4) Bonding agent 를 혼합하지 않고 사용할 수 없다. 5) 구강 내에서 이 제품을 광택 및 grind 하지 말 것. 6) 이 제품은 재사용하지 말 것. 7) 교정이외의 용도로 사용하지 말 것. 8) 치과의사만 사용할 것.	
금지 1) 니켈의 원료나 본 제품에 발진 또는 피부염과 같은 과민성의 병력을 가진 환자에게는 사용하지 않는다. 2) 본 제품은 일회용 의료기기 임.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지	



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com