

품목허가번호	수허 13-1761 호
품목명	교정용브라켓
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 주의사항 접착할 치아 표면이 기름 등으로 오염되었다면 제대로 본 선재가 접착되지 않을 수 있으므로 적절히 치아표면의 습기 및 이물질을 제거할 것 나. 사용방법 1. 치아에 알맞은 제품을 선택한다. 2. 교정용 접착제를 사용하여 움직임이 필요한 곳인지, 고정이 필요한 곳인지에 따라 치아의 labial 표면에 접착할 것 3. Slot 에 wire 를 삽입하고 연결선(ligature wire)으로 wing 까지 연결하고 고정시킬 것 4. 권장되는 접착제 -부드러운 접착제를 사용할 것이 권장됨 -더 harder 한 접착제를 사용할 경우 재료가 흠까지 잘 스며드는지 확인할 것 다. 사용 후 보관방법 치과전문의 외의 사람이 취급하지 않는 곳에 실온보관	
사용 시 주의사항 -본 제품에 발진 같은 부작용을 보이는 환자에게는 즉시 사용을 중지하고, 의사와 상담하게 할 것 -본 제품이 구강 내에 있을 때 이를 연마하거나 폴리싱하지 말 것 -치과용(교정용)의 목적으로만 사용할 것 -치과전문의만 사용할 것 -Color code 는 에탄올에 의해 손상될 수 있다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	