

품목허가번호	수허 13-1763 호
품목명	성형된치관
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	자연 치관이 파손되거나 제거된 후 영구 치관을 설치하기 전 임시로 사용하거나 유치가 심하게 손상되었을 때 기능 회복을 위해 사용하는 성형된 치관
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 -치아소제: Tooth preparation 나. 사용방법 -Abutment 로 치아의 최대 지름을 측정하고, 본 크라운 모델의 치수(지름)를 참고하여 사용할 제품을 정하고 치아에 적용한다. -Contour(윤곽)을 형성하고 cervical 부분을 잘라내어 크라운의 마진을 마무리한다. -치아에 잘 맞게 장착 후 치과용 시멘트로 크라운의 내부를 채우고 tooth 위에 압력을 가한다. 다. 사용 후 보관방법 -실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다. -전문가 외의 취급을 금할 것.	
사용 시 주의사항 -전문 의료인에 의해 사용되어야 하며 사용목적 이외의 사용을 금한다. -치아의 형태에 따라 지름이 알맞은 사이즈의 치관을 선택하여 사용할 것. -제품이 구강 내에 있을 시에는 제품을 폴리싱하거나 다듬지 않는다. -사용 중 제품 성분에 의해 홍반이나 피부염 등 과민감작반응이 일어날 경우 즉시 사용을 중지하고 의사에게 보일 것. -니켈 성분이나 본 제품에 홍반이나 피부염 등 알레르기 반응을 일으키는 환자에게는 본 제품의 사용을 금할 것. -본 제품의 폴리싱 과정 중 먼지 등이 신체에 옮겨지는 것을 예방하기 위해 승인된 mask 를 착용할 것. 먼지를 흡입하지 말 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.
유효기간	반영구
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com