

품목허가번호	수허 13-1764 호
품목명	치과교정용선재
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K.(일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 사용하는 선재
중량 또는 포장단위	ea
<b>사용방법</b> -사전에 브라켓의 슬롯(Slot)을 치면에 장착한다. -브라켓의 슬롯에 본 제품을 적절히 굴곡시킨다. -결찰선 등으로 결찰 고정시킨 후 치열교정을 행한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> -전문의료인에 의해 사용되어야 한다. -사용목적 이외의 사용을 금한다. -구강 내에서 본 제품을 연소시키지 않는다. -본 제품의 연마 시 국소흡진장치, 방진마스크 등을 사용하여 분진을 흡입하지 않도록 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	