

품목허가번호	수허 13-1769 호
품목명	교정용브라켓
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 재료
중량 또는 포장단위	Package
사용방법	고정치아의 앞쪽에 치과교정용 접착제를 접착한다. Slot 및 Tube 에 와이어를 삽입한다. Wing 을 와이어로 결찰, 고정시켜 사용한다. Hook 부분은 방향의 이동, 각도의 이동이 요구되는 교정치료에 응용된다. Elastic 고무를 걸어서 사용한다.
사용 시 주의사항	니켈에 대한 발진, 피부염 등 과민증이 있는 환자는 사용을 금한다. 본 제품의 사용에 의해 발진 등의 과민증상이 나타난 환자는 사용을 중지하고, 의사의 진단을 받는다. 구강 내에서 본 제품을 연소시키지 않는다. 본 제품을 연마 시에는 국소흡진장치, 방진마스크 등을 사용하여 분진을 흡입하지 않도록 한다. 전문 의료인에 의해 사용되어야 하며, 사용목적 이외의 사용을 금한다.
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.
유효기간	10 년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	