

품목허가번호	수허 13-1771 호
품목명	치과가공용합금
모델명	제조원표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조원(제조국)	DeguDent GmbH (독일)
사용목적	치과용으로 사용하는 순금속
중량 또는 포장단위	Package
<p>사용방법</p> <p>가. 사용 전 준비사항 제품의 유효기간이 유통기간 내에 있는지 확인하고 포장이나 제품에 손상이 있는지 확인한 후 유효기간이 경과했거나 손상이 있는 것은 사용하지 않는다.</p> <p>나. 사용방법</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 비시안 아황산금 용액과 활성용액을 20:1 비율로 혼합한다. (예: 금용액 100ml 에 활성용액 5ml 첨가) 2. 용액의 양은 전기분해가 될 치아의 크기에 따라 결정되며 층의 두께 및 파워세팅은 파라미터 결정을 위한 Solaris model 을 사용하여 세팅되고 Solaris Unit 은 자동으로 필요한 용액의 양을 산출한다. 3. 진행촉진의 품질은 금용액과 활성용액을 정확한 용량으로 혼합하고 도금기기를 정확한 파워로 세팅하는 것에 따라 달라진다. 4. 용량이 결정되면 장비의 용기에 금용액과 활성용액을 혼합하여 넣고 파워를 세팅하여 도금을 시작한다. <p>다. 사용 후 보관 및 관리방법</p> <p>오염을 피하고 직사광선 및 산소에 오랫동안 노출되는 것을 피한다. 사용 후에 뚜껑을 조심스럽게 닫는다. 시원하고 어두운 곳, 특히 화학약품용 보관장어의 보관이 권장된다. 폐기 시에는 관련법과 규정에 의거하여 버린다.</p> <p>사용 시 주의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solaris 금용액은 일회 사용하여야 하고 Solaris Activator 원 제품하고만 사용하여야 한다. 2. Solaris 금용액은 표면과 옷 등을 오염시키거나 착색시킬 수 있으므로 다룰 때 적절한 주의가 필요하다. 3. Solaris activator 의 각 사용 전에는 잘 흔들고 결정체가 형성되었는지 확인하고 사용하지 말아야 한다. 4. Solaris activator 는 흡입하거나 삼키는 경우에 유해하다. 5. Solaris activator 는 단단하게 뚜껑을 닫고 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다. 6. Solaris activator 가 눈에 접촉될 경우 다량의 물로 즉시 씻어내고 전문의료인의 조언을 구한다. 7. Solaris activator 사용 시 적절한 보호 의복과 장갑, 안/안면 보호대를 착용한다. 	

8. 느낌이 좋지 않거나 사고가 있을 경우 즉시 전문의료인의 조언을 구한다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	시원하고 어두운 곳에 보관한다.
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	