

품목허가번호	수허 13-1772 호
품목명	교정용브라켓
모델명	REORDER NO. 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 재료
중량 또는 포장단위	Package
사용방법	이동을 요하는 치아, 고정치아의 앞쪽에 치과교정용 접착제를 접착하고, slot 에 와이어를 삽입 후 wing 을 와이어로 결찰, 고정시켜 사용한다. Hook 부분은 방향의 이동, 각도의 이동이 요구되는 교정치료에 응용되며 라텍스 고무를 걸어서 사용한다.
사용 시 주의사항	전문의료인에 의해 사용되어야 하며, 사용목적 이외의 사용을 금한다.
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	