

품목허가번호	수허 13-1773 호
품목명	치과교정용선재
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K.(일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 사용하는 선재
중량 또는 포장단위	Package (10 pcs)
<b>사용방법</b> -치아 표면에 장착된 bracket slot 에 본 제품을 적절히 구부려 넣고, 결찰선 등으로 결찰 고정시킨 후 치열과정을 행한다. -다수의 치아를 같이 치료하는 목적으로 사용 시에는 결찰 고정을 너무 강하게 하지 않는다. -너무 강하게 결찰 고정되면, 재료의 특성 상 와이어가 부러질 수도 있으므로 유의한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> -와이어를 구강 내에서 연마하거나 폴리싱하지 않는다. -폴리싱 작업 시에는 적절한 보호장비를 착용하여 먼지를 흡입하지 않는다. -치과용으로만 사용한다. -전문 의료인에 의해 사용되어야 한다. -본 제품 사용 후 발진, 피부염 등의 증상이 발견되는 환자에게는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담하게 한다. (본 제품은 극도로 민감한 환자에게 이 같은 증상을 유발할 수 있다.)	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하여 깨끗한 곳에서 실온보관
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	