

| | |
|--|--|
| 품목허가번호 | 수허 14-223호 |
| 품목명 | 레진계인공치아 |
| 모델명 | 전치: 10.206A [Shade] [Mould], 구치: 10.208P [Shade] [Mould], 전구치 세트: 10.328 [Shade] [Mould]. Shade와 Mould는 제품겉 면참조. |
| 수입업자 | 덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동) |
| 제조원(제조국) | Dentsply Dental (Tianjin) Co., Ltd. (중국) |
| 사용목적 | 의치에 삽입하는 경질 레진제의 인공치아. 보통 각종 치수, 형 태, 색조에 따라 전치부(상,하악별) 또는 구치부(상,하악별)의 세 트로 제공한다. |
| 증량 또는 포장단위 | 제조원의 포장단위에 의함 |
| 사용방법 가. 사용 전 준비사항 1) 사용 전 제품의 유효기간, 포장상태 및 파손여부를 확인한다. 2) 환자에 맞는 치아를 준비한 후 인공치아 표면의 이물질을 제거한다. 나. 사용방법 1) 구강의 형상에 맞게 인공치아를 Wax rim에 위치시킨다. 2) 석고로 매몰한 후 뜨거운 물을 사용하여 왁스를 제거한다. 3) 적당량의 denture base resin을 전입하여 flask를 밀봉한다. 4) 밀봉된 flask를 끓는 물에서 30분가량 중합시킨다. 5) 완성된 denture를 광택 후 완성시킨다. 다. 사용 후 보관방법 1) 사용 후 박스를 닫은 상태로 직사광선과 열을 피하여 건조한 곳에서 실온 보관한다. 2) 사용한 인공치아는 재사용하지 않고 폐기한다. | |
| 사용 시 주의사항 1) 화기에 접근을 금지한다. 2) 솔벤트, 화학적 유기용제를 멀리한다. 3) 반드시 치과 보철용으로 사용한다. 4) 사용한 인공치아는 재사용하지 않고 폐기한다. | |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월 | 2021.05 |
| 보관 또는 저장방법 | 직사광선과 열을 피하여 건조한 곳에서 실온 보관한다. |
| 유효기간 | 제조일로부터 10년 |
| 제조번호 | 제조사 표시사항 참조 |
| 제조연월 | 제조사 표시사항 참조 |
| 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지 | |