

품목허가번호	수허 14-2557호
품목명	기타보존재료
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply DeTrey GmbH (독일)
사용목적	치과수복용시멘트(글라스아이오노머) 위에 도포하여 치과수복용시멘트(글라스아이오노머)가 경화되는 동안 보호하는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 제품의 유효기간과 포장상태를 확인한다. 나. 사용방법 면봉 또는 일회용 브러시를 사용하여 세팅된 치과수복용시멘트(주로 글라스아이오노머시멘트) 수복물의 표면에 ChemVarnish를 적용한다. 치과용 주사기를 사용하여 부드러운 공기의 흐름으로 첫 번째 코팅을 건조시켜 피막이 균일하도록 한다. 두 번째 바니쉬 층을 적용한 후 공기로 다시 건조시킨다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 뚜껑을 꼭 닫은 상태로 10-24°C의 직사광선이 닿지 않는 건조한 곳에서 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> <u>금기, 부작용, 다른 치과재료와의 상호작용</u> 보고된 바 없음 <u>경고</u> • ChemVarnish는 인화성이 강하다. • 발화원으로부터 멀리 둔다. • 흡연하지 않는다. • 배수관으로 흘려보내지 않는다. • 눈에 닿지 않도록 한다. 눈에 들어간 경우 즉시 많은 양의 물로 눈을 씻어내고 의사의 진단을 받는다. • 섭취 또는 장시간 노출을 피한다. <u>주의사항</u> • 본 제품은 치과용으로만 사용한다.(치과수복용시멘트로 사용되는 글라스아이오노머시멘트 위에 사용한다.) • 유효기간: 제조일로부터 3년	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	10-24°C의 직사광선이 닿지 않는 건조한 곳에서 보관한다.
제조번호	LOT번호 참조

제조연월, 사용기한

제조사 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)