

품목허가번호	수허 99-2535호
품목명	열중합형의치상용레진
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co. Ltd (중국)
사용목적	의치상용 레진
중량 또는 포장단위	Package
사용방법 1) 사용 전 준비사항 ① 인공치의 왁스제거: 모델에서 왁스작업을 마친 후 끓는 물에서 5분 동안 담가서 왁스를 제거한다. ② 레진 분리제 도포: 모델을 건조시킨 후 레진 분리제를 모델에 도포한다. 2) 사용방법 ① 혼합: 분말 병을 잘 흔들어준 다음 23°C정도의 실온에서 분말:액=23g:10ml의 비율로 넣은 후 스파출라로 1분 정도 혼합한다. ② 적용: 레진 혼합분을 플라스크 내의 모델에 약간 초과된 양을 적용한다. ③ 플라스크 장착: 플라스크를 죄어서 초과된 양을 제거한다. ④ 중합: 방법 1- 닫혀진 플라스크를 끓는 물에 넣고 20분간 계속 열을 가해준다. 이 방법은 일반적인 의치상 제작 시 사용된다. 방법2- 닫혀진 플라스크를 끓는 물에 넣고 열을 가하지 않고 20분간 놓아둔 뒤에 다시 열을 가해서 20분간 끓여준다. 이 방법은 특별히 두꺼운 의치상 제작 시 사용된다. ⑤ 냉각: 중합 후 10분 정도 실내에서 냉각시킨 후 플라스크를 열기 전에 찬물에 침수시킨 후 분리한다. 분리 후 통상적인 방법으로 Finishing & Polishing 한다. 3) 사용 후 보관 및 관리방법 마개를 잘 닫은 후 실온(16~26°C)에서 차광 보관한다.	
사용 시 주의사항 1) 피부 접촉에 주의하고, 지각 과민 발생 시 사용을 중단할 것. 2) 증기 흡입이나 섭취를 금할 것 3) 작업장의 통풍상태를 양호하게 할 것 4) 사용 후 손을 비누 등으로 깨끗이 씻을 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	1) 마개를 잘 닫은 후 실온(16~26°C)에서 보관한다. 2) 수분이나 직사광선을 피할 것 3) 액은 발화물질을 포함하므로 화기에 주의한다.
유효기간	Powder 5년, Liquid 5년
제조번호	제조사 표시사항 참조

제조연월, 사용기한

제조사 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com