

품목허가번호	수허 99-45 호
품목명	세라믹계인공치아
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Trubyte (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY International Inc. Prosthetics Division (미국)
사용목적	부분 및 완전 의치 제작용
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 따름
사용방법 가. 사용 전 준비사항 의치 제작용 치아 소제 나. 사용방법 왁스 소제: 치아에 묻어있는 왁스를 65-93°C에서 녹여버린다. 왁스 작업: 석고 모형에 왁스를 입힌다. 치아 배열: 왁스 위에 인공치아를 배열한다. 매물 - 왁스 작업 분을 플라스크에 넣은 후 매물재를 투입한다. - 매물재는 적량의 분말과 물로 혼합 후 사용한다. 왁스 소제 - 끓는 물에서 왁스를 깨끗이 소제한다. - 중간 정도의 플라스크의 예에서 3 시간 30 분에서 4 시간 동안 끓는 물에 둔다. 의치상 재료 투입: 왁스 소제 부분에 의치상용 레진을 투입한다. 열중합: 의치상용 레진을 열중합한다. 피니싱: 초과된 레진 사용분을 적절한 도구로 제거하고 피니싱한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 - 직사광선을 피한다. - 통풍이 잘 되는 곳에서 보관한다. - 25°C 이하에서 보관한다.	
사용 시 주의사항 - 왁스는 분자 결합력에 중요하므로 소제 시 깨끗이 할 것. - 필요 시 마진부위를 연마재를 이용해서 깎아낸다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	환풍이 잘 되는 곳에서 25°C 이하에서 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com