


품목허가번호	수인 10-582 호
품목명	디지털치과진단용파노라마엑스선촬영장치
모델명	Orthophos XG 5 Ceph
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	Sirona Dental Systems GmbH(독일)
사용목적	진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 치아, 턱 등을 촬영하는 기구. 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마(넓은 시계)화상을 촬영하도록 설계되어 있다.
소비전력 및 포장단위	2kVa, 1 SET
정격전압 및 주파수	단상, 220VAC, 50/60Hz
전기 충격에 대한 보호형식 및 보호정도	1 급기기, B 형기기
사용방법 사용방법 파노라마 촬영 (PAN) 가. 촬영 준비	

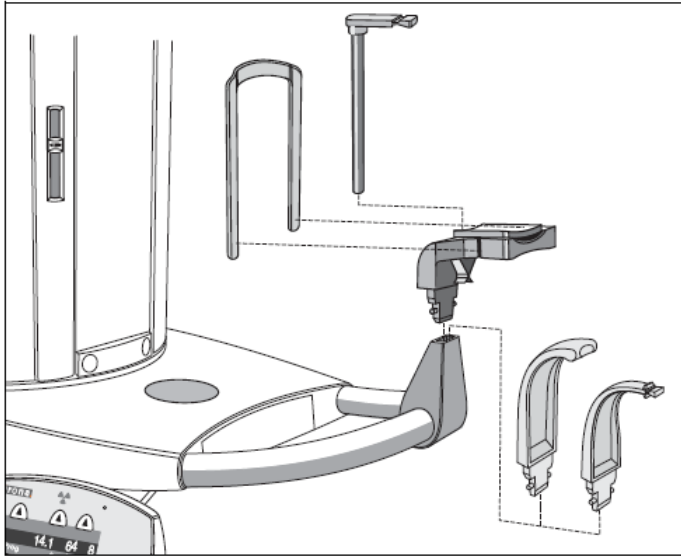

(1) 엑세서리 부착

- 바이트블록 또는 턱받침대가 완전히 걸릴 때까지 밀어 넣습니다.
- 제거할 경우에는 자동으로 잠김이 풀립니다.

(2) 장비 전원 켜기

* 주의

과도한 온도 변화가 있을 때에는, 응결이 발생할 수 있습니다; 그렇기 때문에 장비가 실내 온도에 도달할 때까지 시스템의 전원을 켜지 마십시오.

•메인 스위치(1)를 위치 I로 옮기고 약 1분간 기다립니다.

•멀티패드 상단에 있는 LED(28)가 켜집니다.

•방사선 표시기(25)가 기능 테스트를 위한 약 1초간 켜집니다.


•이마 지지대와 환자놀이 지지대가 완전히 개방 됩니다.

장비 전원이 켜질 때 , 표시장치에 점들이 잠시 나타나고 잠시 후에 자동적으로 사라 집니다.

이후 프로그램 P1의 수치가 표시 됩니다.

좌측에서 두 번째 있는 환자 심볼 상단의 LED 가 켜집니다.

* 주의

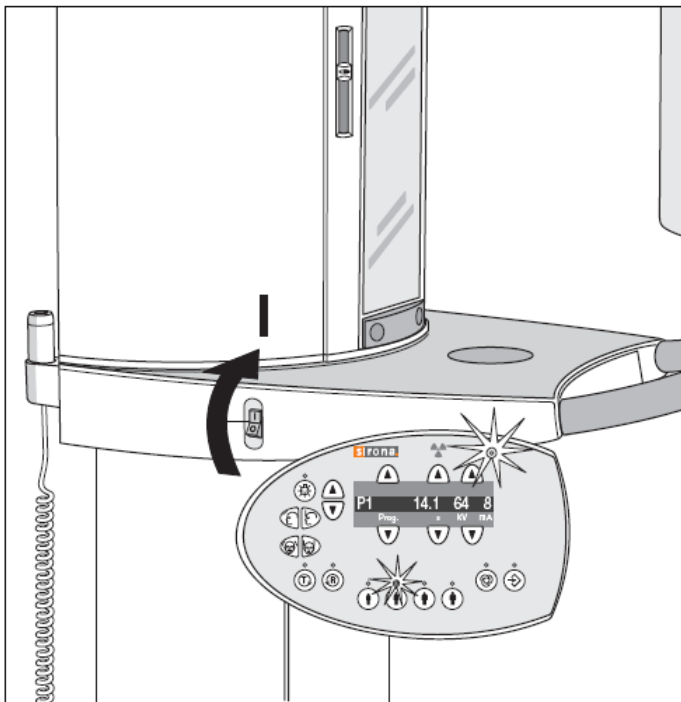


전원이 켜지는 동안 환자가 장비 내에서 자세를 잡고 있어서는 안됩니다.

장비의 전원을 끄고 다시 켜야하는 오류가 발생한 경우, 최소한 장비의 전원이 다시 켜질 때까지 장비에서 떨어져 있어야 합니다!

* 주의


메인 스위치로 장비의 전원을 끈 후에는 , 장비를 다시 켤 때까지 대략 2 분정도 기다려야 합니다.

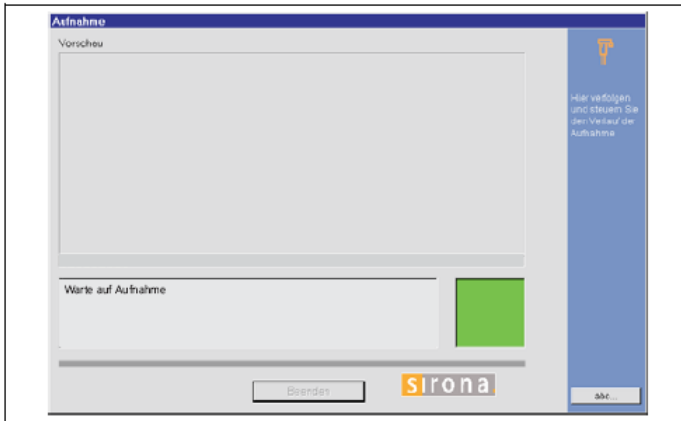

(3) PC 켜기

•PC의 SIDEXIS 프로그램을 이미지(XP) 촬영을 위한 준비 상태로 전환합니다.

SIDEXIS와의 연결이 되기 전까지는, 헬프 메시지 "H403"(SIDEXIS를 촬영 준비 상태로 전환하십시오) 과 촬영 프로그램 번호가 번갈아 가며 멀티패드의 디지털 표시장치에 나타납니다.

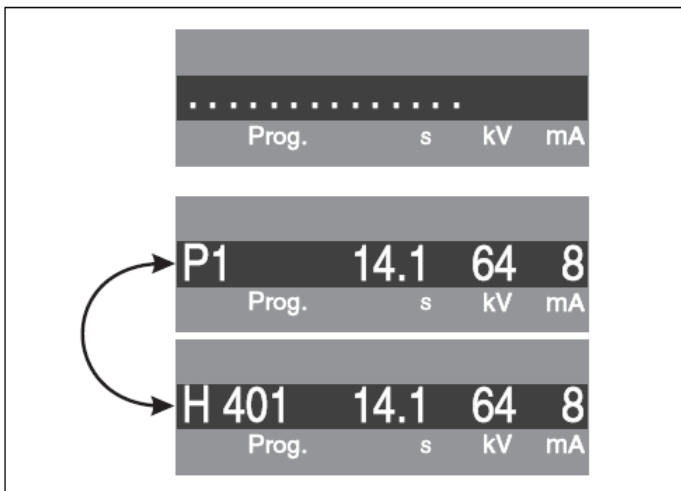

(4) 디지털 표시장치의 표시

시스템의 전원이 켜진 후, 처음 디지털 표시장치에 점들이 잠시 동안 나타납니다.

이후 촬영 프로그램 번호 "P1", 이 프로그램에서 초 단위의 최대 촬영 시간 "s" 그리고 이 촬영 프로그램에 저장된 "kV/mA" 조합이 표시됩니다.

시스템은 이제 작동 준비를 마쳤습니다.

촬영 프로그램 번호와 헬프 메시지 H... 가 번갈아 가며 디지털 표시장치에 나타난다면, 헬프메시지를 우선적으로 처리해야 합니다.

니다 .

헬프 메시지가 더이상 나타나지 않는 상태가 된 후에만, 시스템이 작동 준비를 마칩니다.


아직 처리되지 않은 준비 절차에 의해 발생하는 헬프 메시지는 다음과 같습니다:

H 301 R 키, 시작 위치로 이동시키십시오.

H 320 R 키, 촬영 데이터를 확인하십시오.

H 321 X-ray실 문을 닫으십시오.

H 401 PAN 슬롯에 센서를 삽입하십시오.

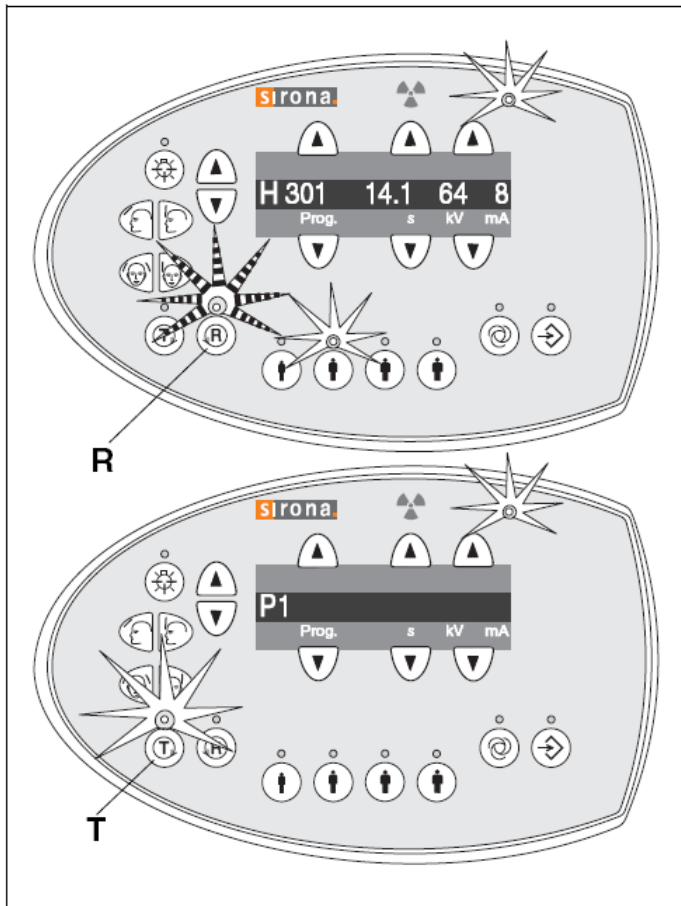

H 403 SIDEXIS 를 촬영 준비 상태로 전환 하십시오 .

H 404 Ceph 센서를 삽입하십시오 .

H 406 R 키 , Ceph 시작 위치로 이동시키 십시오 .

H 420 SiRescue 로 미전송된 영상을 가져 옵니다 .

- R 키 상단의 준비 LED 가 깜빡거리기 시작하고 헬프메시지 H3 01 이 표시장치에 나타나면, 회전부가 촬영 준비 위치로 이동하도록 R 키를 짧게 누르십시오. 준비 LED 가 이후 꺼지고 헬프 메시지가 사라집니다.

* 알 림

T 키를 누르면 , 촬영 버튼을 누름으로써 방사선 없이 회전부를 동작시키는 테스트 사이클을 시작할 수 있습니다.

테스트 사이클이 진행되는 동안 환자 심볼 상단의 LED는 켜지지 않으며 촬영 프로그램 번호만 디지털 표시장치에 나타납니다.

나. 환자 포지셔닝


(1) 준 비

- 환자에게 탈착 가능한 의치를 비롯하여 머리와 목 부근의 안경 , 보석류와 같은 금속 물질들을 풀 어놓도록 요청합니다.

컨트롤 거울 앞의 트레이는 이러한 장신구를 놓아두는데 사용됩니다.

- 몸이나 의복 , 붕대 또는 휠체어 및 병원 침대 등이 장치 작동에 방해가 되지 않아야 합니다! T 키 를 눌러서 테스트 사이클을 먼저 실시하십시오.

- 바이트블록이나 접촉부와 턱받침대를 장착하십시오.

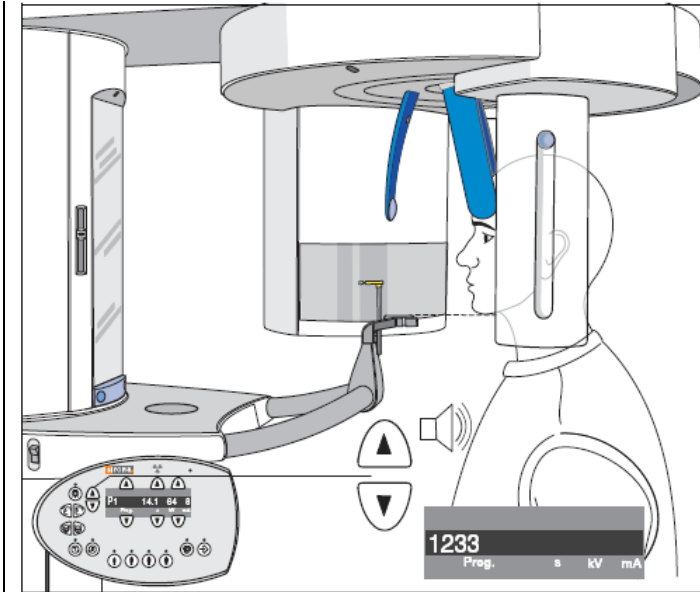

(2) 턱받침대와 바이트블록을 이용한 촬영

•환자를 컨트롤 거울 앞에 오도록 합니다.

•△ "상승" 또는 ▽ "하강" 키를 눌러서, 환자의 턱과 턱받침대가 같은 높이가 되도록 장비의 높이를 조절합니다.

모터가 동작할 때에는 신호음이 발생합니다 .

* 참조 수치

높이 조절 키가 눌러지는 있는 동안에는 , 추가 촬영을 위한 SIDEXIS 소프트웨어의 추가 정보 영역에 저장될 높이조절 설정의 참조 수치가 디지털 표시장치에 보여집니다.

* 알 림

높이 조절 모터는 천천히 움직이기 시작하여 속도를 차츰 증가시킵니다.


장비가 원하는 높이에 도달할 때까지 높이 조절 키를 지속해서 누르고 계십시오.

•환자가 턱받침대에 턱을 대도록 하고 손잡이를 잡도록 합니다.

•바이트블록은 안쪽으로 회전시킵니다.

•환자가 바이트블록의 홈을 물도록 합니다.

(상악 전치는 홈에 맞추고 , 하악 전치는 걸림이 있을 때까지 앞으로 내밀도록 합니다)

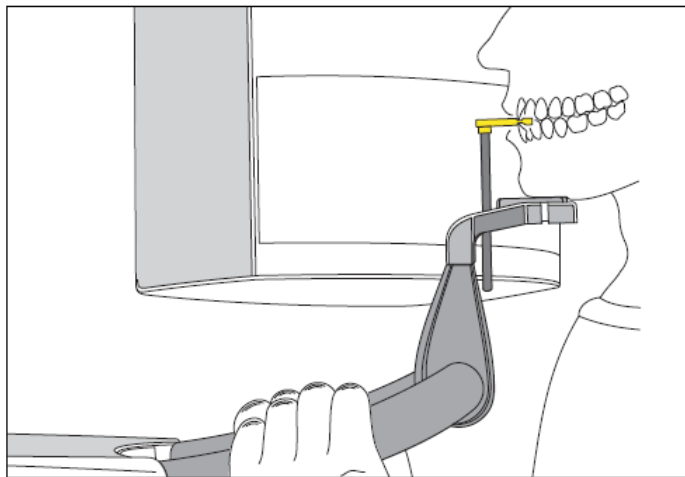

*주 의


그림처럼, 환자의 경추가 살짝 뒤로 기울어지도록 합니다.


환자가 장비 몸체 방향으로 조금 발을 내딛도록 하면 됩니다.

이렇게 하여 환자의 경골(목뼈)가 반듯하게 됩니다.

반듯한 경골은 전치부 영역의 밀도가 감소하여 흐릿해지는 현상을 방지합니다.

특별한 경우, 환자가 앉아서 촬영할 수도 있습니다. (예, 치과의사용 의자 활용)

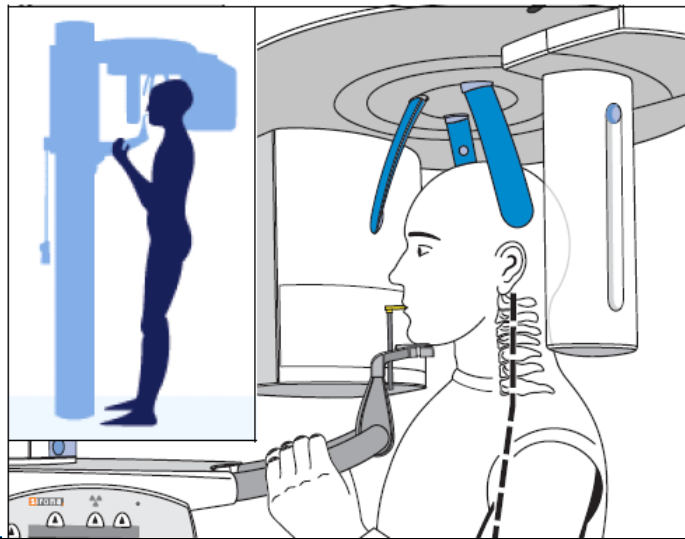

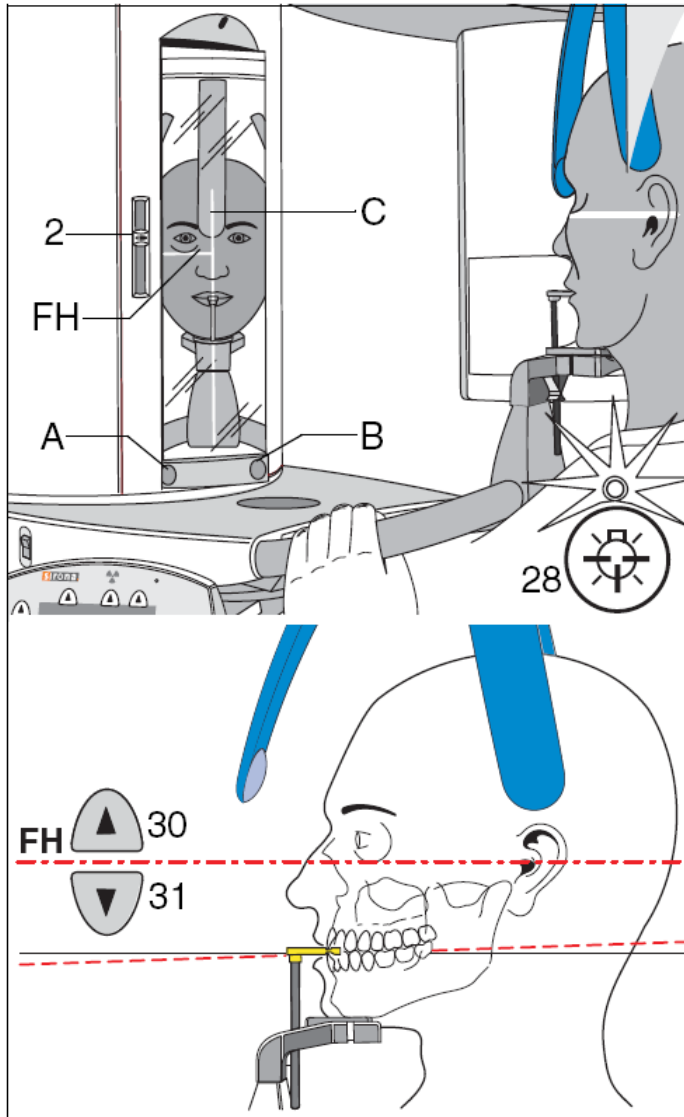


- 터치 바의 왼쪽 홈 A를 눌러서 거울을 돌립니다.
- 환자의 머리가 치아 교합면이 살짝 앞으로 기울여질 수 있도록 자세 잡게 합니다.
- 멀티패드의 키(28)를 눌러 라이트 로컬라이저를 켭니다. 올바르게 환자가 자세 잡는데 사용됩니다.
- 키 상단의 LED 는 라이트 로컬라이저가 켜져있는 한 계속 켜져 있습니다.
- *알림
라이트 빔이 환자의 눈을 향하지 않도록 각별히 주의하십시오. (레이저 광선)
라이트 로컬라이저는 대략 100 초가 지나면 자동으로 꺼집니다.

- (3) FH 수평 라이트 빔
이 빔이 외이의 구멍 상단과 안와 마진의 하부점 사이에 비추지도록 합니다.
(Frankfort Horizontal plane FH)
FH 수평 라이트 빔의 높이는 슬라이더(2)로 조절됩니다.
- FH 조절을 위해서 머리의 기울기를 정밀 조정합니다: 높이 조절용 Δ"상승" 키(30) 또는 ▽"하강" 키(31)를 짧게 누릅니다.
- 중앙 라이트 라인 (C)으로 얼굴의 전치부

중앙에 맞춥니다.

- 멀티패드의 키(29)을 눌러 "환자의 이마 방향으로" 이마지지대를 이동시킵니다. 환자의 이마에 닿으면 이마지지대는 자동으로 멈춥니다.
- 멀티패드의 키(40)를 눌러서 관자놀이 지지대를 닫습니다. 관자놀이에 닿으면, 관자놀이 지지대는 자동으로 멈춥니다.
- 터치 바의 오른쪽 홈 B를 눌러 거울을 원래 위치로 돌립니다.

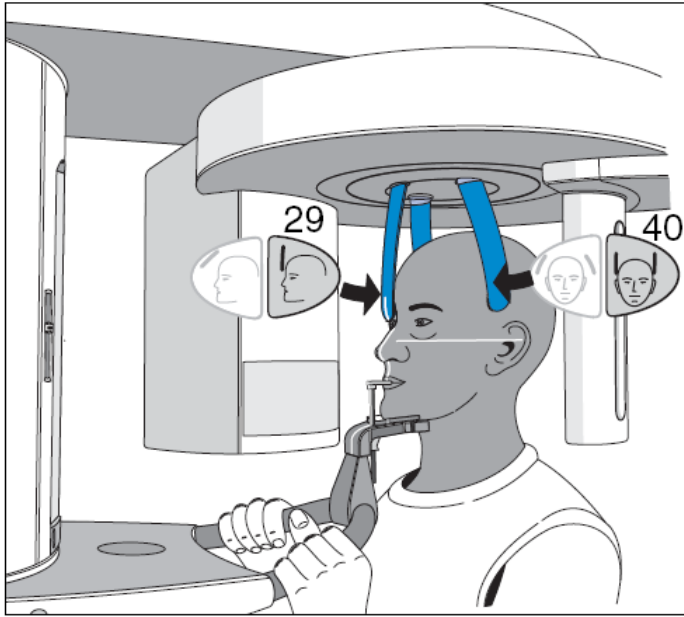

•FH 조정과 중앙 라이트 라인을 다시 점검합니다.


•환자에게 혀를 입 천장에 붙이도록 합니다.

* 참조 수치

이마 지지대 조절 키 (27/29) 가 눌러지는 있는 동안에는, 추가 촬영을 위한 SIDEXIS 소프트웨어의 추가 정보 영역에 저장될 이마 지지대 설정의 참조 수치가 디지털 표시 장치에 보여집니다.

* 알 림


이마 지지대와 관자놀이 지지대는 촬영이 완료되면 자동적으로 개방됩니다.

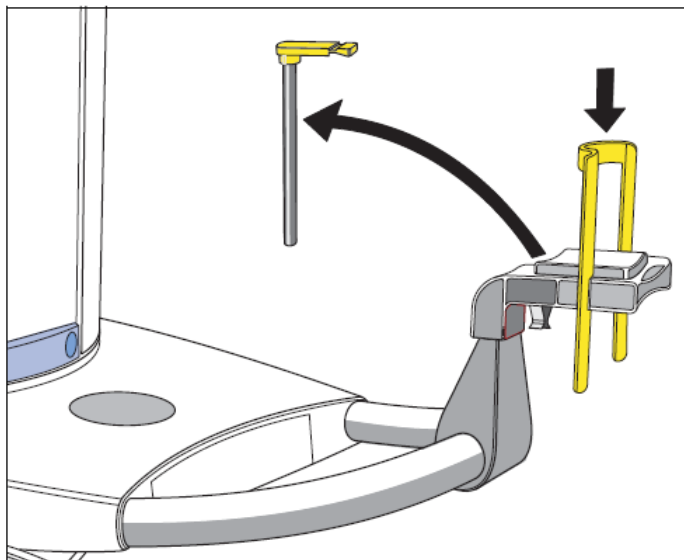

(4) 턱 받침대와 바를 이용한 촬영

- 전치가 없는 환자의 경우

•바이트블록 고정부에서 바이트블록을 제거하고 ; 대신에 , 그림에서 처럼(블록한 부분이 장비 쪽을 향하도록) 바를 장착합니다.

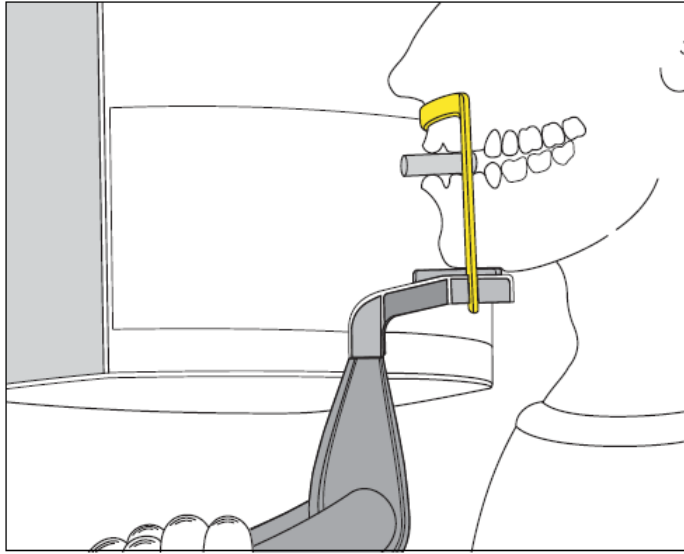


- 상악과 하악이 동일선 상에 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 면봉치를 그 사이에 끼우기가 수월해집니다.

- 턱받침대와 바이트블록의 촬영 방식과 동일하게 진행합니다.

차이점:




턱받침대에 환자의 턱이 놓여 집니다.

- 슬라이스 포지션과 관련하여 환자머리의 최적의 자세는, 환자의 비하점이 바에 닿도록 해야 합니다.

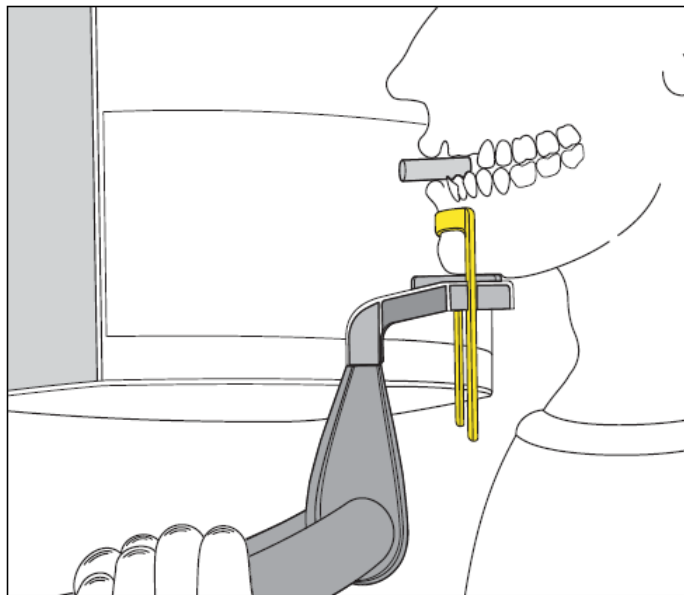

- 하악에 전치 일부가 남아있는 경우에는, 바를 턱과 아랫 입술 사이에 놓이도록 합니다.

- 환자에게 혀를 입 천장에 붙이도록 합니다.

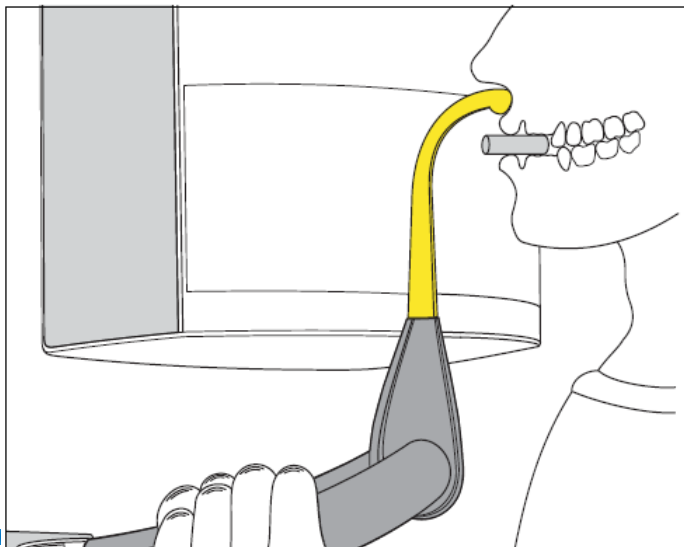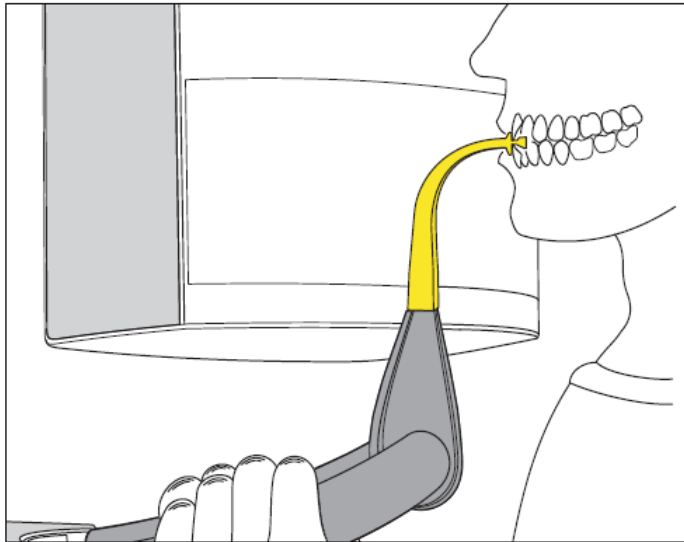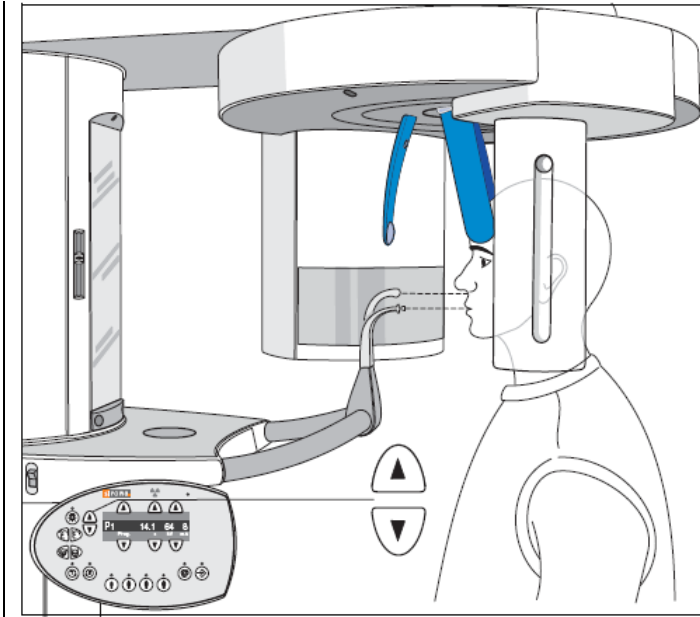

•환자를 컨트롤 거울 앞에 오도록 합니다.

- 바이트블록을 이용하는 경우

•△ "상승" 또는 ▽ "하강" 키를 눌러서, 바이트블록과 환자의 전치부가 같은 높이가 되도록 장비의 높이를 조절합니다.

•환자가 손잡이를 잡도록 합니다.

•환자가 바이트블록의 홈을 물도록 합니다.

상악 전치는 홈에 맞추고, 하악 전치는 걸림이 있을 때까지 앞으로 내밀도록 합니다.

참조 수치 높이 조절 키가 눌러지는 있는 동안에는, 추가 촬영을 위한 SIDEXIS 소프트웨어의 추가 정보 영역에 저장될 높이 조절 설정의 참조 수치가 디지털 표시장치에 보여집니다.

- 접촉부를 이용하는 경우

전치가 없는 환자의 경우




•접촉부와 비하점이 같은 높이가 되도록 장비의 높이를 조절합니다.

•환자의 비하점이 접촉부에 닿도록 합니다.

상악과 하악이 동일선 상에 있도록 합니다. 이렇게 하면 면뿔치를 그 사이에 끼우기가 수월해집니다.

* 알 림

앞에서 설명했던 것과 같이 , 환자의 경추가 살짝 기울어지도록 합니다.

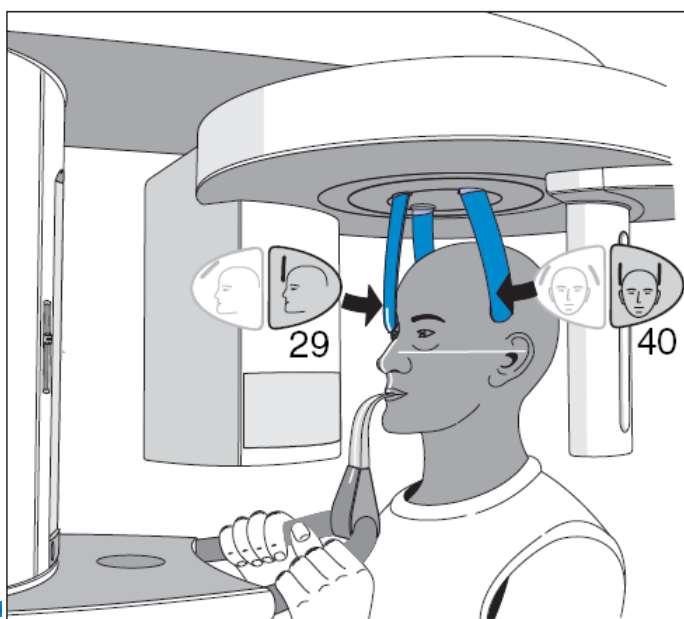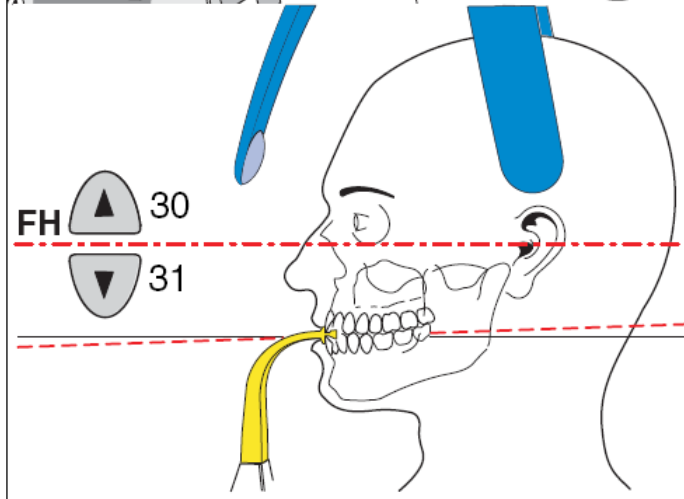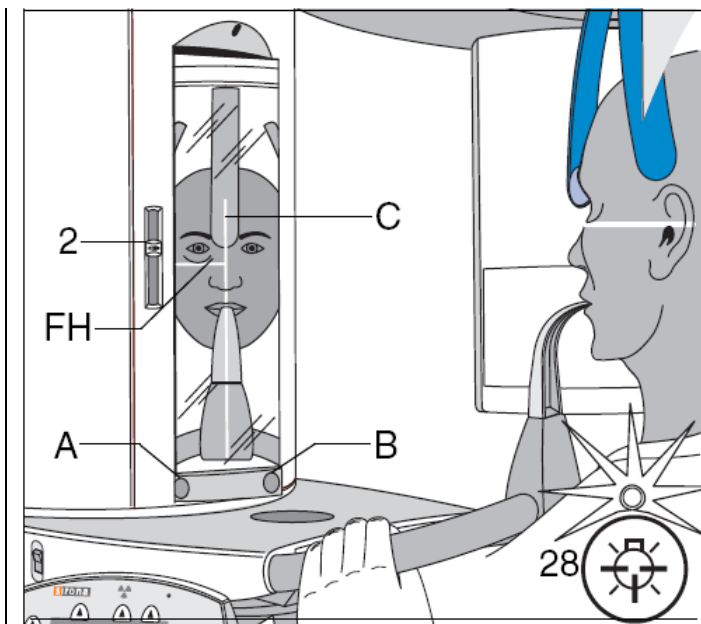

- 환자의 머리가 치아 교합면이 살짝 앞으로 기울여질 수 있도록 자세 잡게 합니다.
- 멀티패드의 키(28)를 눌러 라이트 로컬라이저를 켭니다. 올바르게 환자가 자세 잡는데 사용됩니다.
- 키 상단의 LED는 라이트 로컬라이저가 켜져 있는 한 계속 켜져 있습니다.

* 알 림

라이트 빔이 환자의 눈을 향하지 않도록 각별히 주의하십시오. (레이저 광선)

라이트 로컬라이저는 대략 100 초가 지나면 자동으로 꺼집니다.

(6) FH 수평 라이트 빔

이 빔이 외이의 구멍 상단과 안와 마진의 하부점 사이에 비춰지도록 합니다. (Frankfort Horizontal plane FH) FH 수평 라이트 빔의 높이는 슬라이더(2)로 조절됩니다.

•FH 조절을 위해서 머리의 기울기를 정밀 조정합니다: 높이 조절용 Δ"상승" 키 (30) 또는 ∇"하강" 키 (31)를 짧게 누릅니다.

•중앙 라이트 라인 (C) 으로 얼굴의 전치부 중앙에 맞춥니다.

•멀티패드의 키(29)를 눌러 "환자의 이마 방향으로" 이마지지대를 이동시킵니다. 환자의 이마에 닿 으면

이마지지대는 자동으로 멈춥니다.

•멀티패드의 키(40)를 눌러서 관자놀이 지지대를 닫습니다. 관자놀이에 닿으면, 관자놀이 지지대는 자

동으로 멈춥니다.

•터치 바의 오른쪽 홈 B를 눌러 거울을 원래 위치로 돌립니다.

•FH 조절과 중앙 라이트 라인을 다시 점검합니다.


•환자에게 혀를 입 천장에 붙이도록 합니다.

* 참조 수치



이마지지대 조절 키(27/29)가 눌러지는 있는 동안에는, 추가 촬영을 위한 SIDEXIS 소프트웨어의 추 가 정보 영역에 저장될 이마지지대 설정의 참조 수치가 디지털 표시장치에 보여 집니다.

* 알 림

이마 지지대와 관자놀이 지지대는 촬영이 완료되면 자동적으로 개방됩니다.

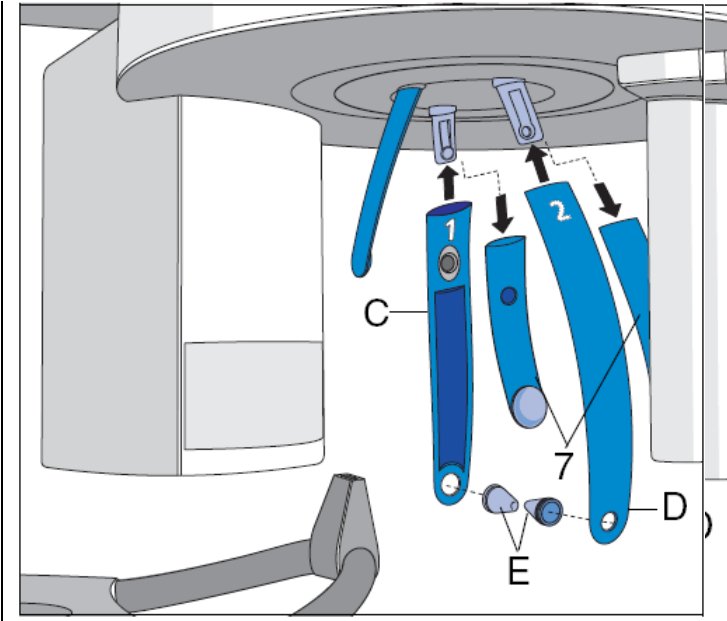

/TM1.2

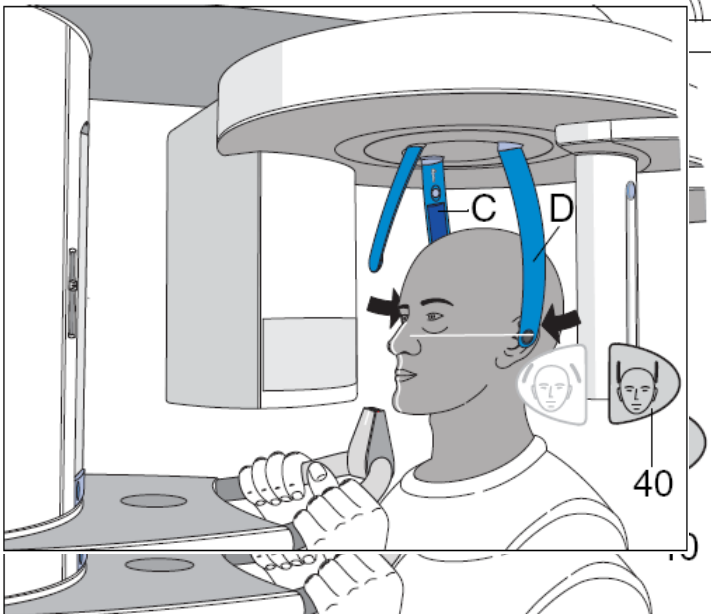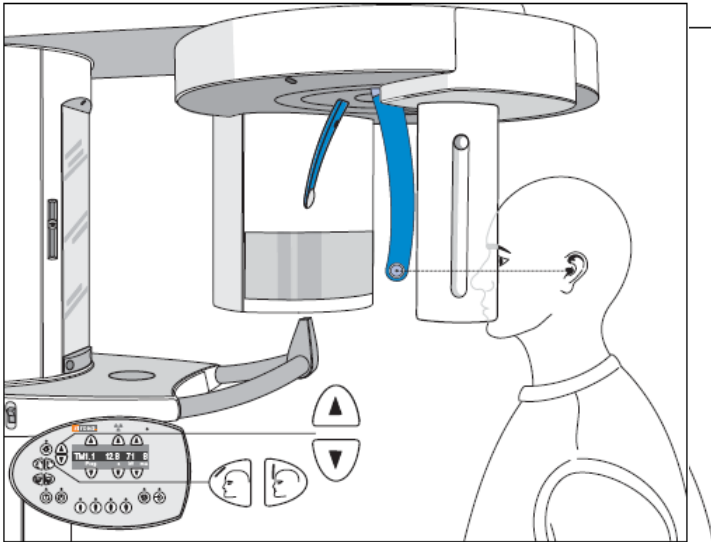

구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836
 : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

•악관절 촬영을 하려면, 악관절 지지대 (C) „1“과 (D)„2“를 관자놀이 지지대(7) 자리의 우측과 좌측에 장착합니다.

이렇게 하려면 해당 잠금 버튼을 누른 후, 관자놀이 지지대(7)를 제거합니다; 그 대신에, 악관절 지지대

(C)와 (D)를 딸깍 걸릴 때까지 밀어 넣습니다.

살균한 귀 홀더 2개(E)를 악관절 지지대 (C)와 (D)에 끼워 넣습니다.

•바이트블록과 턱받침대를 제거합니다.


•△ "상승" 또는 ▽ "하강" 키를 눌러서, 귀 홀더와 외이구멍의 높이가 같아지도록 장비의 높이를 조절합니다.

•환자의 머리가 악관절 지지대 (C)와 (D) 사이에 있도록 위치시킵니다.

귀 홀더가 외이 구멍에 딱 맞도록 멀티패드의 키(40)를 눌러서 악관절 지지대를 닫습니다.

•프로그램 TM1/TM2 의 경우, 환자의 머리가 Frankfort Horizontal plane FH에 따라 조정되어야 합니다.

•중앙 라이트 빔으로 얼굴의 중앙을 맞추도록 합니다.

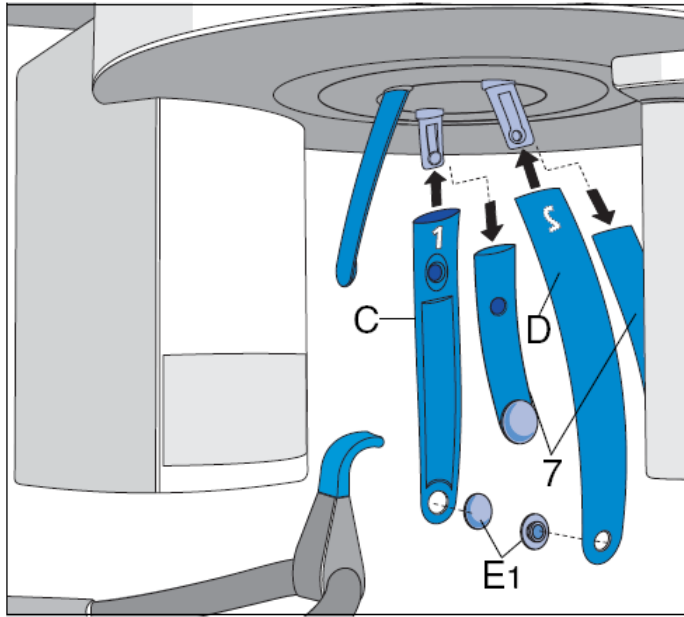

(8) 사이너스 뷰 , 프로그램 S1: 악관절 지지대를 이용한 부비동 촬영


•사이너스 뷰를 위해서는, 먼저 관자놀이 지지대(7)대신에 우측에 악관절 지지대 (C) "1" 과 좌측에 (D)"2"를 부착합니다.

이렇게 하려면, 해당 잠금 버튼을 누른 후, 두 개의 관자놀이 지지대(7)를 빼내고, 대신에 악관절 지지대 (C)와 (D)를 완전히 맞물릴 때까지 밀어 넣습니다.

환자의 머리가 최대한 젖혀져야 하므로, 2개의 소독된 접촉 패드(E1)을 악관절 지지대 (C)와 (D)에 삽입해야 합니다.

파란색 접촉부를 코 아래에 접촉시킵니다.

다. 준비 마무리 (파노라마 뷰)

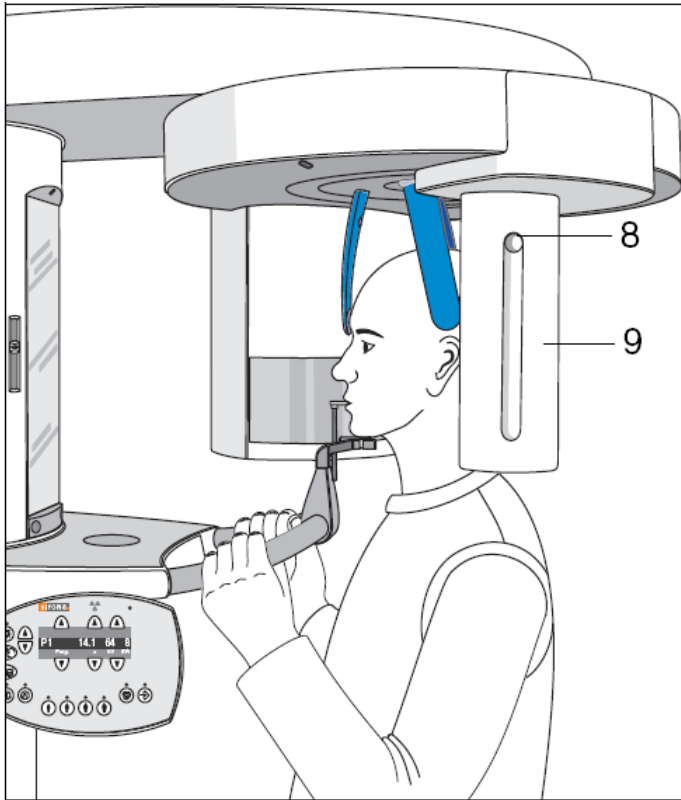

•라이트 로컬라이저가 아직도 켜져 있다면, 멀티패드의 키(28)를 눌러서 끄도록 합니다.


키 상단의 LED가 꺼집니다.

•센서(9)가 멈출 때까지 깊숙히 밀어넣습니다. 푸시버튼(8)이 표면과 높이가 같아지도록 튀어나오면 됩니다.

센서(9)가 깊숙히 삽입되지 않으면, 헬프 메시지 "H401" (PAN 슬롯에 센서를 삽입하십시오)이 표시장치에 나타납니다.

디지털 표시장치에 그 외의 헬프 메시지가 나타난다면, 프로그램과 해당 데이터만 계속 표시될 때까지 차례로 살펴보고 적절히 처리하도록 합니다.

라. 촬영 매개변수 선택

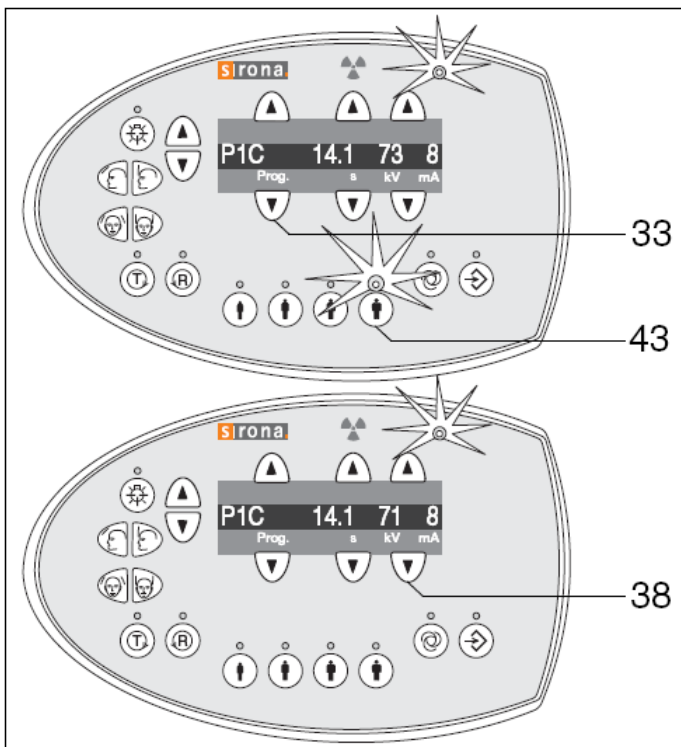

•원하는 촬영 프로그램을 선택하려면, Δ 상 / ∇ 하 프로그램 선택 키 (33)를 사용합니다.

프로그램 번호, 해당 프로그램의 촬영 시간 및 좌측에서 두번째 환자에 프로그램된 kV/mA 수치가

디지털 표시장치에 나타납니다.

순서 : P 1, P 1L, P 1R, P 1A, P 1C, P 10, P 12, BW1, TM 1.1/1.2, S 1, MS 1, C 3, C 4, C 1, C 2. 각 환자 심볼 키는 공장에서 프로그램된 kV/mA 조합을 가지고 있습니다.

•4 개의 환자 심볼 키 (43) 를 누름으로써 촬영 매개변수를 선택할 수 있습니다.


선택된 환자 심볼 상단의 LED가 켜지게 되고, 해당 kV/mA 수치가 디지털 표시장치에 나타납니다.

- 촬영 매개변수를 수동으로 변경

기본 저장된 kV/mA 조합에 의한 결과에 만족스럽지 못한 경우, Δ 상 / ∇ 하 kV/mA 키(38)를 이용하여 중간의 kV/mA 수치를 수동으로 선택할 수 있습니다. 이러한 경우, 환자 심볼 상단의 LED가

꺼지게 됩니다. 수동으로 조절된 새로운 수치가 다른 환자 심볼 키에 프로그램된 수치와 동일하게 맞춰지는 경우, 해당 환자 심볼의 LED가 켜지게 됩니다.

마. kV/mA 수치의 프로그램

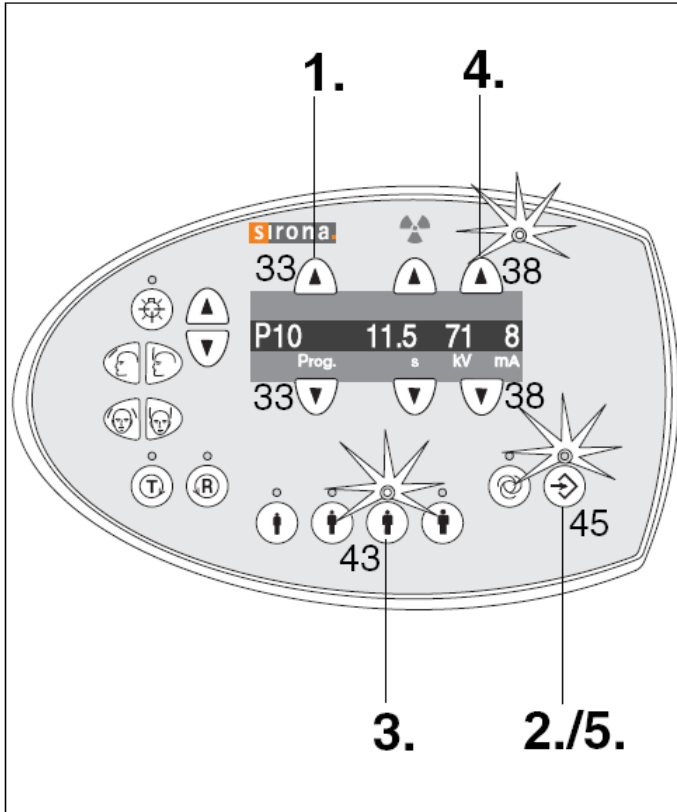


각 선택된 프로그램과 각 환자 심볼 키에 기본 저장되어있는 kV/mA 조합은 덮어쓰기 (재 프로그램) 가능합니다.

- 환자 심볼 키의 프로그래밍
- 1. 키(33)를 이용하여 변경하고자 하는 촬영 프로그램을 선택합니다.
- 2. 메모리 키(45)를 짧게 누르면; 키 상단의 LED에 불이 켜집니다.
- 3. 변경하고자 하는 kV/mA 조합을 가진 환자 심볼 키(43)를 선택합니다. 키 상단의 LED가 켜집니다.
- 4. 키(38)를 이용해 새로운 kV/mA 수치를 설정합니다.
- 5. 메모리 키(45)를 짧게 누르면; 키 상단의 LED가 잠시 켜졌다가 바로 꺼집니다. 프로그램 표시 화면이 P1(Pan 프로그램) 또는 C3(Ceph 프로그램)으로 이동합니다. 새로운 수치가 프로그램 되었습니다.

* 알 림

프로그래밍 하는 도중 5 초 이상의 시간동안 입력이 없는 경우 , 이전에 입력된 변경사항에 대한 저장없이 프로그래밍 모드는 자동적으로 중단됩니다.

바. 촬영 개시

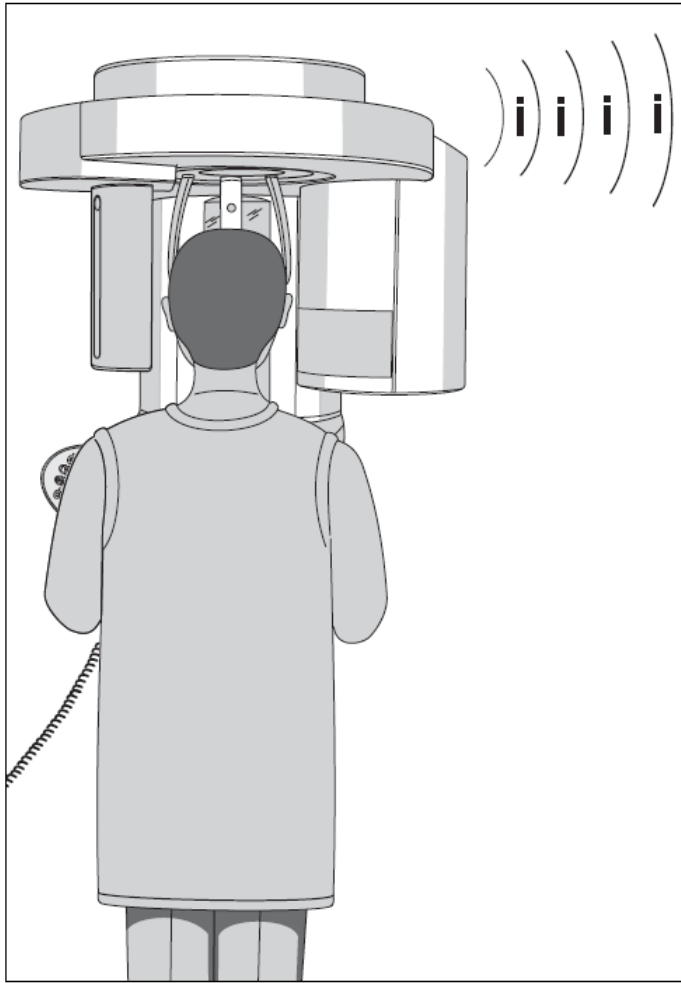

•방사선 보호 규정을 준수하십시오.

* 알 림

헬프 메시지 H... 이 멀티패드의 디지털 표시장치에 번갈아가며 나타나지 않아야 합니다.

* 알 림

예를 들어, X-ray 실의 문이 잘 닫히지 않았을 경우, 메시지 "H321"(문을 닫으십시오) 이 멀티패드와 리모트 컨트롤의 디지털 표시장치에 나타납니다.

* 주 의

촬영이 끝날 때까지 환자가 머리를 움직이지 않도록 주의를 주고, 또 발생하지 않는지 확인합니다!


•촬영을 시작하려면 촬영 버튼(10)을 누르십시오.

선택한 프로그램의 회전동작이 자동적으로 실시됩니다.

방사선 조사 도중에는, 멀티패드 또는 리모트 컨트롤의 광학 방사선 표시계(34)가 켜지게 됩니다.

이와 더불어 , 촬영이 끝날 때까지 신호음

이 발생합니다.

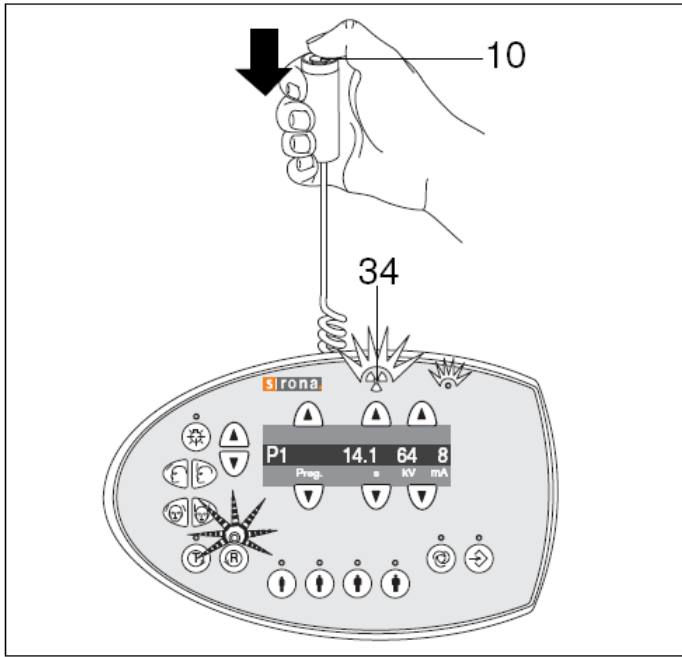

*** 주의**

촬영 버튼에서 먼저 손을 떼지 않도록 주의하십시오. 촬영 사이클 도중에 수 차례에 걸쳐서 방사선이 조사되는 경우도 있습니다. 장비가 촬영 사이클을 모두 마칠 때까지 기다려 주십시오.

•촬영이 종료된 시점은...

...점으로 이어진 선(.....)이 멀티패드와 리모트 컨트롤에 프로그램 번호와 번갈아가면서 나타나는 때입니다.

...짧고, 펄스 형식의 신호음이 촬영이 끝나면 들립니다. (종료음이 나지 않도록 설정 가능)

*** 알 림**

촬영 사이클이 종료된 것은, 진행 표시자가 100% 를 나타내고 미리보기 영상이 생성되기 시작하는, SIDEXIS 모니터에서도 확인됩니다.

•TM 1 약관절 촬영 프로그램의 두 부분의 경우, 촬영의 첫번째 부분이 완료되면 멀티패드와 리모트 컨트롤의 TM 1.1은 TM 1.2로 자동적으로 전환됩니다.

이러한 경우 촬영 버튼에서 손을 떼어도 됩니다. 그와 동시에, 회전부는 자동적으로 시작위치를 향해

이동합니다. TM 1.2는 위와 동일한 방식으로 촬영하고 완료될 수 있습니다.

•이마 지지대와 약관절 지지대가 자동적으로 개방되고, 환자를 장비에서 나오게 합니다.

촬영이 완료된 후, X-ray 이미지는 SIDEXIS가 있는 PC 모니터에 나타납니다.


멀티패드의 디지털 표시장치는 촬영 프로그램, kV/mA 수치 그리고 실제로 방사선이 조사된 시간을 나타냅니다.

R 키 상단의 LED가 점멸하기 시작한다.

•리턴 키 R을 눌러서 이전의 실제 촬영시간을 확인합니다.

•이후 리턴 키 R을 다시 눌러서 회전부를 시작위치로 이동시켜 초기화합니다.

준비 LED가 꺼집니다.

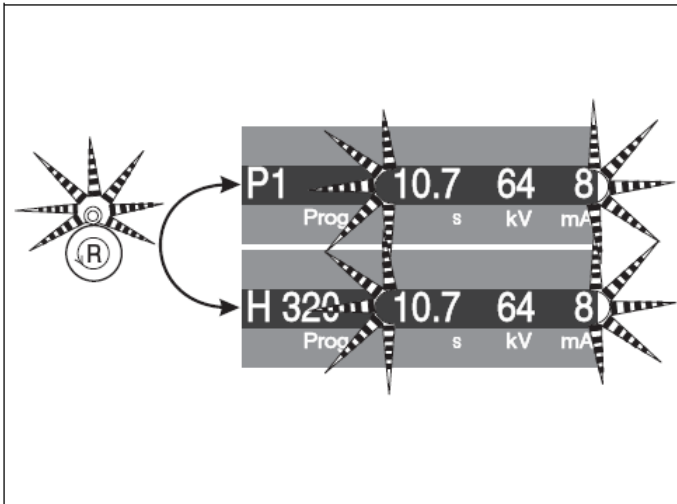

-촬영의 중단

촬영 버튼에서 이르게 손을 떼는 경우, 촬영은 중단됩니다.

촬영 중단에 앞서서 경과되었던 촬영 시간과 헬프 메시지 "H320"이 번갈아가면 디지털 표시장치에 나타납니다.

"R" 키 상단의 LED가 점멸하기 시작합니다.

•헬프 메시지를 처리하고 회전부를 다시 시작위치로 돌아가게 한 후에 촬영을 재개할 수 있습니다.


*** 알 림**

촬영을 재개하기에 앞서, 변경된 프로그램 설정이 있다면 반드시 다시 알맞게 선택하여 변경하도록 합니다.

- 자동 촬영 중단 (튜브 과열 보호)

이전 촬영후 다음 촬영이 너무 이른 경우, 자동 촬영 중단 기능에 의해 촬영이 차단됩니다.


촬영 버튼을 누르면, 냉각에 필요한 시간이 초단위로 줄어들면서 디지털 표시장치에 나타납니다.

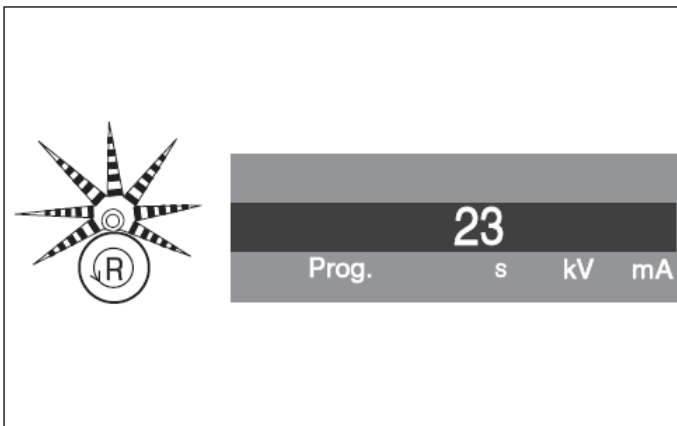

냉각 시간이 경과하기 전에 촬영 버튼을 누르게 되면, "R"키 상단의 준비 LED가 점멸하기 시작합니다. "R" 키를 누르면, 프로그램 데이터가 다시 디지털 표시장치에 나타납니다.

냉각 시간이 모두 경과한 후에만 다음 촬영을 실시할 수 있습니다.

사. 리모트 컨트롤

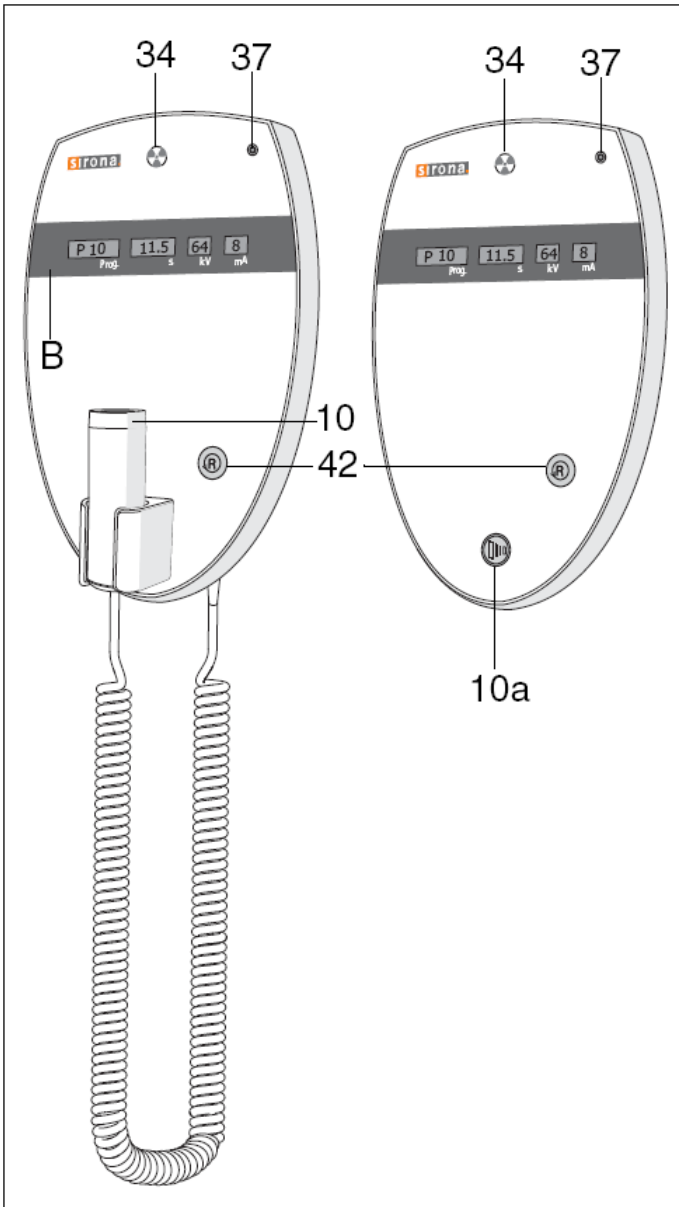

ORTHOPHOS XG가 문이 있고 환자로의 시각이 확보되는 X-ray 실에 위치해 있다면, 촬영할 때 리모트 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 이러한 경우, 촬영 버튼(10)을 장비에서 떼어내고 리모트 컨트롤에 부착할 수 있습니다.


환자로의 시각을 확보하기 위해서 더 이상 긴 케이블이 필요하지 않은 경우라면, 촬영 버튼 (10a)을 사용할 수도 있습니다.

리모트 컨트롤에는 촬영을 승인하고 장비를 시작위치로 초기화하는 "R" 키 (42), 광학 (34) 및 음성 방사선 표시기 그리고 "장비 켜짐" LED(37)가 있습니다. 멀티패드의 디지털 표시장치에 헬프 메시지가 표시되고 있는 동안에는, 리모트 컨트롤의 표시장치 "Prog."에도 프로그램 이름과 함께 번갈아가며 표시됩니다.

일단 모든 헬프 메시지가 처리되고 나면, 프로그램 이름 "Prog.", 촬영 시간 "s" 그리고 "kV" 및 "mA" 수치가 디스플레이 패널 (B)에 지속적으로 표시됩니다.

이제 촬영을 실시할 수 있습니다 .

촬영 프로그램 GUI 및 기능설명

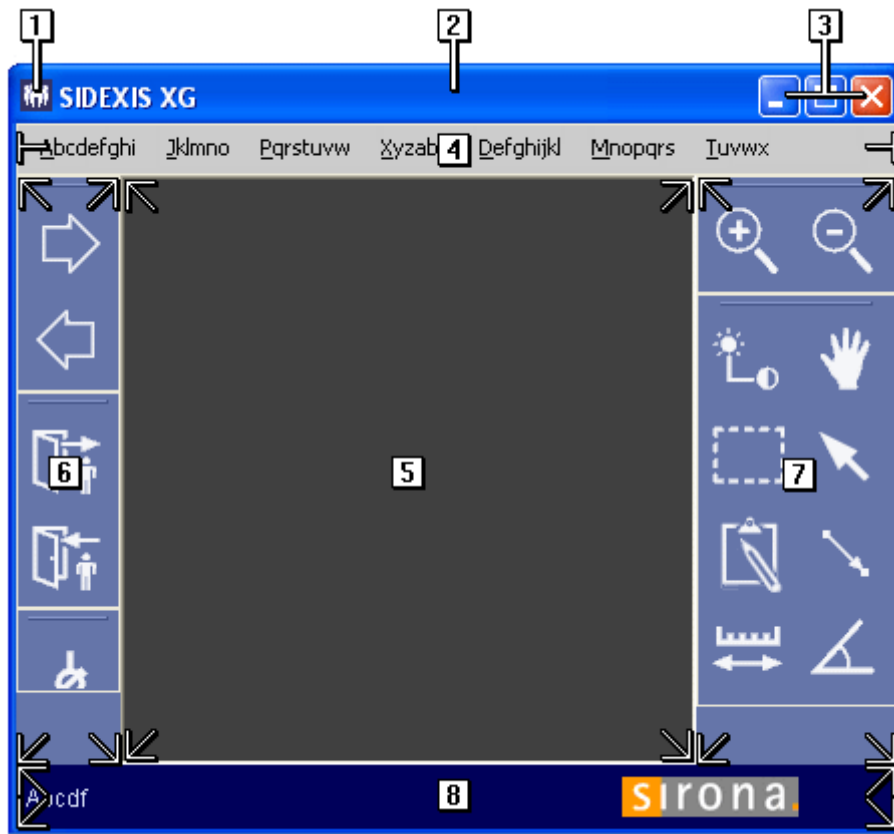

1. 프로그램 창의 시스템 내부
2. 선택한 환자 이름이 들어있는 제목 표시줄
3. 창 크기 조절용 버튼
4. 메뉴 표시줄
5. 분석 화면
6. 관리 도구 모음 영역
7. 이미지 편집 도구 모음 영역
8. 상태 표시줄

	환자 로그인	이미지 확대			이미지 축소
	환자 로그아웃	명암 및 대비 설정을 위한 마우스 제어기			표준 마우스 포인터
	촬영 준비 / 구강내 X-레이 촬영	왼쪽 스크롤바를 사용하여 활성화한 이미지의 밝기 변경			오른쪽 스크롤바를 사용하여 활성화한 이미지의 대비율 변경
	촬영 준비 / 파노라마, 세팔로 및 TSA X-레이 촬영				
	촬영 준비 / 3D X-레이 촬영				
	구강내 비디오 촬영 시작	이미지 반전			잘못된 색상 표현
	사진데이터베이스에서 보기용 이미지 선택	대비 최적화용 필터			양각 표시용 필터
	이미지 설명 및 결과 판독	소음 방지용 필터			샤프 포커스 효과가 추가된 필터
	이미지 삭제	마지막 필터 작업 실행 취소			초기 화면을 다시 만들기
	이미지 보기 인쇄	활성화한 사진을 왼쪽으로 90° 회전시킵니다			활성화한 사진을 오른쪽으로 90° 회전시킵니다
	이미지 메일 전송	확대경 기능 활성화			활성화한 이미지를 화면 크기로 확대
	프로그램 교체	이미지를 분석 화면에 열람용으로 표시			분석 화면의 사진을 치아 위치에 따라 배치
	프로그램 끝내기				

사용 후 보관 및 관리방법

청 소 시중에서 판매되는 약한 성분의 세척제를 사용하여 정기적으로 먼지, 때 또는 살균제 찌꺼기를 제거합니다.

액체가 송풍구로 흘러들어가지 않도록 주의하십시오!

표면에 닿은 약제는 즉시 닦아내십시오.

소 독 표면은 표면 살균제로 닦아낼 수 있습니다 . 방법에 대해서는 제조사의 설명서에 따르십시오!

(1) 주기적으로 기기를 청소한다.

(2) 습기 및 직사광선을 피한다.

(3) 청소방법

순한 연성 세제를 사용하여 표면의 이 물질을 닦아낸다. 이때, 송풍구 틈새에 액체가 침투하지 않도록 주의한다. 표면에 약제를 흘린 경우 바로 닦아낸다.

렌즈 부위는 알코올로 닦지 않는다. 스프레이 타입 혹은 액상 타입의 표면 소독제를 사용하여 소독한다. 페놀, peracetic acid, peroxide이 함유된 제재나 산소, sodium hypochlorite를 발생시키는 제재 사용을 금한다.

사용시주의사항

(1) 사용 시작 전

- 입력 전압은 정격 전압을 사용하여야 한다.
- X-선 방사를 할 경우는 전용 X-선 진료실에서 한다.
- X-선 장치는 접지 후 사용한다.

(2) 사용 중

- 기기의 전자 성능에 영향을 미칠 수 있는 휴대폰의 사용을 금한다.
- 작동자는 조사 시 조사창에서 일직선에 있으면 안되며 가급적 기기에서 멀리 떨어진 거리에 있어야만 한다.
- 조사 시 환자와 기기를 주시해야 한다.
- 기기에서 나오는 수평FH beam과 중앙 수직 beam은 1등급 레이저이므로 눈과 beam간에는 최소 10cm의 간격을 유지하여야 하며 beam을 직접 쳐다보지 않아야 한다.
- 센서에서 감지된 이미지가 PC로 전송되는 단계에서 문제가 발생하는 경우 기기는 이미지를 보존하기 위하여 안전 모드로 전환되는데 이 경우 이미지 보존을 위하여 기기나 PC의 전원을 끄지 말아야 한다.

(3) 사용 후

- 노출/휴지 관계를 주의하여야 한다.
- 각 조사마다 도중에는 반드시 cooling time을 가져야 한다.
- X-선 장치는 사용 후 필히 메인 스위치를 꺼야 한다.

-Sidexis 4, Version 4.0

<일반적 주의>

1. Sidexis 4를 통해 X선 촬영을 직접 할 수는 없다. 촬영 준비만 된다.
X선 촬영을 하기 위해서는 기기에서 작동 버튼을 눌러야 한다. X선 촬영을 실행하기 위한 세부사항은 기기의 상세 사용 설명서를 참조한다. 명시된 안전 지침 및 경고에 반드시 유의한다.
2. 사용자는 임상적으로 동등한 영역을 서로 비교하도록 한다.
3. PMS로 생성된 환자는 Sidexis 4에서 편집할 수 없다.
4. 내부 카드 번호가 있는 환자를 Sidexis 4로 새로 생성하고 병원에 PMS가 갖춰져 있는 경우, Communication Partners 구성 메뉴에서 반드시 Report internal patient ID if external is missing 확인란을 활성화해야 한다. 그렇지 않으면 환자 목록에 이중 항목이 생길 수 있다.
5. Patient Display 구성 메뉴에서 Card-index no 확인란만 활성화 되어 있으면 모든 환자에 대해 카드 번호를 입력해야 환자를 명확하게 식별할 수 있다.
6. Sidexis XG에서 적용된 원격 X선 영상에서는 영상위치와 상관없이 영상 오른쪽 아래에 항상 R이 삽입됩니다. 이는 혼돈을 초래할 수 있습니다. Sidexis XG에서 옮겨진 영상에 있는 L마크는 종래 영상에서 알려진 R/L 마크와 비교할 수 없습니다. 모든 원격 X선 영사에서 표시 R은 방사선 투과 방향이 아니라 원래 보기에서 영상을 반대로 뒤집어 보지 않도록 보장해 주는 표시입니다.
7. 로그인되지 않은 환자의 미디어를 가져오는 동안, 환자가 로그인되어 있지 않다면 여기에서 수동으로 환자에게 미디어를 할당해야 합니다. 이를 위해서는 미디어를 선택한 후 미디어를 할당할 환자 표의 환자를 두 번 클릭한다. 로그인된 환자에서도 이런 식으로 다른 환자 이름을 선택할 수 있다. 이는 이미 환자 이름이 있는 DICOM TIFF 파일에도 적용된다.
8. DICOM 내보내기 Wrap & GO를 사용하려면 Sidexis 4 스테이션에 DVD버너가 있어야 한다.
9. 환자의 명확한 식별을 위해 적어도 Card-index no 확인란이나 Last name, First name, Date of birth란이 활성화 되어 있어야 한다. Card-index no 확인란만 활성화 되어 있으면 각 환자에 대해 카드 색인 번호가 등록되어 있어야 한다. 해당되지 않는 환자가 로그인되면(구성에서 "Patient image" 확인란 외에 "Card-index no" 확인란만 활성화 되어 있는데도 카드 색인번호 없음) 로그인된 환자의 화면에 "Not Clearly identifiable" 빨간색 텍스트가 표시된다.
10. 이미지 촬영이 적합하지 않은 이미지에 대해선 조치를 취한다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	해당사항 없음
제조번호	제조원 표시사항 참조
제조연월	제조원 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com