

- **품목인증번호:** 수인 19-4181호
- **품목명:** 레진계인공치아
- **모델명:** 제조자 표시사항 참조
- **수입업자:** 덴스플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
- **제조원(제조국):** Dentsply Trubyte (미국)
- **제조의뢰원(제조의뢰국):** Dentsply International (미국)
- **사용목적:** 의치에 삽입하는 경질 레진계의 인공치아. 보통 각종 치수, 형태, 색조에 따라 전치부(상, 하악별) 또는 구치부(상, 하악별)의 세트로 제공한다.
- **중량 또는 포장단위:** 제조원의 포장단위에 의함
- **사용방법:**
  - 가. 사용 전 준비사항  
의치 제작용 치아 소제
  - 나. 사용방법
    - 1) 왁스 소제 : 치아에 묻어있는 왁스를 65-93°C 에서 녹여버린다.
    - 2) 왁스 작업 : 석고 모형에 왁스를 입힌다.
    - 3) 치아 배열 : 왁스 위에 인공치아를 배열한다.
    - 4) 매물 : 왁스 작업 분을 플라스크에 넣은 후 매물재를 투입한다.
    - 5) 왁스 소제 :
      - (1) 끓는 물에서 왁스를 깨끗이 소제한다.
      - (2) 중간 정도의 플라스크의 예에서 3시간 30분에서 4시간 동안 끓는 물에 둔다.
    - 6) 의치상 재료 투입 : 왁스소제 부분에 의치상용 레진을 투입한다.
    - 7) 열중합 : 의치상용 레진을 열중합한다.
    - 8) 피니싱
      - : 초과된 레진사용분을 적절한 도구로 제거하고 피니싱한다.
  - 다. 사용 후의 보관 및 관리방법  
일회용 제품이므로, 재사용하지 않고 폐기한다
- **사용 시 주의사항:**
  - 가. 화기에 접근을 금지한다.
  - 나. 솔벤트, 화학적 유기용제를 멀리한다.
  - 나. 반드시 치과 보철용으로 사용한다.
  - 라. 사용한 인공치아는 재사용하지 않고 폐기한다.
- **첨부분서의 작성 및 개정연월:** 2021.05
- **보관 또는 저장방법:** 직사광선과 열을 피하여 건조한 실온에서 보관한다.
- **유효기간:** 해당 없음
- **제조번호:** 제조자 표시사항 참조
- **제조연월:** 제조자 표시사항 참조
- **본 제품은 일회용 의료기기임 재사용금지**