

<b>품목신고번호</b>	수신 19-2673호
<b>품목명</b>	치과용수동식근관세정기
<b>모델명</b>	BNSTNIRD2230G
<b>수입업자</b>	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
<b>제조원(제조국)</b>	Produits Dentaires SA(스위스)
<b>사용목적</b>	치근관 세정 등을 위하여 사용하는 수동식기구
<b>중량 또는 포장단위</b>	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b>	
가. 사용 전 준비사항	
1) 사용 전 제품의 유효기간, 포장상태 및 이상여부를 확인한다.	
2) 제품의 파손여부를 확인한다.	
3) 사용 전 멸균하지 않는다.	
나. 조작방법	
1) 미리 그려진 점선을 따라 밀어 포장을 개봉한다.	
2) '안전잠금(Secure lock)' 부분을 주사기의 앞코부분에 넣고 돌려서 잠근다.	
3) 주사기에 바늘이 제대로 연결 되었는지 확인한다.	
4) 주사기/바늘의 조합을 근관세척의 일반적인 사용법에 따라 사용한다.	
다. 사용 후 보관 및 관리방법	
1) 사용 후 바늘을 주사기로부터 분리하여 사용국의 규정에 따라 처리한다.	
2) 본 제품은 일회용의료기기로 재사용을 금지한다.	
<b>사용 시 주의사항</b>	
1. 사용전 주의 사항	
• 사용전 멸균하지 않는다.	
2. 일반적인 주의사항	
• 사용 전 포장을 확인하여 오염된 경우, 사용하지 않습니다.	
• 근관의 길이를 확인하고 18-, 19-, 20- 및 22mm 길이를 표시하여 바늘이 적절한 위치에 있을 수 있도록 한다.	
• 바늘이 지속적인 관개수의 환류(flowback)으로부터 자유롭게 움직일 수 있도록 확인한다.	
<b>첨부분서의 작성 및 개정연월</b>	2021.05
<b>보관 또는 저장방법</b>	특별한 보관 상태는 요구 되지 않는다.
<b>제조번호</b>	LOT번호 참조
<b>제조연월</b>	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 일회용의료기기임 재사용 금지</b>	