

품목신고번호	수신 20-497 호
품목명	근관치료용페이퍼포인트
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조의뢰원(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
제조원(제조국)	Dentsply Tulsa Dental Specialties(미국)
사용목적	치근관의 건조, 약제 도포에 사용하는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 1) 사용 전 제품의 유효기간, 포장상태 및 이상여부를 확인한다. 2) 제품의 파손여부를 확인한다. 나. 사용방법 1) 알맞은 크기를 선택한다. 2) 근관치료 시 근관에 위치한 타액이나 혈흔 등을 흡수, 건조시킨다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 1. 본 제품은 일회용이므로 사용된 제품은 재사용하지 않는다.	
사용 시 주의사항 가. 포장이 손상된 제품은 사용하지 않습니다. 나. 사용된 제품은 폐기하고, 재사용해서는 안 됩니다. 다. 숙련된 치과의사 또는 적절한 병원 환경(장갑, 보안경, 고무 댄을 사용하는)에서만 사용합니다. 라. 모든 환자는 성별 및 지역에 대한 제한 없이 본 제품으로 치료할 수 있습니다. 마. 임산부, 모유 수유 여성 및 어린이에게는 안정성과 효과가 유효하지 않습니다.	
첨부문서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	특별한 보관 조건이 요구되지 않음
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 일회용 의료기기임. 재사용 금지	