

품목신고번호	서울수신 10-1948호
품목명	수동식재사용가능의료용천자기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	치아 근관을 천자하는 수동식 기기
중량 또는 포장단위	EA


사용방법

1. 사용 전 준비사항

Autoclave에서 134°C로 18분 동안 멸균 후 사용한다.

2. 사용방법

EasyPost Precision Drill N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6의 순서로 근관을 치료한다. (권당 rpm:

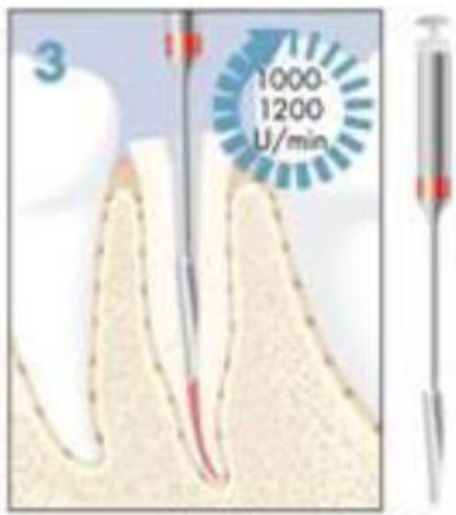

1,000~1,200)

3. 사용 후 보관 및 관리방법

-파일은 사용 후 반드시 멸균(Autoclave에서 134°C에서 18분)하여 보관한다.

-멸균방법(EN 13060, EN 285)

- 1) 비누와 온수로 기구를 닦는다.
- 2) 희석된 물 혹은 이온을 제거한 물로 깨끗하게 헹군다.
- 3) 에어드라이 한다.
- 4) Autoclave tray에 기구를 넣는다.
- 5) 희석된 물 혹은 이온을 제거한 물을 사용한다.
- 6) Autoclave에서 134°C로 18분 동안 멸균한다.

사용 시 주의사항

모든 새 제품은 사용이 익숙해질 때까지 보호대(safeguard) 등을 갖추고 충분한 연습시술을 거친 뒤 사용할 것.

- 1) 본 제품 사용 시, Low speed의 핸드피스를 준비할 것.
- 2) 800 ~ 1,200 rpm 범위 내에서 사용할 것.
- 3) 다양한 용도로 사용 시 무리를 주게 되어 부러질 수도 있음
- 4) 적절한 근관 확장의 가장 기본이 되는 Straight line access를 시행한다.
- 5) 최소한의 apical 압력을 가할 것. 항상 근관에 사용 시 무리한 힘을 가하지 말 것.
- 6) 시술 중 종종 근관에서 빼내어 흠(flute)을 세척할 것
- 7) 시술 절차 내내 canal을 irrigation 할 것
- 8) 심한 굴곡 부분이나 apical(치수첨공) 부위에는 특히 주의를 기울여 시술할 것
- 9) 근관의 크기에 맞는 사이즈로 시술할 것

첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	