

품목신고번호	서울수신 10-2666 호
품목명	치과근관치료용줄
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	VDW GmbH (독일)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	치과 진료 시 근관 치료에 사용되는 파일
중량 또는 포장단위	6EA / BOX
사용방법 1. 사용 전 준비사항 - 사용하기 전에 청결상태를 확인한다. - 제품의 파손여부를 확인한다. - 사용하기 전에 증기멸균(134°C, 15 분)을 한다. 2. 사용방법 - 시술하기 전 X-RAY 촬영을 하여 예상되는 사용길이를 측정한다. - 시술하고자 하는 부위의 정확한 사용길이를 결정하여 손잡이를 잡고 파일을 이용하여 근관치료에 시술한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 - 세척: 사용 후 혈액이나 이물질이 말라 붙는 것을 방지하기 위해 먼저 물에 담근 다음 세척한다. - 검사: 세척 후 면밀히 검사되어야 한다. 효과적인 멸균을 위해 세척상태를 확인한다. - 건조하고 청결한 장소에서 제품을 보관한다.	
사용 시 주의사항 1. 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다. 2. 유효성이 입증된 소독용액만을 사용하고 소독용액 제조사의 사용설명서에 따라 사용한다. 금속기구는 내식 소독제와 세척제를 사용하기를 권장한다. 3. 시술자의 안전을 위해 보호기구(장갑, 안경, 마스크)를 사용한다. 4. 균열, 변형(구부림, 꼬임), 부식, 색 코팅 또는 표시 손실과 같은 기구의 결함은 제품이 요구한 안전 수준의 사용목적을 실행시킬 수 없는 것을 뜻한다. 5. 보관방법 및 유효기간 - 보관방법: 실온보관 - 유효기간: 반영구	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com