

품목신고번호	서울수신 11-2010호
품목명	세라믹프라이머
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Ceramco (미국)
사용목적	치과용 도재 또는 세라믹으로 제작한 치과수복물 또는 기기와 레진계 재료를 접착하기 위해 사용하는 싺란계 중개재
중량 또는 포장단위	EA
<b>사용방법</b> 1) 사용 전 준비사항 -제품의 이상상태 및 유효기간을 먼저 확인한다. 2) 사용방법 -용기 뚜껑을 조심스럽게 시계반대 방향으로 돌려서 연다. -적당량의 용액을 용기 뚜껑에 부착되어 있는 붓에 묻힌다. -도포할 부위에 알맞은 양을 도포한다. -접착과정을 즉시 진행한다. 3) 사용 후 보관 및 관리방법 -사용 후 뚜껑을 잘 닫아둔다. -25°C이상되는 장소에서 보관하지 말아야 하며, 화기에 주의해야 한다. -유효기간이 경과한 제품은 사용하지 말아야 한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> ① 사용 시 알맞은 눈 보호대, 보호의류, 장갑을 착용한다. ② 본 제품은 original cap만을 사용하여 보관한다. 25°C이상의 온도에서 보관하지 말아야 하며, 화기로부터 멀리해야 한다. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 않는다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	-사용 후 뚜껑을 잘 닫아둔다. -25°C이상 되는 장소에서 보관하지 말아야 하며, 화기에 주의해야 한다.
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	