

품목신고번호	서울수신 11-2011호
품목명	세라믹산부식제
모델명	430491 All-Ceramic Etchant Gel & Neutralizer
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Ceramco (미국)
사용목적	치과용 도재 또는 세라믹으로 제작한 치과수복물 또는 기기와 레진계 재료를 접착하기 위해 사용하는 불산계 부식제
중량 또는 포장단위	EA
<b>사용방법</b> 1) 사용 전 준비사항 -제품의 이상상태 및 유효기간을 먼저 확인한다. 2) 사용방법 -Syringe의 cap을 제거한다. 내용물이 잘 나오는 것을 확인하기 위해 믹싱패드 위에 작은 양을 짜낸다. -작은 양을 짜내어 팁의 통로가 막히는 것을 확인해야 한다. -강한 힘으로 주사하지 말고 가벼운 힘으로 적용부위에 도포한다. -접착과정을 즉시 진행한다. 3) 사용 후 보관 및 관리방법 -사용 후 cap을 잘 닫아둔다. -일회용 팁이 부착된 상태로 보관하면 내용물이 굳어질 수 있으므로 반드시 원래 공급된 cap으로 닫아서 보관한다. -25°C이상 되는 장소에서 보관하지 말아야 하며, 냉동시키지 말아야 한다. -유효기간이 경과한 제품은 사용하지 말아야 한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> -사용 시 알맞은 눈 보호대, 보호의류, 장갑을 착용한다. -사용된 일회용 팁은 폐기한다. -본 제품은 original cap만을 사용하여 보관한다. 일회용 팁이 연결된 상태로 보관하면 제품 내용물이 굳어져서 사용하기가 어려워진다. 25°C이상의 온도에서 보관하지 말아야 하며, 냉동시키지 말아야 한다. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 않는다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	-사용 후 cap을 잘 닫아둔다. -25°C이상 되는 장소에서 보관하지 말아야 하며, 냉동시키지 말아야 한다.
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임