

품목신고번호	서울수신 12-139호
품목명	치과용연마제
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Austenal (미국)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	PKG
<b>사용방법</b> 1. 사용 전 준비사항 제품에 이상이 없는지 확인한다. 2. 사용방법 ① Polishing Compound를 사용하기 전에 Handpiece용 Rubber Wheel 이나 Point로 굽은 스크래치를 제거한다. ② Handpiece용 Felt Wheel 또는 Robinson brush를 회전시켜서 Polishing Compound를 묻혀서 Metal Frame표면을 문지른다. ③ 열이 발생하는 적절한 회전수를 유지하여 연마하면 원하는 광택을 얻을 수 있다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 반드시 뚜껑을 덮은 후 직사광선을 피해서 25°C이하의 상온에서 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> ① 밀폐된 장소에서 사용하지 말고, 적당한 환기장치가 되어있는 장소에서 사용해야 한다. ② 사용 시 보호안경 및 보호장갑을 착용해야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	사용 후 반드시 뚜껑을 덮은 후 직사광선을 피해서 25°C이하의 상온에서 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	