

품목신고번호	서울수신 12-1932호	
품목명	치과용연마제	
모델명	제조사표시사항참조	
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)	
제조원(제조국)	DENTSPLY Austenal (미국)	
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료	
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함	
사용방법		
(1) 사용 전 준비사항 반드시 환기가 잘 되는 장소에서만 사용해야 한다.		
(2) 사용방법 전기 수조에 연마용액을 붓고 연마할 재료를 천천히 담근 후 전기수조의 전원을 켜 후 표면 연마를 시작한다.		
(3) 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 남은 연마용액은 용기 뚜껑을 완전히 닫은 다음 환기가 잘 되는 장소에 차광 보관한다.		
사용 시 주의사항		
연마용액을 사용하기 전에 반드시 보호안경, 마스크, 보호장갑, 보호복을 착용해야 한다. 사용 후 남은 연마용액은 용기 뚜껑을 완전히 닫은 다음 통풍이 잘 되는 장소에 차광 보관한다. 눈에 접촉했을 경우, 충분한 양의 물로 씻고 의사의 진단을 받아야 한다. 반드시 환기가 잘 되는 장소에서만 사용해야 한다.		
유효기간		
번호	형명	유효기간
1	N026204 Protective coat powder	2년
2	N025835 Protective coat liquid	1년
3	N025920 All Purpose protective coat, Ready Mix	2년
4	N010540 Austenal refractory model dip	반영구
5	N010450 Bio dip - cold model dip hardener	2년
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05	
보관 또는 저장방법	통풍이 잘 되는 장소에 차광보관	
제조번호	LOT번호 참조	
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조	
본 제품은 의료기기임		