

품목신고번호	서울수신 12-2193호
품목명	치과용회전연마기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Austenal (미국)
사용목적	회전운동을 이용하여 연마하는 기기
중량 또는 포장단위	제조원 포장단위에 의함
사용방법 1. 사용 전 준비사항 -치과기공용 핸드피스에 치과용 회전 연마기를 연결 시 정확하게 연결되었는지 확인한다. 느슨하게 연결되었거나 연장하여 연결했을 경우 상처를 입을 수 있다. 2. 사용방법 -알맞은 size의 절삭기구를 치과용 회전 연마기에 안전하게 연결한 후 연마하고자 하는 부위를 천천히 기구에 대고 연마한다. -연마기로 연마를 한 후, 필요한 경우에는 Polishing Wheel을 사용하여 보철물에 광택을 낸다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용된 연마기는 광택용 브러쉬로 깨끗이 청소한 후 습기가 없는 건조한 장소에 보관한다.	
사용 시 주의사항 -연마기를 사용하기 전에 반드시 보호안경과 마스크를 착용해야 한다. -사용된 연마기의 날이 손상되지 않도록 연마기를 사용한 후에는 최초 포장용기 안에 세워서 안전하게 보관한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	-사용된 연마제는 재사용하지 말고 폐기한다. -습기가 없는 장소에서 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지	