

품목신고번호	서울수신 12-864호
품목명	치과연마용브러쉬
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DFS-DIAMON GmbH (독일)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Dentsply Austenal (미국)
사용목적	회전운동을 이용하여 청소하는 브러쉬
중량 또는 포장단위	PACK
<b>사용방법</b> 1. 사용 전 준비사항 치과기공용 핸드피스에 브러쉬를 연결 시 정확하게 연결되었는지 확인한다. 느슨하게 연결되었거나 연장하여 연결했을 경우 상처를 입을 수 있다. 2. 사용방법 기공용 핸드피스에 안전하게 연결한 후 연마하고자 하는 부위를 천천히 연마한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 사용된 브러쉬는 깨끗이 청소한 후 습기가 없는 건조한 장소에 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> -브러쉬를 사용하기 전에 반드시 보호안경과 마스크를 착용해야 한다. -사용된 브러쉬는 날이 손상되지 않도록 최초 포장용기 안에 세워서 안전하게 보관한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	습기가 없는 건조한 장소에 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	