

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 품목신고번호 | 서울수신 12-868호 |
| 품목명 | 치과연마용휠 |
| 모델명 | 제조사표시사항참조 |
| 수입업자 | 덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) |
| 제조사(제조국) | DFS-DIAMON GmbH (독일) |
| 제조의뢰자(제조의뢰국) | Dentsply Austenal (미국) |
| 사용목적 | 회전운동을 이용하여 연마하는 휠 |
| 중량 또는 포장단위 | PACK |
| 사용방법 1. 사용 전 준비사항 -치과기공용 핸드피스에 휠을 연결 시 정확하게 연결되었는지 확인한다. 느슨하게 연결되었거나 연장하여 연결했을 경우 상처를 입을 수 있다. 2. 사용방법 -기공용핸드피스에 안전하게 연결한 후 연마하고자 하는 부위를 천천히 연마한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용된 휠은 깨끗이 청소한 후 습기가 없는 건조한 장소에 보관한다. | |
| 사용 시 주의사항 -휠을 사용하기 전에 반드시 보호안경과 마스크를 착용해야 한다. -사용된 휠은 날이 손상되지 않도록 최초 포장용기 안에 안전하게 보관한다. | |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월 | 2021.05 |
| 보관 또는 저장방법 | 습기가 없는 건조한 장소에 보관한다. |
| 제조번호 | 제조사 표시사항 참조 |
| 제조연월 | 제조사 표시사항 참조 |
| 본 제품은 의료기기임 | |