

품목신고번호	서울수신 13-2478 호
품목명	치과교정용장치
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치과교정치료를 위해 브라켓과 함께 사용하는 고정기구
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 1. 적용 전 치아 표면의 습기 및 이물질을 제거한다. 2. 에칭 에이전트 사용 시 에칭 에이전트의 사용방법에 따라 에칭한다. 나. 사용방법 1. 치아 표면에 알맞은 크기의 교정용 브라켓을 부착한 후 와이어를 연결하고 고정시킨다. 2. 부착된 교정용 브라켓에 맞는 크기의 제품을 선택하여 고정된 와이어 slot 위에 안전하게 끼운다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 1. 사용 후 남은 제품은 밀봉하여 직사광선을 피하여 깨끗한 실온에 보관한다. 2. 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않는다.	
사용 시 주의사항 1. 제품에 민감한 반응을 보이는 경우 본 제품의 사용을 중단하고 의사의 진단을 받는다. 2. 구강 내에서 제품을 절삭 또는 연마하지 않는다. 3. 본 제품은 일회용이며 치과용으로만 사용된다. 4. 기재된 사용목적 이외의 용도로 사용하지 않는다. 5. Dentsply-Sankin 사의 브라켓과만 함께 사용되어야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하여 깨끗한 곳에서 실온보관
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 일회용의료기기이므로 재사용금지	