

| | |
|---|---|
| 품목신고번호 | 서울수신 14-1657호 |
| 품목명 | 컨디셔너 |
| 모델명 | 606.07.030 |
| 수입업자 | 덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) |
| 제조원(제조국) | Dentsply DeTrey GmbH (독일) |
| 사용목적 | 상아질의 스미어층을 제거 또는 처치하기 위하여 사용하는 산성 물질 |
| 중량 또는 포장단위 | 제조원의 포장단위에 의함 |
| 사용방법 1. 사용 전 준비사항 제품의 유효기간과 포장상태를 확인한다. 2. 사용방법 시멘트를 수복하기 전, 본 제품을 와동 표면에 적용하고 15초간 그대로 둔 후 씻어낸다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 뚜껑을 꼭 닫은 상태로 10-24°C의 직사광선이 닿지 않는 건조한 곳에서 보관한다. | |
| 사용 시 주의사항 1. 직사광선을 피하여 10-24°C에서 보관한다. 2. 치과용으로만 사용한다. 3. 유효기간: 3년 | |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월 | 2021.05 |
| 보관 또는 저장방법 | 직사광선을 피하여 10-24°C에서 보관한다. |
| 제조번호 | LOT번호 참조 |
| 제조연월, 사용기한 | 제조자 표시사항 참조 |
| 본 제품은 의료기기임 | |