

**【품목명】**치과임플란트시술용드릴 (C21020.01, 1등급)

**【모델명】**제품라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 10-1346호

**【사용목적】**임플란트 시술에서 임플란트용 핸드피스에 부착하여 골을 삭제하는 기구

**【사용방법】**

■ **사용 전 준비사항**

- 비멸균제품
  - 1) 제품사용 전 반드시 멸균 (고압증기멸균, 121도 19분)으로 하십시오.
  - 2) 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인하십시오.
- 멸균제품
  - 1) 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인하십시오.
  - 2) 멸균된 일회용 제품으로 재사용하지 않아야 합니다.

■ **사용방법**

- 1) 골량 및 골밀도를 확인하고 시술목적에 맞는 드릴을 고르십시오.
- 2) 핸드피스에 연결하십시오.
- 3) 알맞은 직경과 깊이로 골을 천공하십시오.

■ **사용 후 보관 및 관리방법**

- 비멸균 제품 : 세척, 멸균 후 실온에 보관하십시오.

**【사용시 주의사항】**

• **사용할 때 주의 사항**

본 제품의 표면은 가능한 한 손으로 접촉하지 마시고, 접촉할 경우는 고무 장갑을 끼고 전용공구 이외의 기구는 사용하지 마십시오.

• **보관조건 혹은 저장방법 : 실온 보관**

• **Single Patient Drill 제품은 일회용으로 재사용하지 마십시오.**

**[일회용 (재사용 금지)]**

**【보관 또는 저장방법】** 실온보관

**【중량 또는 포장 단위】** 1개

**【제조번호/제조연월】** 제품라벨 참조

**【수입판매원】** (주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조의회사】** Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

**【제조사】** Dentsply IH AB / Aminogatan 1, PO Box 14, 431 21 Molndal, Sweden