

【품목명】수동식의료용기자 (A48010.01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 04-1973호

【사용목적】조직이나 골의 단면 또는 치근을 들어올리는 기구. 엘리베이터(Elevator), 골막 기자(Periosteum elevator), 리프터(Lifter) 등을 포함한다.

【사용방법】

1. 시술부위에 알맞은 의료용기자를 채택한다.
2. 의료용기자의 손잡이부분을 잡고 sinus판막의 위치를 정확하게 설정한 후 조심스럽게 판막을 들어올린다.

【사용 후 보관 및 관리방법】

1. 사용된 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

【사용시 주의사항】

1. 시술 30분 전 반드시 소독을 해야 한다.
2. Sinus membrane(비강막)을 들어 올릴 때 과도한 힘을 주어 sinus membrane에 손상이 가지 않도록 주의한다.

【보관 또는 저장방법】상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다.

【중량 또는 포장 단위】1세트

【제조번호/제조연월】제품 라벨 참조

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany