

**【품목명】**수동식의료용기자 (A48010.01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 04-761호

**【사용목적】**조직이나 골의 단면 또는 치근을 들어올리는 기구. 엘리베이터(Elevator), 골막 기자(Periosteum elevator), 리프터(Lifter) 등을 포함한다.

**【사용방법】**

1. 시술부위에 적합한 각도를 지닌 의료용 기자를 채택한다.
2. 의료용 기자의 손잡이 부분을 잡고 sinus 판막의 위치를 정확하게 설정한 후 조심스럽게 판막을 들어올린다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

1. 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

**【사용시 주의사항】**

1. sinus 판막을 들어올릴 때에는 과도한 힘을 주어 sinus가 다치지 않도록 주의한다.
2. 시술 30분 전 반드시 소독을 해야 한다.

**【보관 또는 저장방법】**상온보관

**【중량 또는 포장 단위】**1세트

**【제조번호/제조연월】**제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH  
/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany