

**【품목명】**의료용절삭기구 (A55050,01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 04-779호

**【사용목적】**천자기, 천공기 및 핸드피스 등에 사용하는 절삭용 버(burr), 절삭용 디스크, 광택용 휠, 스트립 등의 기구. 레이저, 수술기용 디스크를 포함한다.

**【사용방법】**

1. 적절한 용도의 의료용 절삭기구를 선택하여 보철물의 아래 면에 대고 보철물의 거친 부분을 매끈하게 절삭시킨다.
2. 절삭기구로 절삭을 한 후, 필요한 경우에는 polishing wheel을 사용하여 보철물에 광택을 낸다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

1. 사용된 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

**【사용시 주의사항】**

1. 보철물의 아래 면에 절삭할 때에는 절삭기구와 보철물의 중심 축이 반드시 일치하도록 하여야 한다.
2. 사용한 절삭기구의 날이 손상되지 않도록 절삭기구를 사용한 후에는 적당한 장소에 보관해 둔다.

**【보관 또는 저장방법】**상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다.

**【중량 또는 포장 단위】**1개

**【제조번호/제조연월】**제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany