

# CEREC Primescan

## 카메라 보정 (캘리브레이션) 가이드

- 최상의 결과를 얻기 위해 스캐너는 깨끗하게 소독 및 건조된 상태여야 합니다.
- 색상 분석을 위한 색상 보정은 14일마다 수행합니다. (색상 분석 보정 툴은 용기 오픈 후 1년만 사용할 수 있습니다)
- 최적의 결과를 얻기 위해 Primescan의 15~20분 예열 시간을 갖습니다.



### 1 준비

프라임스캔 전용 보정툴을 준비해 주십시오.




### 2 프로그램 선택

1. 세렉(CEREC) 소프트웨어 상에서 아래 순서로 프로그램을 선택해 주십시오.  
구성 > 장치 > 프라임스캔 > 보정
2. 자동으로 예열이 진행됩니다.
3. 보정세트가 가볍게 맞물릴 때까지 시계 방향으로 완전히 돌립니다.
4. 보정 세트에서 보호 캡을 제거하고, 스캐너에 팁을 장착합니다
5. "확인" 버튼을 클릭합니다.



### 3 보정툴 삽입 및 회전

1. 회전하라는 메시지가 나타날 때 왼쪽 방향으로 단계별로 풀어주고 캡쳐 하는 중 일 때는 대기합니다.
2. 1번 과정을 총 18번 실시합니다.
3. 소프트웨어는 보정 진행 상황을 표시하며 진행 과정이 종료되면 사용자에게 알려줍니다.
4. 다음과 같이 화면이 바뀌면 보정 세트의 하단부를 스캐너 팁에 조립합니다.
5. "확인" 버튼을 클릭합니다.
6. 보정 과정이 계속됩니다.
7. 보정이 완료되면 이를 나타내는 메시지가 표시됩니다.

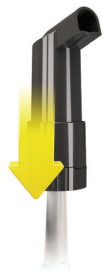

#### 더 많은 정보 확인하기



청소 및 소독에 관한 자세한 사항은 사용자 매뉴얼 또는 홈페이지 내 '유지관리' 동영상을 확인하십시오. '유지관리' 동영상은 아래 주소를 입력하거나 오른쪽 QR코드를 인식하여 확인할 수 있습니다  
<https://www.dentsplysirona.com/ko-kr/service/maintenance/cerec.html>

#### 덴츠플라이시로나 코리아 핫라인

02-2008-7600 · 서비스팀: ARS "1"  
· 교육팀: ARS "3" → "1"

평일 9:00 ~ 18:00 (토요일, 공휴일 휴무)