

CEREC Primescan

관리, 청소 및 소독 가이드

※ 중요 - CEREC Primescan에 Spray형태의 소독제를 분사하거나 세정제에 담그지 마십시오.
- 기계에 닿는 모든 천 & 면소재 거즈는 무색이어야 하며, 소독제 & 액체가 흐르지 않도록 충분히 짠 후 사용해주시길 바랍니다.

1 유지관리

- 카메라 렌즈는 사파이어 코팅 글라스 재질입니다. 카메라 렌즈가 긁히지 않도록 사용에 주의를 기울여 주십시오.
- 카메라 렌즈에 흐릿한 점이 있으면 당사에서 권장하는 소독제 'Cavi-wipes'를 사용해 렌즈를 닦아주십시오. 이후 식수를 적신 면 거즈로 표면을 닦고 보풀이 없는 무색의 천으로 닦아 건조시켜 마무리합니다.
- 카메라 슬리브는 오토클레이브가 불가합니다.
- 프라임스캔은 1회용 슬리브를 사용할 수 있으며, 웹샵에서 구매가 가능합니다.

2 캘리브레이션 (카메라 보정)

- 최상의 결과를 얻기 위해 스캐너는 깨끗하게 소독 및 건조된 상태여야 합니다.
- 다음과 같은 경우 CEREC Primescan을 다시 보정하십시오.
 - 장비 혹은 소프트웨어 설치 후
 - 운송 후 (흔들림 스트레스가 가해진 경우)
 - 냉난방되지 않는 공간에 보관한 후 (온도차: 30°C / 85°F이상)
 - 마지막 보정 시와 작동 시의 온도차가 15°C / 60°F이상인 경우
 - 시스템 사용시 지속적인 진동이 가해짐에 따라 월 1회 보정 권장
- 색상 분석을 위한 색상 보정은 14일마다 수행합니다. (색상 분석 보정 툴은 용기 오픈 후 1년만 사용할 수 있습니다)
- 최적의 결과를 얻으려면 CEREC Primescan의 15~20분 예열 시간을 갖습니다.

※ 카메라 보정방법은 사용설명서 또는 덴츠플라이시로나 홈페이지 '유지관리' 페이지에서 확인할 수 있습니다.

3 청소 및 세정

- 덴츠플라이 시로나에서 승인한 세정제만 사용하십시오! 한국에서는 Cavi-wipes를 권장합니다.
 - Alpro: Minuten Spray classic, Minuten Wipes, Plasti Sept, Plasti Sept Wipes
 - Merz: Pursept-A
 - Dürr: FD 312

카메라 렌즈 슬리브 청소

CEREC Primescan은 사용 직후 아래 가이드에 따라 세척하십시오.

1. 물과 중성 비누를 섞어 흡수시킨 흡수성 면 소재 거즈 또는 위에 나열된 세정제를 사용하여 표면을 닦으십시오.
 - ※ 렌즈 표면에 증발로 인한 물자국이 생기지 않도록 주의하십시오.
 - ※ 카메라 표면에 이물질이 생기지 않도록 주의하여 닦으십시오.
2. 보풀이 없는 천을 사용하여 카메라 슬리브를 건조 시킵니다.

4 소독

- 카메라 및 카메라 슬리브 소독
1. 예비 세척 프로세스를 수행합니다. (3번 "카메라 렌즈 슬리브 청소" 참조)
 2. 회사에서 권장하는 전용 소독제 'Cavi-Wipes'를 사용하여 카메라 슬리브, 몸통, 카메라 거치대, 카메라 가열판을 닦아줍니다.
 3. 식수로 적신 면 거즈로 다시 렌즈와 몸통, 거치대 등을 닦아줍니다.
 4. 보풀이 없는 천을 사용하여 미러 슬리브를 건조시킵니다.



청소 및 소독에 관한 자세한 사항은 사용자 매뉴얼 또는 홈페이지내 '유지관리' 동영상을 확인하십시오.
'유지관리' 동영상은 아래 주소를 입력하거나 오른쪽 QR코드를 인식하여 확인할 수 있습니다
<https://www.dentsplysirona.com/ko-kr/service/maintenance/cerec.html>