

АН Temp™

Временный пломбировочный материал
на основе гидроксида кальция
для корневых каналов




Внимание,
ознакомьтесь с
инструкцией по
эксплуатации



Производитель :
DENTSPLY DeTREY GmbH,
78467 Констанц,
Германия


© DENTSPLY DeTREY 2012-12-07
www.dentsply.de

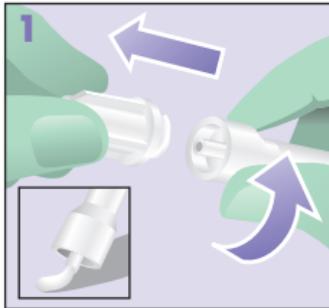


Снимите колпачок со шприца.
Чтобы убедиться в свободной
подаче материала из
шприца, выдавите небольшое
количество на палец-ку для смешивания.



В качестве дополнительной меры
предосторожности от перекрёстного
заражения и загрязнений, используйте
защитные барьеры Disposa-Shield®
во время применения пасты
AH Temp™.

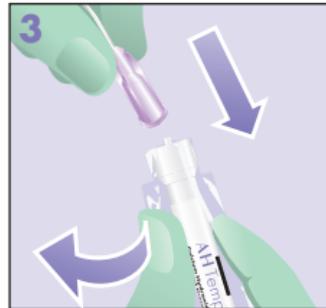

Присоедините одноразовую канюлю
над защитным барьером на носик
шприца. Затем поверните канюлю по
часовой стрелке, пока она не зафик-
сируется. Потяните канюлю с усилием,
чтобы убедиться в её креплении на
шейке шприца.

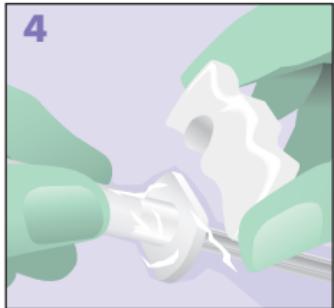


Присоедините рукоятку с
крыльями на шприц во
фронтальном направлении.

АН TempTM

Временный пломбировочный материал на основе гидроксида кальция для корневых каналов



Чтобы убедиться в свободной подаче материала из шприца, выдавите небольшое количество на палетку для смещивания

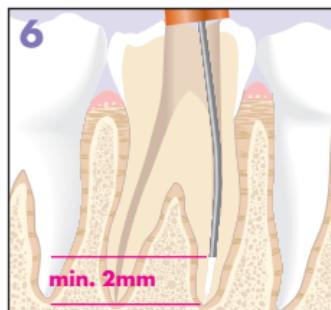

Вносите пасту не доходя 2 мм до апекса, всегда следите за тем, чтобы канюля свободно двигалась в канале. Не вносите пасту с помощью пластиковых насадок, которые могут застрять в просвете канала.



Удалите излишки пасты, положите ватный шарик и/или поставьте временную пломбу для тщательного запечатывания устьев корневых каналов.

Информация для заказа

АН Temp™ набор

4 x АН Temp™ шприцы,
0.75 мл каждый
20 x АН Temp™ канюли
1x рукоятка
1x иллюстрированное
техническое руководство
1x инструкция

номер заказа **606.20.123**

АН Temp™ набор канюль

20 x АН Temp™ канюли
номер заказа **606.20.124**



**Защитные барьеры
Disposa Shield**
номер заказа **A8801351**

