

CEREC MTL™ Zirconia

Multi Transitional Layer Zirconia

Bestellinformationen

Produktinformation



SKU	CEREC MTL Zirconia mono (4 Stk.)	SKU	CEREC MTL Zirconia medi (2 Stk.)
5365450001	CEREC MTL Zirconia A1 mono	5365450021	CEREC MTL Zirconia A1 medi
5365450002	CEREC MTL Zirconia A2 mono	5365450022	CEREC MTL Zirconia A2 medi
5365450003	CEREC MTL Zirconia A3 mono	5365450023	CEREC MTL Zirconia A3 medi
5365450004	CEREC MTL Zirconia A3.5 mono	5365450024	CEREC MTL Zirconia A3.5 medi
5365450007	CEREC MTL Zirconia B2 mono	5365450027	CEREC MTL Zirconia B2 medi
5365450011	CEREC MTL Zirconia C2 mono	5365450031	CEREC MTL Zirconia C2 medi
5365450014	CEREC MTL Zirconia D2 mono	5365450034	CEREC MTL Zirconia D2 medi



Glasurzubehör

SKU	Produktbezeichnung
6580067	CEREC SpeedPaste
6611870	Glasur Support Single Unit +A
6583889	Glasur Support Multi Unit
5368273100	Dentsply Sirona Universal Glasurspray Fluo
5368273101	Dentsply Sirona Universal Glasurspray
D605540	DS Universal Glasur
D601315	DS Universal Glasur Liquid

CEREC Primemill

SKU	Fräser für CEREC Primemill				
67 13 940	Bur 2.5 ZrO ₂ CS				
67 13 932	Bur 1.0 CS				
67 13 924	Bur 0.5 CS				
Anwendungsfall	Farbe	Linke Seite	Rechte Seite	Farbe	Mögliche Verarbeitungsmodi
Fräsen von ZrO ₂ Extrafein		Bur 2.5 ZrO ₂ CS	Bur 1.0 CS		Schnell, Fein, Extrafein Fräsen: Zirkonoxid
		Any tool	Bur 0.5 CS		
Fräsen von ZrO ₂ Super-Schnell		Bur 2.5 ZrO ₂ CS	Bur 2.5 ZrO ₂ CS		Super-Schnell Fräsen: Zirkonoxid
		Bur 1.0 CS	Bur 1.0 CS		

CEREC MC XL, CEREC MC X

SKU	Fräser für CEREC MC XL, CEREC MC X	
62 99 395	Shaper 25	
62 99 387	Finisher 10	


Motoren Set	Links	Rechts	Kombination
Set 1	Shaper 25	Finisher 10	Trockenfräsen

CEREC MTL™ Zirconia

Multi Transitional Layer Zirconia

Sinterparameter fürs Trockenfräsen

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS (VITA)

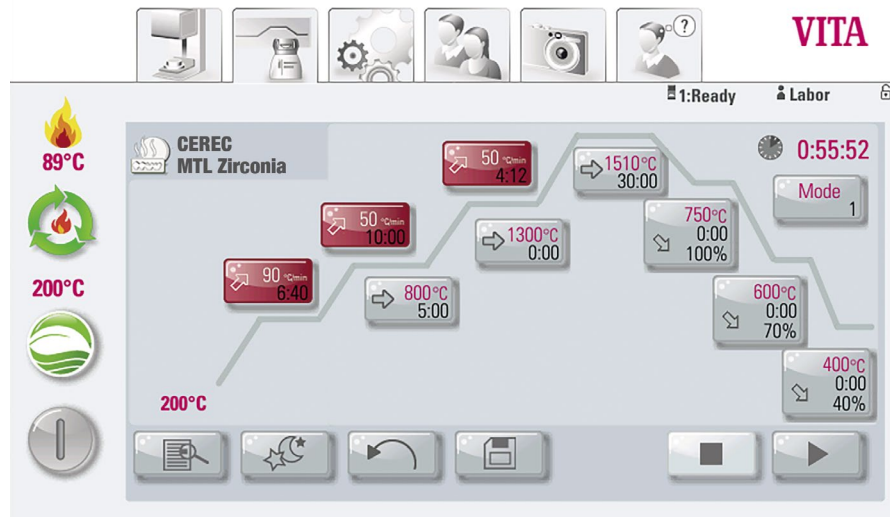

inLab Profire (Dentsply Sirona)

#			
S1	99	800	5
S2	50	1510	30
S3	99	750	0
S4	120	50	0

Programat CS4 (Ivoclar Vivadent)

t ₁	99	T ₁	800	H ₁	00:05
t ₂	50	T ₂	1500	H ₂	00:00
t ₃	15	T ₃	1510	H ₃	00:30
t ₄	70	T ₄	750	H ₄	00:00
t ₅	10	T ₅	0	H ₅	00:00
0	00:01				

Dentsply Sirona

Deutschland / Österreich
 Dentsply Sirona Europe GmbH
 Sirona Straße 1, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich
 pre@dentsplysirona.com
 DEU: 08000-735000 (gebührenfrei)
 AUT: 00800-00735000 (gebührenfrei)

Schweiz
 Dentsply Sirona (Schweiz) AG
 Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
 pre@dentsplysirona.com
 CHE: 00800-00735000 (gebührenfrei)

Hergestellt von
 VITA Zahnfabrik
 H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen
 Deutschland

Besuchen Sie uns auf: dentsplysirona.com facebook.com/dentsplysirona dentsplysirona.de

© Dentsply Sirona Inc 2021, Alle Rechte vorbehalten.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Printed in Germany
 7660-67003.1/0921/2.0/OEW