

IT Guideline Primescan 2

시작하기 전에 다음을 확인하세요:

- 인터넷 라우터 로그인 정보
- 액세스 포인트 로그인 정보
- DS Core 고객 로그인 정보
- DS Core Link 앱을 통한 연결 확인 결과

Call if you need help



02-2008-7600

서비스팀 카카오톡 채널


Primescan 2 사용을 위한 각 진료실별 요구사항

1 인터넷 업로드/다운로드 속도가 스캐너당 25 Mbit/s 이상인지 확인




- 업로드 속도가 최소 25 Mbit/s 이하일 경우:
인터넷 제공 업체에 문의하여 더 높은 속도로 업그레이드
(Primescan 2는 25 Mbit/s 이하에서는 사용 불가)
- Primescan 2의 원활한 사용을 위해서는 인터넷 업로드
속도 100 Mbit/s 이상이 권장됩니다.

2 치과내 Primescan 2 사용 위치 확인 → 스캔 위치로부터 최대 5 m 이내에 액세스 포인트 설치

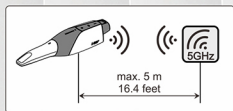

- 최적의 Wi-Fi 커버리지를 위해 스캔 위치에서
최대 5 m(16.4 피트) 이내에 설치

3 오직 유선 액세스 포인트만 설치 (Wi-Fi 신호 증폭기 사용 금지)

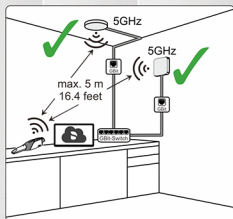

- 최적의 Wi-Fi 커버리지를 위해 스캔 위치에서
최대 5 m(16.4 피트) 이내 설치
- 액세스 포인트는 반드시 LAN선/케이블(Cat5e 이상)로
네트워크에 연결해야 함
- 무선 신호 증폭기 사용은 권장하지 않음
- 동일한 액세스 포인트는 거리 조건이 충족된다면
여러방에서 공유 가능
- 반드시 Wi-Fi5(802.11 ac) 이상 사용



- 장애물이 없어야 함 (예: 두꺼운 벽, 금속 표면 등)



- 과열 방지를 위한 적절한 환기 필요

4 DHCP 및 방화벽 설정

Port (TCP/UDP)
123
68
546
53
443

- 반드시 DHCP가 활성화되어 있어야 함
- 방화벽에 의해 포트가 차단되지 않아야 함

5 Wi-Fi 설정



- Primescan 2 전용 5 GHz Wi-Fi SSID 생성
- WPA2+ 미리 공유된 키(presharedkey) 사용
- 안정적인 연결을 위해 해당 Wi-Fi 장치는 독립된 채널에서만 사용